

FRANÇAIS

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

PROFIL DE L'UTILISATEUR

L'utilisateur visé doit être un professionnel de la santé agréé, le patient, le soignant du patient ou un membre de la famille apportant une assistance.
L'utilisateur doit être capable de lire, de comprendre et être physiquement capable d'exécuter toutes les instructions, mises en garde et précautions fournies dans les consignes d'utilisation.

UTILISATION/INDICATIONS

L'attelle de médio-pied est conçue pour soulever le médio pied et soutenir l'arche transversale, ce qui permet de soulager la douleur dans des situations telles que :

- Hallux Valgus
- Pied étalé, pied plat (affaissement de la voûte)
- Métatarsalgie

Caractéristiques de performance :

Protection légère d'un membre ou d'un segment du corps pour les soins aigus et prophylactiques (préventifs).

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser ce dispositif si vous présentez les conditions suivantes : crise de goutte, maladies rhumatismales, hypersensibilité à la pression, arthrite des articulations de base, polyneuropathie ou tuméfaction des tissus mous.
- Ne pas utiliser ce dispositif en cas de maladies de peau ou de blessures dans la zone affectée du corps.
- Toute allergie connue aux matériaux des dispositifs médicaux.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

Le produit est destiné à un usage unique par patient.

Le produit doit être porté directement sur la peau.

Ne pas appliquer de lotions ou de pommades sur la partie concernée du corps lorsque vous portez le dispositif.

En cas de douleur, de gonflement, de modifications des perceptions sensorielles ou de toute autre réaction inhabituelle lors de l'utilisation du produit, consulter immédiatement un médecin.

Remarque : Contacter le fabricant et l'autorité compétente en cas d'incident grave résultant de l'utilisation de ce dispositif.

INFORMATIONS RELATIVES À LA MISE EN PLACE

L'orthèse de pied peut être portée sur le pied gauche ou droit et s'adapte à toutes les tailles de pied.

- 1) Détacher les sangles pour ouvrir l'orthèse.
 - 2) Placer le pied sur le coussinet et ajuster-le si nécessaire. S'assurer que le coussinet est placé dans la voûte plantaire pour soulever la base des os métatarsiens (les os de l'avant-pied). Le coussinet ne doit pas prolonger la ligne de la plante du pied et doit être confortable pendant la marche.
 - 3) Passer la sangle gauche sur le dessus du pied.
 - 4) À l'aide de votre main gauche, maintenir la sangle gauche en place et, avec votre main droite, tirer la sangle droite jusqu'à obtenir le maintien souhaité et fixer l'extrémité à la sangle gauche.
- Desserrer les sangles ou retirer immédiatement l'orthèse en cas de picotements, d'ecchymoses, d'inflammation ou d'engourdissement.

Remarque : L'orthèse s'adapte à des chaussures dotées d'une large ouverture sur l'avant du pied. Les chaussures devront également être suffisamment larges pour accueillir l'orthèse.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Lavable en machine avec un cycle délicat (max 30 ° C) avec un détergent doux. Le crochet et la boucle des sangles doivent être fermés pendant le lavage afin d'éviter tout dommage.



COMPOSITION

Polyamide, Polyuréthane, Nylon, Élasthane, Polyester, Mousse SBR



NON FABRIQUÉ AVEC DU LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL

GARANTIE DJO, LLC réparera ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires pour les défauts de matériaux ou de fabrication pendant une période de six mois à compter de la date de vente.
Dans la mesure où les termes de cette garantie sont incompatibles avec les réglementations locales, les dispositions de ces réglementations locales s'appliqueront.

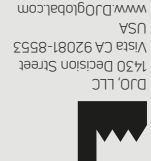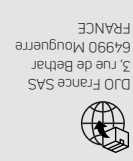

AIRCAST®
ActyToe™ Lift



AIRCAST®

