



AIRCAST®

FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

UTILISATION / INDICATIONS

- Épicondylite des joueurs de tennis ou de golf.

CONTRE-INDICATIONS

- Aucune

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

En cas de douleur, de gonflement, de changements au niveau des sensations ou autres réactions inhabituelles lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement votre médecin.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- 1) Enrouler le bandage autour du bras (logo Aircast tourné vers l'extérieur). Attacher la sangle sans serrer.
- 2) Ajuster le bandage de sorte que la cellule pneumatique soit centrée sur l'avant-bras, juste au dessous de l'articulation du coude.
- 3) La cellule pneumatique doit être placée sur le tendon ou le muscle douloureux pour assurer la compression.
- 4) Serrer la sangle fermement. Ne pas trop serrer cependant.

ENTRETIEN

Laver à la main à l'eau savonneuse tiède et rincer soigneusement. **SÉCHER À L'AIR LIBRE.**

Remarque: Si le produit est mal rincé, les résidus de savon peuvent causer des irritations et endommager le matériau.



SANS LATEX

RÉSERVÉ À UN USAGE SUR UN SEUL PATIENT

GARANTIE DJO, LLC répara ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat.

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.