

## FRANÇAIS

**VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.**

### PROFIL DE L'UTILISATEUR

L'utilisateur visé doit être un professionnel de la santé agréé, le patient, le soignant du patient ou un membre de la famille apportant une assistance.

L'utilisateur doit être capable de lire, de comprendre et être physiquement capable d'exécuter toutes les instructions, mises en garde et précautions fournies dans les consignes d'utilisation.

### UTILISATION/INDICATIONS

- Aide à prévenir et à atténuer la pression sur l'avant du pied.
- Soutient la voûte plantaire transversale, absorbe les chocs et améliore le confort.

Caractéristiques de performance : Protection légère d'un membre ou d'un segment du corps pour les soins aigus et prophylactiques (préventifs).

### CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser ce dispositif si vous présentez les conditions suivantes : crise de goutte, maladies rhumatismales, hypersensibilité à la pression, arthrite des articulations de base, polyneuropathie ou tuméfaction des tissus mous.
- Ne pas utiliser ce dispositif en cas de maladies de peau ou de blessures dans la zone affectée du corps.
- Toute allergie connue aux matériaux des dispositifs médicaux.

### MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

Le produit est destiné à un usage unique par patient.

Le produit doit être porté directement sur la peau.

Ne pas appliquer de lotions ou de pommades sur la partie concernée du corps lorsque vous portez le dispositif.

En cas de douleur, de gonflement, de modifications des perceptions sensorielles ou de toute autre réaction inhabituelle lors de l'utilisation du produit, consulter immédiatement un médecin.

Remarque : Contacter le fabricant et l'autorité compétente en cas d'incident grave résultant de l'utilisation de ce dispositif.

### INFORMATIONS RELATIVES À LA MISE EN PLACE

À apposer sur une peau propre et sèche.

Fixer le coussin au deuxième ou au troisième orteil avec l'anneau.

La lettre L (gauche) ou R (droit) permet de distinguer le pied correspondant.

### INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Laver à la main dans de l'eau tiède avec un détergent doux.

Ne pas utiliser de Javel. Rincer soigneusement. Sécher à l'air libre. Ne pas placer au séchoir. Ne pas laver à sec. Ne pas frotter.

Talquer si nécessaire.

### COMPOSITION

SEBS (styrène-éthylène-butylène-styrène), poudre de talc, arôme naturel de menthe




**NON FABRIQUÉ AVEC DU LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL**

**GARANTIE** DJO, LLC réparera ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires pour les défauts de matériaux ou de fabrication pendant une période de six mois à compter de la date de vente.

Dans la mesure où les termes de cette garantie sont incompatibles avec les réglementations locales, les dispositions de ces réglementations locales s'appliqueront.

DJO, LLC  
1430 Decision Street  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover  
Germany  
www.DJOglobal.com  
USA  
Vista CA 92081-8553  
DJO France SAS  
3, rue de Bethar  
64990 Mouguerre  
FRANCE

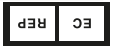

# AIRCAST®

## SofToes™

### FOREFOOT PAD WITH RING



# AIRCAST®

