



## FRANÇAIS

**VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.**

### PROFIL DE L'UTILISATEUR

L'utilisateur visé doit être un professionnel de la santé agréé, le patient, le soignant du patient ou un membre de la famille apportant une assistance.

L'utilisateur doit être capable de lire, de comprendre et être physiquement capable d'exécuter toutes les instructions, mises en garde et précautions fournies dans les consignes d'utilisation.

### UTILISATION/INDICATIONS

- Sépare le gros orteil et le deuxième en cas d'orteils déplacés, trop rapprochés ou qui se chevauchent.
- Aide à prévenir la douleur liée à la pression ou aux frottements, à l'irritation de la peau et aux cors entre le gros orteil et le deuxième.
- Aide à limiter la déviation du gros orteil (hallux valgus) en améliorant sa position.
- Le coussin protecteur soulage la douleur et la pression en cas d'inconfort dans la région de la base de l'orteil.

Caractéristiques de performance : Protection légère d'un membre ou d'un segment du corps pour les soins aigus et prophylactiques (préventifs).

### CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser ce dispositif si vous présentez les conditions suivantes : crise de goutte, maladies rhumatismales, hypersensibilité à la pression, arthrite des articulations de base, polyneuropathie ou tuméfaction des tissus mous.
- Ne pas utiliser ce dispositif en cas de maladies de peau ou de blessures dans la zone affectée du corps.
- Toute allergie connue aux matériaux des dispositifs médicaux.

### MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

Le produit est destiné à un usage unique par patient.

Le produit doit être porté directement sur la peau.

Ne pas appliquer de lotions ou de pommades sur la partie concernée du corps lorsque vous portez le dispositif.

En cas de douleur, de gonflement, de modifications des perceptions sensorielles ou de toute autre réaction inhabituelle lors de l'utilisation du produit, consulter immédiatement un médecin.

Remarque : Contacter le fabricant et l'autorité compétente en cas d'incident grave résultant de l'utilisation de ce dispositif.

### INFORMATIONS RELATIVES À LA MISE EN PLACE

À apposer sur une peau propre et sèche.

Placer l'écarteur entre le gros orteil et le deuxième.

Glisser le gros orteil dans l'anneau.

Le coussin protecteur doit être placé sur l'onglon.

### INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Laver à la main dans de l'eau tiède avec un détergent doux.

Ne pas utiliser de Javel. Rincer soigneusement. Sécher à l'air libre. Ne pas placer au séchoir. Ne pas laver à sec. Ne pas frotter.

Talquer si nécessaire.

### COMPOSITION

SEBS (styrène-éthylène-butylène-styrène), poudre de talc, arôme naturel de menthe



**NON FABRIQUÉ AVEC DU LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL**

**GARANTIE** DJO, LLC réparera ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires pour les défauts de matériaux ou de fabrication pendant une période de six mois à compter de la date de vente.

Dans la mesure où les termes de cette garantie sont incompatibles avec les réglementations locales, les dispositions de ces réglementations locales s'appliqueront.

www.DJOGlobal.com  
USA  
FRANCE  
64990 Mouguerre  
3, rue de Béthar  
DJO France SAS

DJO, LLC  
1430 Decision Street  
Visita CA 92081-8553  
USA

MDS5 GmbH  
Schiffgraben 41  
30175 Hannover  
Germany



**AIRCAS<sup>®</sup>**

SofToes<sup>™</sup>

**BUNION PROTECTOR**



**AIRCAS<sup>®</sup>**

**DJO<sup>®</sup>**