

### 1. IDENTIFICATION DU DISPOSITIF

#### a. DÉNOMINATIONS

ALGOSTÉRIL compresses 10x20 cm, 10x10 cm, 5x5 cm  
ALGOSTÉRIL mèche plate 40 cm  
ALGOSTÉRIL mèche ronde 30 cm

#### b. COMPOSITION

Fibres d'alginate de calcium (origine végétale) sous forme non tissée

#### c. FORMES ET PRÉSENTATIONS

Compresses (10x20 cm, 10x10 cm, 5x5 cm)  
Mèche plate (40 cm) ; mèche ronde (30 cm)  
Conditionnement en sachet individuel

#### d. PROPRIÉTÉS

ALGOSTÉRIL est un cicatrisant hémostatique qui diminue le risque infectieux.

### 2. INDICATIONS

#### CICATRISATION

- Plaies chirurgicales et traumatiques
- Plaies profondes/cavitaires
- Plaies chroniques
- Brûlures superficielles et profondes
- Plaies infectées et à haut risque infectieux

#### HÉMOSTASE

- Plaies hémorragiques
- Hémostase des points de ponction
- Suintements hémorragiques en nappe per- et post-opératoires
- Épistaxis et saignements après chirurgie rhino-sinusienne (mèches uniquement)

ALGOSTÉRIL est efficace chez les patients présentant des troubles de l'hémostase congénitaux ou acquis (sous antiagrégants plaquettaire, anti-vitamines K ou héparine).

ALGOSTÉRIL peut être utilisé en interface aux systèmes TPN (Traitement par Pression Négative)

### 3. CONTRE-INDICATIONS

Aucune connue à ce jour.

### 4. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En cas d'humidification d'ALGOSTÉRIL, utiliser uniquement une solution de NaCl à 0,9 % : les ions Na<sup>+</sup> de la solution NaCl s'échangent avec les ions Ca<sup>2+</sup> d'ALGOSTÉRIL ce qui permet la gélification et le retrait indolore d'ALGOSTÉRIL. Vérifier l'intégrité du sachet avant l'utilisation du produit.

Renouveler ALGOSTÉRIL au maximum toutes les 48 heures.

En cas d'utilisation d'ALGOSTÉRIL en interface aux systèmes TPN, respecter la notice d'utilisation du fabricant du dispositif TPN.

### 5. MISES EN GARDE

Toujours utiliser ALGOSTÉRIL compresse/mèche dans son intégralité.

ALGOSTÉRIL doit être retiré avant la fermeture du site chirurgical.

Méchage endonasal : ALGOSTÉRIL mèche doit être retirée à 48 heures après la pose.

Dans l'état actuel des connaissances, ALGOSTÉRIL ne doit pas être mis en contact avec le cœur et le cerveau et doit être retiré lors des séances de radiothérapie.

Usage unique. Ne pas réutiliser en raison d'un risque de contamination microbienne et de perte de performance.

### 6. MODE D'UTILISATION

#### CICATRISATION

- Nettoyer la plaie (cf. interactions).
- Appliquer ALGOSTÉRIL compresse/mèche.
  - > En cas de plaie moyennement exsudative, ou de picotement, humecter ALGOSTÉRIL compresse/mèche uniquement avec une solution de NaCl à 0,9 % :  
10 ml / compresse 10x10 cm  
20 ml / compresse 10x20 cm, mèche ronde, mèche plate.
  - > En cas de méchage :
    - introduire ALGOSTÉRIL mèche dans la cavité sans la tasser,
    - pour les cavités à orifice étroit : humidifier ALGOSTÉRIL mèche uniquement avec une solution de NaCl à 0,9 % puis la tasser avant son introduction dans la cavité. Laisser dépasser au minimum 2 à 3 cm de l'orifice.
- Recouvrir ALGOSTÉRIL compresse/mèche d'un pansement secondaire.
- Retirer ALGOSTÉRIL au maximum 48 heures après la pose.
  - Pour un retrait indolore, humidifier ALGOSTÉRIL uniquement avec une solution de NaCl à 0,9 %.
- Renouveler ALGOSTÉRIL compresse/mèche selon le type de plaie :

Type de plaie	Fréquence de renouvellement
Infectée	2 fois par jour jusqu'à disparition des signes locaux d'infection
Exsudative ou fibrineuse	1 fois par jour
Propre	Tous les 2 jours

La prise en charge de la plaie avec ALGOSTÉRIL compresse/mèche peut être poursuivie au-delà de 3 mois.

ALGOSTÉRIL peut être utilisé en contact avec l'os.

ALGOSTÉRIL peut rester en place sur la plaie lors des séances en caisson hyperbare.

ALGOSTÉRIL peut être utilisé avec la bétaméthasone.

Les éventuelles fibres gélifiées, restantes après le retrait d'ALGOSTÉRIL, se dégraderont lors du nettoyage de la plaie.

### INTERFACE DES SYSTEMES TPN

#### - Application :

- Tapisser la totalité de la surface de la plaie avec ALGOSTÉRIL
- Mettre en place le système TPN selon les recommandations du fabricant

#### - Retrait : à 48 heures maximum

- Retirer le système TPN selon les instructions du fabricant
- Retirer ALGOSTÉRIL 48 heures maximum après la pose

### HÉMOSTASE

Appliquer ALGOSTÉRIL sec ou humidifié uniquement avec une solution de NaCl à 0,9 %.

Maintenir ALGOSTÉRIL en place jusqu'à l'arrêt du saignement - au minimum 5 minutes (si ALGOSTÉRIL est rapidement gorgé de sang, un renouvellement peut être nécessaire).

Lors de l'hémostase per opératoire : retirer ALGOSTÉRIL avant de fermer le site chirurgical.

### MÉCHAGE ENDONASAL

Juste avant son application, humidifier ALGOSTÉRIL mèche uniquement avec une solution de NaCl à 0,9 % et l'essorer.

Introduire la mèche le long du plancher nasal jusqu'à la choane. Tasser la mèche en accordéon.

En cas d'éthmoïdectomie, mécher uniquement les deux tiers inférieurs de la fosse nasale.

Bloquer l'extrémité sortante de la mèche dans le vestibule nasal pour éviter toute possibilité de migration.

Démêcher ALGOSTÉRIL mèche 48 heures après la pose en prenant soin de saisir la totalité de l'extrémité de la mèche (pour un retrait d'un seul tenant).

ALGOSTÉRIL peut être utilisé avec la lidocaïne-naphazoline et une solution de NaCl à 2,3 %.

### INTERACTIONS

ALGOSTÉRIL ne doit pas être utilisé avec les solutions alcalines, telles les solutions d'hypochlorite de sodium, ou contenant de la chlorhexidine, du chlorure de benzalkonium ou des sels de cuivre.

Si de tels produits sont utilisés sur la plaie, rincer abondamment avec uniquement une solution de NaCl à 0,9 % avant d'appliquer ALGOSTÉRIL.

### STÉRILISATION

STERILE R

Produit stérile, stérilisé par rayonnement  $\beta$ .

Ne pas re-stériliser.

### CONSERVATION

Conserver dans un endroit sec à une température inférieure à 30°C et à l'abri de la lumière. Respecter la date limite d'utilisation.

### 0. REMBOURSEMENT

ALGOSTÉRIL est remboursé sous nom de marque avec un prix limite de vente. Sa prescription n'est pas substituable.

Formes	Présentations	Nombre d'unités par boîte	Code ACL
ALGOSTÉRIL compresses	10x20 cm	16	3401077999407
	10x10 cm	16	3401077999575
	5x5 cm	10	3401073757087
ALGOSTÉRIL mèche plate	40 cm	16	3401096413151
ALGOSTÉRIL mèche ronde*	30 cm	16	3401096413090

\* non remboursée.

### 1. FABRICANT ET TITULAIRE DU MARQUAGE CE

Les Laboratoires BROTHIER

41, rue de Neuilly, 92735 NANTERRE cedex, France  
www.brothier.com



DM, Classe III  
Obtention en 1999

0 800 355 153

Service & appel gratuits

Produit en France par les Laboratoires Brothier.

LABORATOIRES  
BROTHIER