


INSTRUBAC 2L ou 10L

Protocole de traitement de l'Instrubac

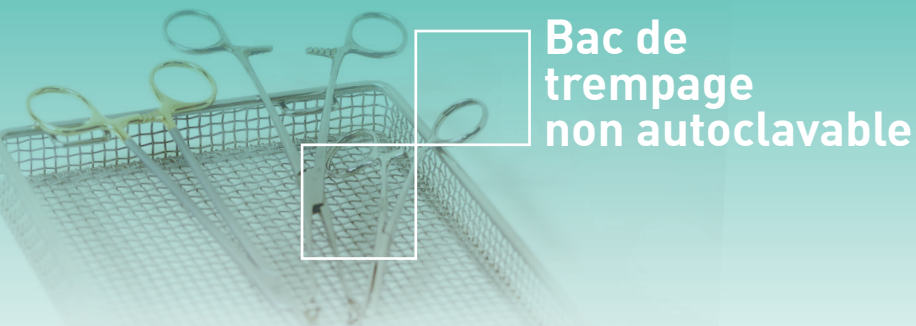

Bac de trempage non autoclavable



NETTOYAGE

Les Instrubacs 2L et 10L sont conçus pour être **lavés manuellement** avec un détergent/désinfectant. Se reporter au protocole interne de l'établissement.

STOCKAGE

Les bacs non traités doivent être stockés dans leur emballage d'origine. Un second emballage est conseillé, par exemple, une boîte cartonnée. Les bacs doivent être **stockés dans un endroit sec** (minimum supérieur à 4°C) **sans contact direct** avec le sol.

RÉFÉRENCES

- ② Instrubac 2L sans fente.....Réf. 404 039
- ③ Instrubac 10L sans fente.....Réf. 404 002NM



RECOMMANDATIONS :

- Les bacs ne sont pas autoclavables. Ils ne sont pas conçus pour un nettoyage en laveuse automatique.
- Une inspection visuelle est nécessaire pour évaluer l'usure du bac dû à son utilisation. S'il est endommagé, ne pas utiliser le bac et le signaler.