



Argicalm

fr Pack Chaud Froid - Coussin d'argile réutilisable..... 6

Instructions d'utilisation


1

19 x 11 cm




2

26 x 13 cm

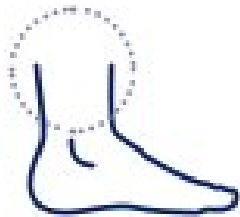


3


30 x 20 cm

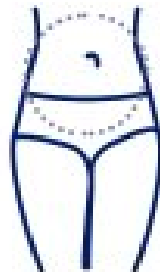


4

43 x 17 cm

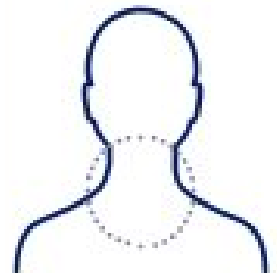


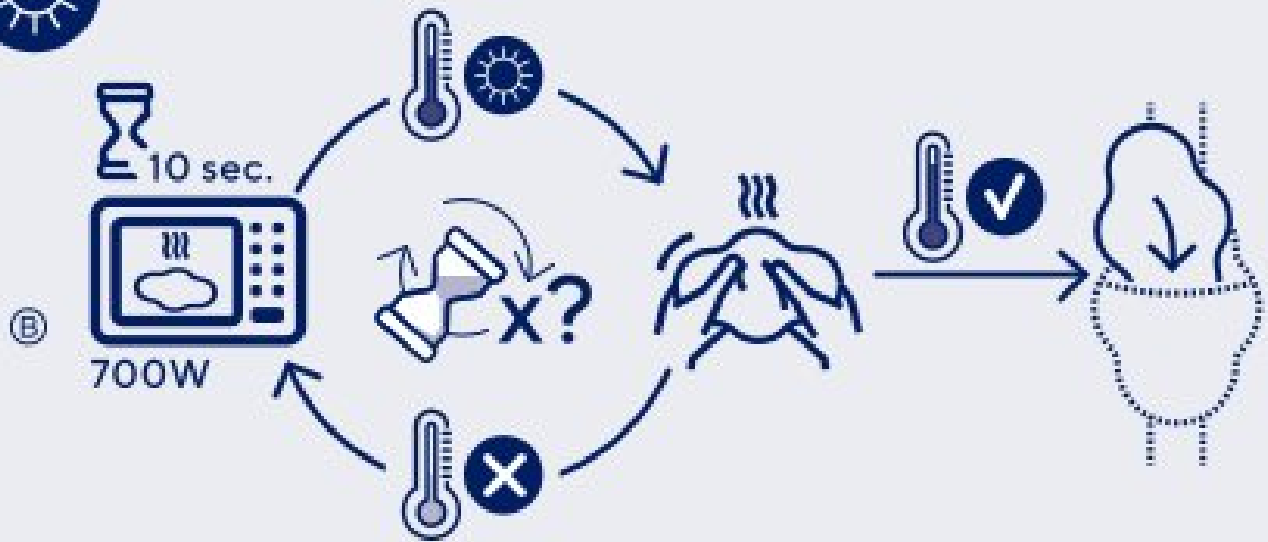

Taille*	1	2	3	4
	x 7	x 8	x 8	x 11

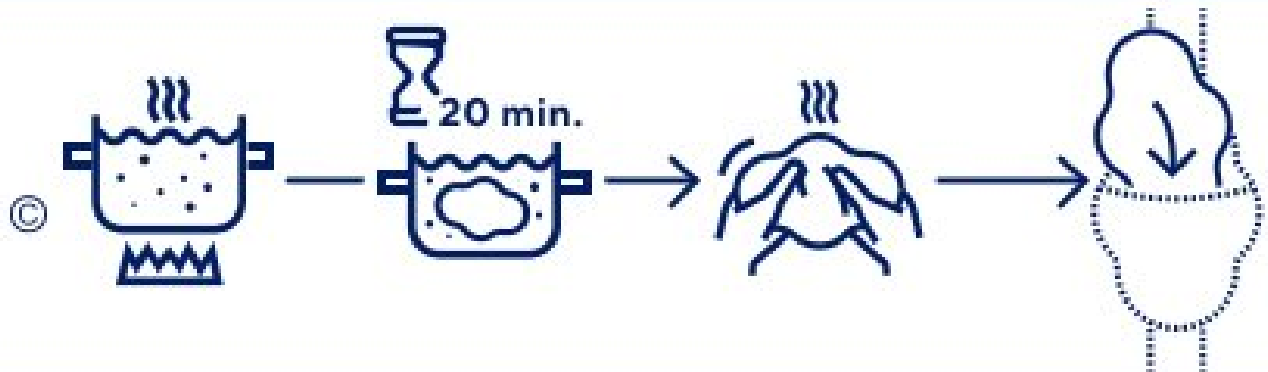

* Size - Größe - Maat - Taglia - Talla - Tamanho - Størrelse - Koko - Storlek - Μέγεθος - Velikost - Rozmiar - Izmērs - Dydis - Suurus - Velikost' - Velkost' - Méret - Размер - Mărime - Размер - Veličina - 尺碼 - المقياس

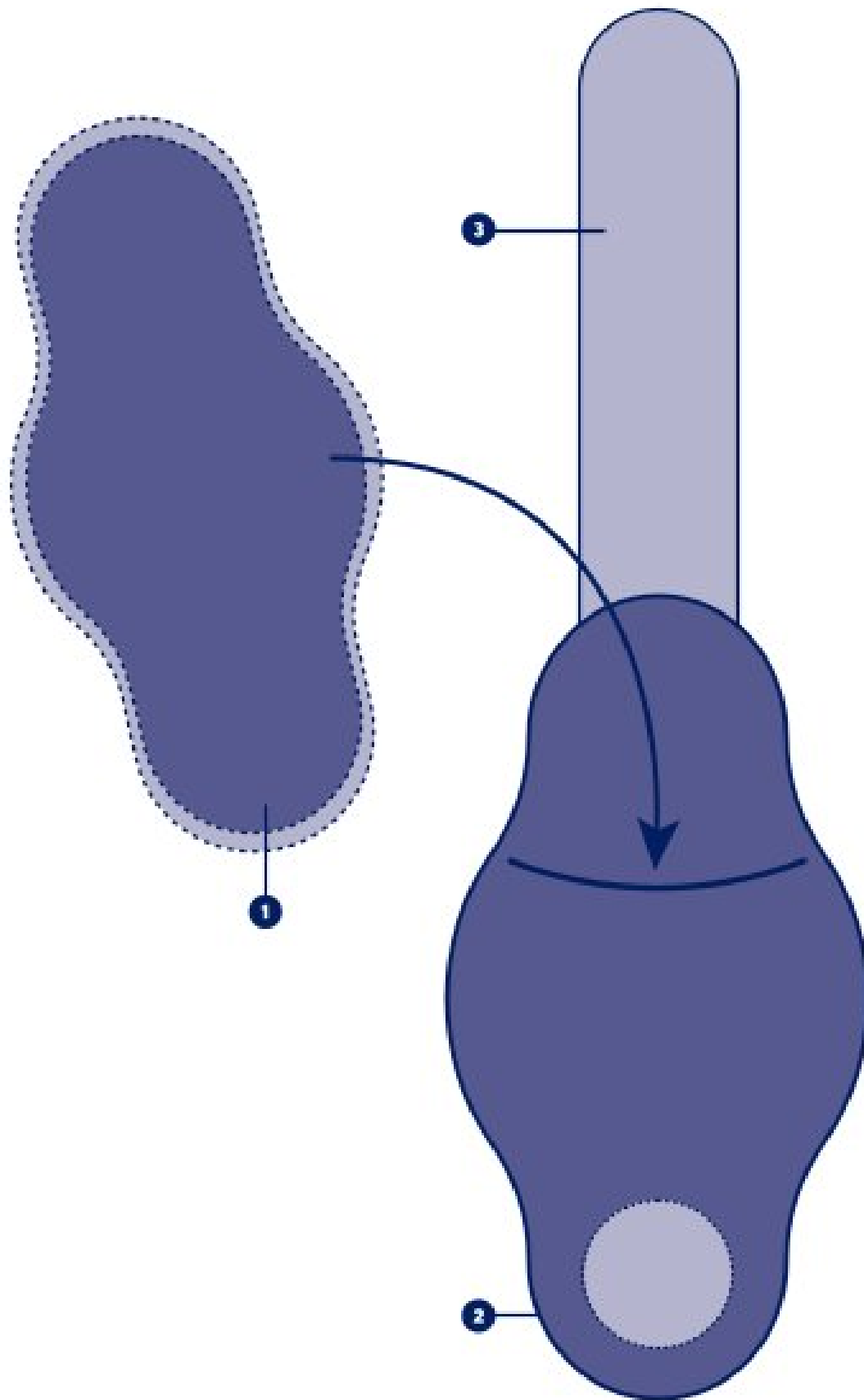

MD



fr

PACK CHAUD FROID - COUSSIN D'ARGILE RÉUTILISABLE

Description/Destination

Coussin d'argile réutilisable. ❶

Housse amovible de protection et de confort.

Effet velours. ❷

Sangle d'attache auto-agrippante, élastique et réglable. ❸

Le dispositif est destiné uniquement au traitement des indications listées chez l'adulte, l'adolescent et l'enfant.

Composition

Coton - élasthanne - polyester - argile - PVC

Propriétés/Mode d'action

Utilisation à froid :

Soulagement de la douleur, réduction de l'inflammation, réduction des hématomes et des œdèmes.

Utilisation à chaud :

Soulagement de la douleur, augmentation de la circulation sanguine, relaxation.

Indications

Utilisation à froid :

Entorses, claquages, tendinites, migraines, douleurs oculaires, mal de dents, hématomes, arthrite, chirurgie maxillo-faciale et chirurgie des yeux.

Utilisation à chaud :

Mal de dos, contractures/raideurs musculaires et articulaires, crampes, torticolis, douleurs abdominales.

Contre-indications

Ne pas placer le produit directement en contact avec une peau lésée.

Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à l'un des composants.

En cas de diabète ou de problèmes vasculaires et circulatoires, consulter un professionnel de santé avant d'utiliser ce produit.

Ne pas utiliser le mode froid en cas d'hypersensibilité au froid.

Ne pas utiliser avec des produits analgésiques et/ou anesthésiques (tels que crèmes, baumes, lotions, liniments...).

Précautions

En cas d'inconfort, de gêne importante, de douleur, de sensations anormales, retirer le dispositif et consulter un professionnel de santé.

Surveiller l'utilisation du produit chez les enfants ou chez les personnes souffrant de troubles cognitifs.

Vérifier l'intégrité du dispositif avant chaque utilisation.

Ne pas utiliser le dispositif s'il est endommagé.

Ne pas appliquer directement sur la peau, utiliser la housse fournie.

Usage externe uniquement, ne pas ingérer.

En cas de contact accidentel avec l'argile, rincer abondamment, boire de l'eau en cas d'ingestion.

Ne pas chauffer le coussin Argicalm au micro-ondes ou au bain-marie si ce dernier n'est pas déjà à température ambiante.

Ne pas chauffer les coussins d'argile Argicalm au-delà des temps et des puissances associées indiqués dans la présente notice, le coussin d'argile pourrait être endommagé voire détruit.

Si la puissance du micro-ondes est inconnue, utiliser la plus basse puissance.

Attention à ne pas se brûler lors de la manipulation à mains nues du coussin Argicalm dans l'eau chaude ou au four à micro-ondes.

Si le coussin Argicalm est trop chaud, attendre qu'il refroidisse avant de l'utiliser dans sa housse.

Toujours vérifier la température du coussin avant toute application, une utilisation prolongée au-delà des indications fournies peut entraîner des blessures, notamment des brûlures.

Ne pas placer de charge lourde, s'asseoir ou s'allonger sur le coussin Argicalm.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur le coussin d'argile.

Effets secondaires indésirables

Ce dispositif peut entraîner des réactions cutanées (rougeurs, démangeaisons, brûlures, cloques...) voire des plaies de sévérités variables.

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État Membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Mode d'emploi/Mise en place

Utilisation à froid :

Instructions ☺:

Retirer le coussin Argicalm de son emballage. Le placer à plat au congélateur (-20°C) pendant au moins 2 heures avant utilisation. Pour plus de confort, malaxer le coussin Argicalm pour l'assouplir avant de l'insérer dans la housse fournie.

Si le coussin Argicalm est trop froid ou trop solide, le laisser quelques minutes à température ambiante avant de l'utiliser.

Pour éviter tout risque de brûlure, ne pas appliquer pendant plus de 20 mn et attendre 20 mn avant toute nouvelle application.

Utilisation à chaud :

Instructions pour une utilisation au micro-ondes ☹ :

- Retirer le coussin Argicalm de son emballage.
- Le placer à plat à température ambiante au micro-ondes et suivre le protocole de chauffe.
- Malaxer pour répartir la chaleur uniformément avant de l'insérer dans la housse fournie.

Instructions pour une utilisation au bain-marie ☺ :

- Faire chauffer de l'eau jusqu'à ébullition.
- S'assurer d'un volume suffisant pour que le coussin soit entièrement immergé.
- Éteindre la source de chaleur.
- Retirer le coussin Argicalm de son emballage.
- Ajouter le coussin Argicalm à température ambiante dans l'eau chaude pour une durée de 5 à 20 minutes maximum jusqu'à ce qu'il atteigne la température désirée.

Entretien

Lavable à la main avec un détergent doux. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas mettre en contact avec un solvant ou de l'alcool. Sécher loin d'une source directe de chaleur (radiateur, soleil...).

Stockage

Stocker à température ambiante, de préférence dans l'emballage d'origine.

Du fait de l'origine naturelle de l'argile contenue dans Argicalm, il est possible que l'aspect du coussin d'argile évolue au cours de la vie du produit (points ou marbrures colorées).

Ce changement de couleur n'a aucun impact sur la fonctionnalité et la performance des coussins d'argile Argicalm.

Élimination

Éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur.

Premier marquage CE : 2017

Conserver cette notice.

www.thuasne.com

www.thuasne.com/global-contact



UK Responsible Person (UKRP):
THUASNE UK Ltd
Unit 4 Orchard Business Centre
North Farm Road
Tunbridge Wells, TN2 3XF,
United Kingdom



©Thuasne - 2053201 (2024-05)



Réserve pour labels certif. papier



À CHANGER avant envoi de l'EN, cf BDC



avec ou sans imprim'vert en fonction du lieu d'impression

Thuasne SAS - SIREN/RCS Nanterre 542 091 186
capital 1 950 000 euros
120, rue Marius AUFAN 92300 Levallois-Perret (France)