



Web : [www.ASPIVENIN.com](http://www.ASPIVENIN.com) - EMail : [aspivenin@domespharma.com](mailto:aspivenin@domespharma.com)

DÔMES PHARMA - 3 rue André Citroën - 63430 Pont-du-Château - France

Tél. +33 (0)4 63 66 33 90 - Fax +33 (0)1 75 43 96 12

**FR Le kit de premier secours anti-venin**

Cet appareil est un dispositif médical **MD**

La mini-pompe ASPIVENIN® permet de soulager la douleur occasionnée par les piqûres ou les morsures d'animaux venimeux. C'est un dispositif médical de premier secours qui ne se substitue pas à la consultation d'un médecin indispensable dans les cas graves. ASPIVENIN® est destiné à être utilisé sur toute personne, quel que soit son âge (adulte, enfant, personne âgée), souffrant de morsures ou piqûres d'insectes (moustique, abeille, guêpe), et autres animaux venimeux (araignées, scorpion, vives, poisson pierre). ASPIVENIN® peut être utilisé avec ou sans l'aide d'un tiers. **PRINCIPE** : ASPIVENIN® aspire sans douleur le venin par vide instantané et permanent 10 fois supérieure à la succion buccale. **CONSEIL D'UTILISATION** : Pour garantir sa bonne utilisation, nous vous conseillons de manipuler votre ASPIVENIN® avant d'en avoir l'utilité en consultant le mode d'emploi. Pour une efficacité optimale, il est recommandé de l'utiliser dans les 3 minutes qui suivent la piqûre/morsure. En fonction de l'animal venimeux, le temps d'aspiration suggéré est le suivant: voir tableau 2. **CONTRE-INDICATIONS** : Ne pas utiliser ASPIVENIN® sur les paupières, muqueuses, parties génitales et conduit auditif. **ATTENTION** : ASPIVENIN® ne se substitue pas ou ne doit pas retarder à la consultation obligatoire et immédiate d'un médecin qui reste indispensable en cas de piqûre de scorpion, morsure de serpent ou de tout autre animal en cas de réaction importante. ASPIVENIN® possède des éléments amovibles (ventouses) qui ne doivent pas être avalées. Conserver ce dispositif hors de la portée et de la vue des enfants. ASPIVENIN® craint les chutes et les chocs, ne pas le laisser tomber. En cas de réaction allergique, ASPIVENIN® ne prévient pas l'apparition d'œdème de Quincke. **NETTOYAGE, STOCKAGE et ELIMINATION** : Seules les ventouses se lavent à l'eau savonneuse. Conserver la pompe à l'abri de l'humidité. ASPIVENIN® doit être stocké dans sa boîte, dans un endroit sec et à température ambiante. ASPIVENIN® peut être utilisé de nombreuses fois si les conditions d'utilisation, nettoyage et stockage décrites dans cette notice d'utilisation sont respectées. Jeter le dispositif et son emballage conformément à la réglementation locale ou nationale. Tout incident grave en lien avec ASPIVENIN® doit être signalé à DÔMES PHARMA ([aspivenin@domespharma.com](mailto:aspivenin@domespharma.com)) et à l'autorité compétente de l'État Membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Fabriqué en France Première apposition du marquage : 2015

**MODE D'EMPLOI - TABLEAU 1**  
DIRECTIONS FOR USE - Table 1



Sélectionnez la ventouse la mieux adaptée à la taille et à la localisation de la piqûre ou morsure. Fixez-la à l'extrémité de la pompe. Tirez le piston à fond (à moitié pour un enfant).

Appliquez la ventouse sur la peau.

Poussez le piston à fond. Temps d'aspiration : voir Tableau 2

Retirez ASPIVENIN® en soulevant le piston. Nettoyez la piqûre/ morsure avec un antiseptique. Reprenez au n°2 si la douleur n'a pas disparu.

**TEMPS D'ASPIRATION SUGGÉRÉ - TABLEAU 2**  
SUGGESTED SUCTION TIME - TABLE 2

20-30 sec

1-2 min

1-3 min

2-3 min



Moustique, mouche...

Araignée, scorpion

Guêpe, abeille, frelon...

Vive, poisson pierre...