

CICATRISATION
DES PLAIES SUPERFICIELLES

La peau est le plus grand organe du corps humain. Elle nous protège tous les jours des agressions extérieures. L'altération de cette couche protectrice expose l'organisme aux infections et aux inflammations. Même si, dans la plupart des cas, la peau peut se réparer elle-même, un soin correct des plaies est essentiel pour éviter les complications et/ou les cicatrices.

Le soin des plaies

Face à une plaie superficielle, le corps réagit en formant une croûte le plus rapidement possible. La croûte recouvre la partie endommagée de la peau et restaure temporairement la barrière cutanée qui protège des micro-organismes extérieurs, le temps qu'une nouvelle couche de peau se forme. Une fois cette dernière formée, la croûte est éliminée. La survenue d'une croûte présente deux conséquences : la durée totale de cicatrisation est allongée et elle expose aux risques d'une future cicatrice visible.

Un milieu humide optimal au niveau de la plaie prévient la survenue de croûtes, accélère la cicatrisation et prévient la survenue de cicatrices visibles.

C'est pourquoi, en plus de sa désinfection, il est recommandé de préserver l'humidité de la plaie durant le processus de cicatrisation.

Les hydrogels "intelligents" comme BISEPTINECICA® sont utilisés pour les raisons suivantes : ils évitent le dessèchement de la plaie et peuvent aussi absorber l'excès d'humidité à son niveau. Ce milieu humide optimal empêche la formation de croûtes et de fissures cutanées, permettant ainsi une récupération optimale de la peau et évitant la formation de futures lésions cicatricielles.

Mécanisme d'action

BISEPTINECICA® est un hydrogel "intelligent" qui recouvre la plaie (effet occlusif) et constitue un milieu humide tout en absorbant facilement les exsudats. Il crée un environnement acide (faible pH) qui réduit le risque de prolifération microbienne au niveau de la plaie.

La barrière occlusive créée par BISEPTINECICA® stoppe l'évaporation et réduit les pertes de fluides à travers l'épiderme, ce qui garantit une hydratation optimale pendant le processus de cicatrisation. Les plaies cicatrisent mieux lorsqu'elles sont maintenues dans un milieu humide.

BISEPTINECICA® favorise donc la cicatrisation en agissant sur le micro-environnement de la plaie.

BISEPTINECICA® a également un effet apaisant et froid grâce aux excipients contenus dans sa formule.

BISEPTINECICA® est un gel cicatrisant 4-en-1 sans paraben, à l'efficacité prouvée.

- Accélère la cicatrisation
- Forme une barrière protectrice. Aide à prévenir les infections
- Diminue le risque de formation de cicatrices
- Soulage immédiatement grâce à son effet froid. Ne pique pas

Indications

Plaies superficielles telles que les coupures, éraflures, égratignures, coups de soleil, brûlures, gerçures & crevasses

Composition

BISEPTINECICA® est un hydrogel « intelligent » qui régule le degré d'humidité au niveau de la plaie.

Ingrédients : carbomère colloïdal acide, carnosine, eau, benzoate de sodium, sorbate de potassium

biseptine Cica[®]

Conseils d'utilisation

Se laver soigneusement les mains avant et après le traitement de la plaie.

Petites plaies

- Nettoyez et désinfectez la plaie.
- Si nécessaire, séchez soigneusement avec une compresse stérile.
- Appliquez une fine couche de BISEPTINECICA[®] sur la plaie sans la toucher avec le tube. Ne pas faire pénétrer le gel totalement. Renouveler l'application si besoin.
- Si nécessaire, appliquez une bande ou un pansement. Utilisez une nouvelle bande ou un nouveau pansement à chaque fois.

Coups de soleil

- Nettoyez la zone à traiter.
- Appliquez une fine couche de BISEPTINECICA[®] sur la surface à traiter sans la toucher avec le tube. Ne pas faire pénétrer le gel totalement. Renouveler l'application si besoin.
- Si nécessaire, appliquez une bande ou un pansement. Utilisez une nouvelle bande ou un nouveau pansement à chaque fois.

Brûlures superficielles

- Passez la plaie sous l'eau froide le plus rapidement possible car l'effet bénéfique est réduit après 30 minutes. Pour éviter un refroidissement excessif, ne pas utiliser de l'eau trop froide.
- Appliquez une fine couche de BISEPTINECICA[®] sur la surface à traiter, sans la toucher avec le tube. Ne pas faire pénétrer le gel totalement. Renouveler l'application si besoin.
- Appliquez une bande ou un pansement.
- Utilisez une nouvelle bande ou un nouveau pansement à chaque fois.

Précautions ⚠

Ne pas utiliser le produit en cas d'hypersensibilité ou d'allergie à l'un de ses composants. Dans de très rares cas, une irritation cutanée a été rapportée. En cas d'irritation ou de réaction allergique, arrêter immédiatement le traitement.

BISEPTINECICA[®] ne convient pas aux plaies superficielles étendues (de plus de 20 cm²).

BISEPTINECICA[®] peut être utilisé sur des brûlures superficielles, c'est-à-dire des brûlures touchant l'épiderme et/ou le derme. Elles se manifestent généralement par un œdème (gonflement), une rougeur de la peau et des vésicules (cloques).

Ne pas utiliser BISEPTINECICA[®] sur le visage, les yeux, les paupières ou les muqueuses.

Toujours consulter un médecin dans les cas suivants :

- plaies étendues ou très profondes
- plaies infectées
- cicatrisation lente ou risques de complications

Dans ces situations, BISEPTINECICA[®] peut également être utile mais ne saurait en aucun cas suffire comme seul traitement.


Réservé à l'usage externe.

Ne pas utiliser le produit après la date de péremption (voir l'emballage).

Conditions de conservation

Conserver le produit à une température comprise entre 5 et 25 °C. Tenir hors de la portée des enfants.


La dernière date à laquelle cette notice a été mise à jour est mars 2019

 Fabricant :
Oystershell NV - Nijverheidsweg 10
9820 Merelbeke - BELGIQUE

Distributeur :
Bayer HealthCare, 33 rue de l'Industrie,
74240 Gaillard, France. (Siège social :
Bayer HealthCare, 59120 Loos, France)



Consulter la
notice
d'utilisation

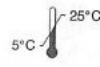

50g

Bayer

1574/620152/19C/07020574/1