


BONYPLUS® Cavifix™

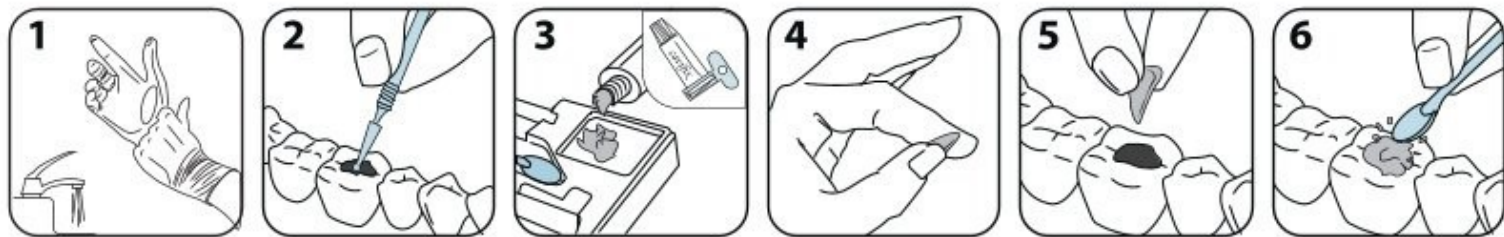

FR

Cavifix™ est un produit obstruant prêt à l'emploi à base de résine synthétique, testé cliniquement. Il s'agit d'une solution temporaire conçue pour sceller les nouvelles cavités ou remplacer les plombages perdus. Cavifix™ ne peut être utilisé à long terme, mais en cas d'urgence, pour remplacer ou réparer un plombage perdu. Cavifix™ est suffisamment solide, mais peut être facilement retiré. Le produit est sûr et n'irrite pas vos gencives. Cavifix™ contient les mêmes ingrédients utilisés par les dentistes.

Utilisation conseillée: 1 application dure jusqu'à 4 semaines.

Avertissement: Lire attentivement les instructions ci-jointes avant de commencer à utiliser le produit. Évitez l'application de Cavifix™ en cas d'enflures, de rougeurs ou de douleurs dans la zone affectée. Dans ces cas, consultez immédiatement votre dentiste. Ne pas utiliser sur une plaie ouverte. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas ingérer le produit. Conserver dans un endroit frais et sec (5–25°C). Replacer fermement le bouchon après chaque utilisation. Ne pas utiliser en cas d'allergie ou d'hypersensibilité connue à l'un des ingrédients.

Contenu de l'emballage: 1 tube de Cavifix™ 7g, 1 clef, 1 spatule, 1 microbrosse, 1 gant, 1 mode d'emploi.

Mode d'emploi:

Cavifix™ durcit seulement lorsqu'il entre en contact avec de l'eau ou de la salive. La prise s'effectue au bout de 30–45 minutes environ. Pour assurer les meilleurs résultats, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation.

1. Lavez vos mains et séchez-les soigneusement. Enfilez les gants afin d'assurer une application hygiénique du produit. Voir figure 1.
2. Nettoyez la dent creuse à l'aide de la microbrosse fournie et rincez la zone à l'eau tiède. Voir figure 2.
3. Pressez une petite quantité de Cavifix™ sur la surface du porte-inlay en plastique à l'aide de la clé de pressage fournie. Voir figure 3.
4. Roulez le produit entre vos doigts jusqu'à formation d'un petit cône. Voir figure 4.
5. Enfoncez fermement le cône dans la dent creuse. Voir figure 5.
6. Retirez l'excédent de Cavifix™ à l'aide de la pointe de la spatule fournie. Voir figure 6.

À noter: Pour être certain que tout excédent de Cavifix™ est retiré, serrez légèrement les dents. Vous vous assurerez ainsi que Cavifix™ forme une surface plane avec le reste de vos dents. La prise de Cavifix™ prend environ 30–45 minutes en contact avec l'humidité buccale. Évitez toute mastication pendant 1 heure. Consultez votre dentiste le plus tôt possible.

IT

Cavifix™ è un materiale di riempimento a base di resina sintetica, pronto all'uso e clinicamente testato, sviluppato per sigillare provvisoriamente nuove cavità dentali e per riparare otturazioni. Cavifix™ non è un materiale di riempimento definitivo ed è ideale da utilizzare in caso di emergenza per sostituire o riparare un'otturazione che si è staccata. Presenta una adeguata resistenza, ma è tuttavia facilmente rimovibile. Il prodotto è sicuro e non irrita le gengive. Cavifix™ contiene gli stessi ingredienti che utilizzano i dentisti.

Utilizzo consigliato: 1 applicazione dura fino a 4 settimane.

Attenzione: Leggere attentamente le istruzioni allegate prima di iniziare l'otturazione. Non utilizzare Cavifix™ in presenza di gonfiore, arrossamento o dolore nell'area interessata. In questo caso contattare immediatamente il proprio dentista. Non applicare su ferite aperte. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non ingerire il prodotto. Conservare in luogo asciutto (5–25°C). Riposizionare saldamente il tappo dopo ogni uso. Non utilizzare in caso di sensibilità o allergia nota a uno degli ingredienti.

Contenuto della confezione: 1 tubetto di Cavifix™ 7g, 1 vassoio, 1 Spatola, 1 microspazzola, 1 guanto, 1 istruzioni per l'uso.

Istruzioni per l'uso:

Cavifix™ aderisce solo quando viene a contatto con acqua o saliva e richiede circa 30–45 minuti per agire. Per garantire il risultato migliore, si prega di leggere attentamente le istruzioni.

1. Lavare e asciugare accuratamente le mani. Indossare il guanto per garantire l'applicazione igienica del prodotto. Vedere figura 1.
2. Pulire l'area interessata dalla cavità con il microspazzolino in dotazione e risciacquare con acqua calda. Vedere figura 2.
3. Spremere una piccola quantità di Cavifix™ sulla zona piatta del porta intarsio in plastica utilizzando la chiavetta spremi tubetto fornita. Vedere figura 3.
4. Modellare il prodotto con le dita per ottenere una forma a piccolo cono. Vedere figura 4.
5. Spingere saldamente il "cono" nell'area della cavità. Vedere figura 5.
6. Rimuovere il prodotto Cavifix™ in eccesso con l'ausilio della punta della spatola in dotazione. Vedere figura 6.

Nota: Per assicurarsi di aver rimosso tutto l'eccesso di Cavifix™ dall'area della cavità, chiudere delicatamente la bocca. In questo modo si assicura che Cavifix™ sia allineato a tutti gli altri denti. L'adesione di Cavifix™ richiede circa 30–45 minuti a contatto con la saliva. Non masticare per 1 ora. Rivolgersi al proprio dentista appena possibile.

Manufactured by:



14.700.00.A.0.0.99 - R12092018D-PT

Supplier for distribution:



Ingredients: Calcium Sulphate, Barium Sulphate, Glycol Ether, Zinc Oxide, Acrylic Polymer, Silica.



SWISS CONTROLLED QUALITY