



	FR	DE	NL	EN	IT	ES
①	Bouton Marche/Arrêt 3 niveaux de chauffe	Ein-/Ausschalter 3 Wärmestufen	Aan/uit button 3 verwarmingsstanden	On/Off button 3 heating levels	Pulsante On/Off 3 livelli di riscaldamento	Botón de encendido/apagado 3 niveles de calefacción
②	Zone de chauffe (10 x 15 cm)	Heizzone (10 x 15 cm)	Verwarmingkussen (10 x 15 cm)	Heating zone (10 x 15 cm)	Zona di riscaldamento (10 x 15 cm)	Zona de calentamiento (10 x 15 cm)
③	Powerbank 5000 mAh incluse	Powerbank 5000 mAh inkl.	Inclusief powerbank 5000 mAh	Powerbank 5000 mAh include	Banca di alimentazione 5000 mAh inclusa	Powerbank 5000 mAh incluida
④	Elastiques de resserrage	Gummibänder für Weitenregulierung	Elastische aantrekbanden	Elastics for tightening	Elastici per il serraggio	Elásticos para apretar

CEINTURE DE SOUTIEN CHAUFFANTE

FR



Avvertimento : Veuillez lire ce manuel d'instructions attentivement avant d'utiliser l'instrument et le conserver pour une utilisation future.

A. EXPLICATION DES SYMBOLES ET DES SIGNES

Lire les instructions avant d'utiliser l'appareil.



Ne pas utiliser de javel pour le nettoyage.



Ne pas sécher au sèche-linge.



Ne pas repasser.



Ne pas nettoyer à sec.



Ne pas insérer de pointes, aiguilles ou broches.



Ne pas utiliser plié ou replié.



Ne pas laisser à la portée d'enfants de moins de 3 ans.

B. CONSIGNES DE SECURITEConsignes de sécurité spécifiques

1. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 3 ans car ils ne peuvent réagir en cas de surchauffe.
2. Cet appareil ne doit pas être utilisé par de petits enfants (3-8 ans), sauf si un parent ou un tuteur a prérégulé les contrôles nécessaires, ou si l'enfant a reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité.
3. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et par des personnes ayant une déficience physique, sensorielle ou mentale ou ayant une expérience ou des connaissances limitées, à condition qu'elles soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions sur son utilisation.
4. Les enfants ne doivent pas jouer avec un appareil électrique.
5. Les enfants ne doivent pas être autorisés à nettoyer ou à entretenir cet appareil sans supervision.

6. Assurez-vous que vous ne vous endormez pas pendant l'utilisation de cet appareil !
7. Si vous êtes très fatigué lors de l'utilisation, vous pouvez sélectionner le niveau 1 pour votre sécurité.
8. Vous devez examiner l'appareil régulièrement pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de détérioration. Si vous détectez des signes d'usure ou de déchirement, ou si l'appareil a été utilisé de manière inappropriée, arrêtez de l'utiliser.
9. Le mécanisme de commutation NE DOIT PAS entrer en contact avec de l'eau lorsque le produit est en cours de lavage ou du séchage.
10. Utiliser uniquement avec la powerbank détachable fournie.
11. Ne pas utiliser si plié ou plissé.
12. Ne placez pas de goupilles de sécurité, d'aiguilles ou de broches de quelque type que ce soit sur cet appareil.
13. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les hôpitaux, les cliniques, etc.
14. Ce n'est pas un produit médical.
15. Ne pas utiliser avec un enfant ou toute personne ayant une faible sensibilité à la chaleur.

Consignes de sécurité générales

1. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
2. Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
3. Débranchez toujours votre appareil après chaque utilisation et laissez-le refroidir avant de le nettoyer, de le ranger ou de le déplacer.
4. Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
5. Ne tentez jamais de réparer l'appareil par vous-même. Faites-le toujours réparer par un centre de service après-vente ou un centre de réparation qualifié.
6. Ne laissez pas pendre le cordon d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes.
7. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleurs comme les radiateurs, afin d'éviter la déformation des parties en plastique.
8. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer l'appareil.
9. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

C. UTILISATION

1) Rechargement de la batterie

Avant la première utilisation, connectez une extrémité du câble d'alimentation à la powerbank et l'autre extrémité à un port USB de votre ordinateur ou à un adaptateur secteur (non fourni).

Les voyants de la powerbank clignotent pendant toute la durée du chargement. Lorsque la charge est complète (environ 3h), débranchez le câble pour prolonger la durée de vie de la batterie.

Vous pourrez utiliser votre appareil environ 60 à 90 minutes avant le prochain rechargement.

2) Mise en marche

- Positionnez la ceinture autour de la taille en veillant bien à placer la zone de chauffe ② sur la zone dorsale douloureuse ou en tension.
- Fermez ensuite sur l'avant en ajustant la large bande velcro à votre tour de taille et ajuster les élastiques de serrage ④ selon le maintien qui vous convient.
- Branchez le câble de la ceinture à la powerbank.
- Glissez la powerbank dans la poche prévue à cet effet.
- Pour allumer l'appareil, appuyez pendant au moins 3 secondes sur le bouton Marche/Arrêt ①. Le bouton clignote rouge.
- Utilisez le bouton ① pour sélectionner le niveau de chauffe (niveau 1 = doux ; niveau 2 = moyen ; niveau 3 = intense).
 - o Appuyez 1 fois : niveau 1 (40°C) le voyant s'allume en blanc
 - o Appuyez 2 fois : niveau 2 (50°C) le voyant s'allume en bleu
 - o Appuyez 3 fois : niveau 3 (60°C) le voyant s'allume en rouge

A l'allumage, lorsque le voyant rouge clignote, si vous ne sélectionnez pas de mode, le voyant cesse de clignoter après 5 à 7 minutes et devient blanc : la ceinture se met automatiquement en niveau 1 (40°C)

- Pour éteindre l'appareil, appuyez pendant environ 3 secondes sur le bouton Marche/Arrêt ①

La ceinture vous procurera rapidement une sensation de chaleur bienfaisante légère pour soulager la douleur sans vous bloquer dans vos mouvements.

Sa matière souple et confortable convient à toutes les morphologies.

A porter dès l'apparition de la douleur.

A utiliser directement sur la peau ou sur un vêtement léger.



APRÈS UTILISATION

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, débranchez la powerbank. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, rangez-le dans un endroit frais et sec.

**AVERTISSEMENT - RISQUE DE BRÛLURES**

L'utilisation prolongée de l'appareil à pleine puissance peut provoquer des brûlures.

Pour éviter de brûler la peau, vérifiez la température avant utilisation avec l'arrière de la main (pas avec la paume de la main, car elle est moins sensible que les autres parties du corps).

D. CONSEIL D'ENTRETIEN

- 1) Débranchez la powerbank
- 2) Nettoyez le produit uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide et sans peluches.

N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs pour nettoyer l'appareil.

**ATTENTION**

IMPORTANT: Ni la powerbank ni le câble d'alimentation ne doivent entrer en contact avec l'humidité, l'eau ou tout autre liquide. Si tel est le cas, il existe un risque de choc électrique. Utilisez uniquement lorsque l'appareil est complètement sec. **NE JAMAIS UTILISER L'APPAREIL LORSQU'IL EST MOUILLE OU HUMIDE !**

**E. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

- Matière textile : 100% polyester
- Alimentation : powerbank 5000mAh
- Autonomie : environ 1h30
- 8W – 5V

**Mise au rebut de l'appareil :**

La directive Européenne 2012/19/EU sur les déchets des Equipements électriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Précisions et précautions sur l'utilisation des piles :

- Jeter une pile usagée dans la nature ou les ordures ménagères pollue et empêche la récupération de matériaux valorisables. Il est donc important de limiter sa consommation de piles et de respecter les consignes suivantes :
 - De privilégier les piles alcalines (qui durent plus longtemps que les piles salines) et lorsque c'est possible les piles rechargeables.
 - De déposer les piles et accumulateurs usagés dans les conteneurs spécifiques présents chez les commerçants. Ainsi, les métaux seront valorisés et ne pollueront pas l'environnement car ils contiennent des métaux lourds, dangereux pour la santé et l'environnement (principalement du nickel et du cadmium).
- Les piles doivent être mises en place en respectant la polarité indiquée sur l'appareil et sur la pile. Un positionnement incorrect peut soit endommager l'appareil, soit causer des fuites au niveau des piles, soit à l'extrême un incendie ou l'explosion de la pile.
- Pour assurer un bon fonctionnement, les piles doivent être en bon état. En cas d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil, mettre des piles neuves.
- N'essayez jamais de recharger des piles non rechargeables. Elles pourraient couler, s'échauffer, provoquer un incendie ou exploser.
- Remplacez l'ensemble des piles en même temps. Ne jamais mélanger des piles salines avec des piles alcalines ou rechargeables.
- Les piles usagées doivent être enlevées de l'appareil. De même, retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant une longue durée, sinon les piles risquent de couler et de causer des dommages.
- Ne jamais essayer de court-circuiter les bornes d'une pile.
- Ne jamais jeter les piles au feu, elles risqueraient d'exploser.
- La recharge des accumulateurs est à réaliser par un adulte.
- Sortir les accumulateurs de l'appareil avant de les recharger.
- Nous conseillons à l'adulte de surveiller l'enfant lorsqu'il change les piles afin que ces consignes soient respectées ou bien effectuer lui-même le remplacement des piles.
- Si une pile est avalée, consulter immédiatement son médecin ou le centre antipoison le plus proche. N'oubliez pas d'emporter l'appareil avec vous.
- Pour un fonctionnement optimal, nous recommandons d'utiliser uniquement des piles haute performance de qualité et récente.