

	lD	lK	cB	cC	cG	cH	cT	1
fr	hauteur entre le sol et le genou (mesure prise en dessous du pli du genou face arrière)	hauteur sol-entrejambe	circonférence de la cheville (au plus fin)	circonférence du mollet (au plus fort)	circonférence de la cuisse (au plus fort)	circonférence des hanches	circonférence de la taille	pointure

1



VENOFLEX *Fast / Soft & Care*


2



3



1

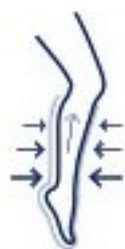

fr

Compression dégressive

fr

CHAUSSETTES, BAS-CUISSÉ OU COLLANT DE COMPRESSION MÉDICALE POUR FEMME ET HOMME

Description/Destination

Les dispositifs VENOFLEX sont destinés à être utilisés sur les membres inférieurs, par des adultes répondant aux indications présentées ci-après et dont les mesures correspondent au tableau des tailles.

Composition : Polyamide - élasthanne
Composants spécifiques à certaines gammes (voir étiquette) : viscose - lin - laine - coton - silicone*

* Pour les formats bas cuisse

Propriétés/Mode d'action

Les dispositifs VENOFLEX apportent de la compression, en appliquant une pression sur le membre, favorisant ainsi le retour veineux.

Indications

- 10-15 mmHg / Classe 1 : jambes lourdes, impatiences, œdème vespéral, télangiectasies ou veines réticulaires (< 3 mm), prévention des troubles fonctionnels liés à la station debout prolongée, prévention de la thrombose veineuse lors des voyages de longue durée, grossesse et post-partum (prévention et traitement de l'insuffisance veineuse chronique mineure et prévention des thromboses veineuses profondes), hypotension orthostatique.
- 15-20 mmHg / Classe 2 : jambes lourdes, impatiences, œdème vespéral, télangiectasies ou veines réticulaires (< 3 mm), post sclérothérapie de télangiectasies ou veines réticulaires (< 3 mm), post sclérothérapie ou post-chirurgie de veines variqueuses (≥ 3 mm), veines variqueuses (≥ 3 mm), prévention des thromboses veineuses chez la femme enceinte ou post-partum, prévention de la thrombose veineuse lors des voyages de longue durée, traitement du lymphoœdème (phase de maintien).
- 20-36 mmHg / Classe 3 : veines variqueuses (≥ 3 mm), post sclérothérapie ou post-

chirurgie de veines variqueuses (≥ 3 mm), traitement de l'œdème veineux chronique, troubles trophiques (pigmentation, eczéma, lipodermatosclérose chronique ou atrophie blanche chronique), ulcère veineux cicatrisé, affections veineuses chroniques liées à la grossesse ou au post-partum, prévention et/ou traitement des thromboses veineuses (membre inférieur) et du syndrome post-thrombotique, traitement du lymphoedème (phase de maintien).

Contre-indications

Ne pas utiliser en cas d'affections dermatologiques majeures d'un membre concerné. Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à l'un des composants. Ne pas utiliser en cas d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec indice de pression systolique (IPS) $< 0,6$. Ne pas utiliser en cas d'insuffisance cardiaque décompensée. Ne pas utiliser en cas de microangiopathie diabétique évoluée (pour une compression > 30 mmHg). Ne pas utiliser en cas de neuropathie périphérique sévère du membre concerné. Ne pas utiliser en cas de phlegmatia coerulea dolens (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle) du membre concerné. Ne pas utiliser en cas de pontage extra-anatomique du membre concerné. Ne pas utiliser en cas de thrombose septique.

Précautions

Se conformer strictement à la prescription et au protocole d'utilisation préconisé par votre professionnel de santé. Une réévaluation régulière du rapport bénéfice/risque et du niveau adéquat de pression par un professionnel de santé s'impose en cas de :

- AOMI avec IPS entre 0,6 et 0,9
- Neuropathie périphérique évoluée
- Dermatose suintante ou eczématisée.

En cas d'inconfort, de gêne importante, de douleur, de variation du volume du membre, de dégradation de l'état de la peau, d'infection, de sensations anormales, de changement de couleur des extrémités, ou de changement de performances, retirer le dispositif et consulter un professionnel de

santé. Ne pas appliquer le produit directement sur une peau lésée ou plaie ouverte sans pansement adapté. Vérifier que le système antiglisse puisse s'appliquer sur une peau saine et non lésée. Veiller à ne pas abîmer le dispositif lors de la mise en place, notamment avec les ongles. Pour des raisons d'hygiène, de sécurité et de performance, ne pas réutiliser le dispositif pour un autre patient. Ces dispositifs sont conçus pour un port de jour. Ne pas utiliser pour la baignade. Ne pas appliquer de produits sur la peau (crèmes, pommades, huiles, gels, patchs...) avant la mise en place du dispositif, ceux-ci pouvant endommager le produit. Pour certaines pathologies (ou situations) telles que la thrombose veineuse, le dispositif doit être utilisé en association avec un traitement anticoagulant ; se référer à l'avis d'un professionnel de santé.

Venoflex Clinic : Ces produits ne contiennent pas de fils métalliques susceptibles d'interférer avec un champ magnétique. En cas d'utilisation d'un bistouri électrique, il est conseillé d'utiliser une chaussette plutôt qu'un bas afin de tenir le dispositif éloigné du bistouri. La chaussette doit être suffisamment éloignée pour ne pas entrer en contact avec la plaque ou les électrodes du bistouri.

Effets secondaires indésirables

Ce dispositif peut entraîner des réactions cutanées (rougeurs, démangeaisons, brûlures, cloques...) voire des plaies de sévérités variables ou une sécheresse cutanée. Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État Membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Mode d'emploi/Mise en place

Choisir la taille adaptée au patient en se référant au tableau des tailles. Vérifier l'intégrité du dispositif avant chaque utilisation. Il est recommandé de laver le dispositif avant la première utilisation. Lors de l'enfilage, manipuler le produit avec précaution (attention aux ongles longs et aux bijoux).

Comment enfiler ses chaussettes VENOFLEX ?

1 Ⓐ Introduire la main à l'intérieur de la chaussette et pincer le talon

1 Ⓑ Insérer le pied dans la chaussette jusqu'à ce que le talon soit parfaitement en place

1 Ⓒ Remonter jusqu'en dessous du genou et ne pas retourner la chaussette sur elle-même

1 Ⓓ Masser la jambe pour répartir la chaussette de façon homogène

Comment enfiler ses chaussettes VENOFLEX FAST et SOFT & CARE ?

2 Ⓐ Ramener le haut de la chaussette jusqu'au talon

2 Ⓑ Insérer le pied dans la chaussette jusqu'à ce que la pointe de pied et le talon soient parfaitement positionnés

2 Ⓒ Dérouler la chaussette de la cheville jusqu'en dessous du genou et ne pas retourner la chaussette sur elle-même

2 Ⓓ Masser la jambe pour répartir la chaussette de façon homogène

Comment enfiler ses bas ou collants VENOFLEX ?

3 Ⓐ Introduire la main à l'intérieur du bas ou collant et pincer le talon

3 Ⓑ Insérer le pied dans le bas ou collant jusqu'à ce que le talon soit parfaitement en place

3 Ⓒ Remonter jusqu'en haut de la cuisse avec précaution (ne pas tirer trop fort sur l'antiglisse) ou jusqu'à la taille pour le collant

3 Ⓓ Masser le membre inférieur pour répartir le bas ou collant de façon homogène

L'obtention de la pression nécessaire peut exiger la superposition de plusieurs dispositifs de compression.

Entretien : lavable en machine à 40 °C (cycle normal ou délicat pour Incognito absolu et Fast laine). Si possible utiliser un filet de lavage. Ne pas utiliser de détergents, adoucissants ou de produits agressifs (produits chlorés...). Essorer par pression. Sécher loin d'une source directe de chaleur (radiateur, soleil...). Si le dispositif est exposé à l'eau de mer ou à l'eau chlorée, prendre soin de bien le rincer à l'eau claire et le sécher.

Stockage : stocker à température ambiante, de préférence dans l'emballage d'origine.

Élimination : éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur.

Premier marquage CE Venoflex : 2002

Conserver cette notice.