




THUASNE

Care Protect Pedi

2306 01

fr	Dispositif d'aide à la prévention des escarres du pied (x2)	3
en	Device to help prevent pressure ulcers on the feet (x2)	4
de	Hilfsvorrichtung zur Vermeidung von Druckgeschwüren am Fuß (x2)	5
nl	Hulpmiddel ter preventie van decubitus aan de voet (x2)	6
it	Ausilio per la prevenzione delle piaghe da decubito sui piedi (x2)	7
es	Dispositivo de prevención de úlceras por presión en los pies (x2)	8
pt	Dispositivo de ajuda à prevenção de escaras do pé (x2)	9
el	Διάταξη για την πρόληψη των ελκών πίεσης του ποδιού (x2)	10
cs	Pomůcka pro prevenci dekubitů na nohách (x2)	11
pl	Wyrób pomocniczy do zapobiegania odleżynom stóp (x2)	12
sl	Pripomoček za preprečevanje preležanin na stopalu (x2)	13
sk	Pomôcka na prevenciu preležanín chodidiel (x2)	14
hu	Láb felfekvésének megelőzésére szolgáló eszköz (x2)	15
ro	Dispozitiv de prevenire a escarelor piciorului (x2)	16

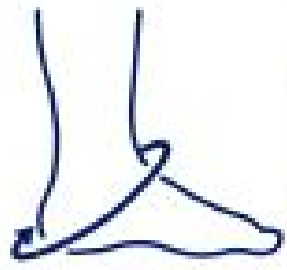

	1	27 - 31 cm
	2	32 - 36 cm
	3	37 - 42 cm

fr	Circonférence cou-de-pied/talon
en	Instep/heel circumference
de	Umfang des Fußrückens/der Ferse
nl	Omvang wreef/hiel
it	Circonferenza collo del piede/tallone
es	Circunferencia del empeine/talón
pt	Circunferência do peito do pé/calcanhar
el	Περιφέρεια ράχης ποδιού (κουτεπιέ)/πτέρνας
cs	Obvod u kotníku/paty
pl	Obwód podbicie/pięta
sl	Obseg narta/pete
sk	Obvod priehlavku/päty
hu	Lábfej/sarok kerülete
ro	Circumferința gleznei/călcâiului



DISPOSITIF D'AIDE À LA PRÉVENTION DES ESCARRES DU PIED

Description/Destination

Dispositif d'aide à la prévention de l'escarre du pied : talon, malléoles, bord du pied, orteils, partie inférieure du mollet. Disponible en 3 tailles.

Composition

Polyuréthane - coton - élasthanne - polyamide - polyester.

Propriétés/Mode d'action

Réduction de la pression exercée sur le talon et l'ensemble du pied, en augmentant la surface de contact avec le support (matelas) et favorisant ainsi la circulation sanguine.

Indications

Prévention de l'escarre du pied, à destination des patients alités ou à mobilité réduite et présentant des risques d'escarres de niveau « moyen à élevé » selon l'échelle de Braden ou autre échelle validée, et selon l'avis du professionnel de santé.

Contre-indications

Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à l'un des composants.

Ne pas placer le produit directement en contact avec une peau lésée.

Ne pas utiliser en cas d'escarre constituée.

Précautions



Avertissements importants.

Ce dispositif s'inscrit dans un ensemble de mesures et de moyens de prise en charge de patients à risque d'escarre. Comme tout moyen d'aide à la prévention, l'utilisation du dispositif seul n'est pas suffisante et ne dispense pas d'une surveillance régulière de l'état cutané des patients.

La première prévention de l'escarre chez les patients alités ou à mobilité réduite consiste à changer fréquemment les points d'appui du corps, en moyenne toutes les trois heures, pour limiter la compression trop prolongée des vaisseaux en regard des saillies osseuses et pour permettre l'irrigation des tissus.

Dans le cas d'une huile de massage utilisée conjointement aux effleurages, veiller à ce que celle-ci ait complètement pénétré avant de remettre en place le dispositif.

Se conformer strictement à la prescription et au protocole d'utilisation préconisé par votre professionnel de santé.

Vérifier l'intégrité du dispositif avant chaque utilisation.

Ne pas utiliser le dispositif s'il est endommagé.

Choisir la taille adaptée au patient en se référant au tableau des tailles.

Ne pas marcher lors du port du dispositif, risque de chute.

Vérifier quotidiennement l'état des pieds (avec une attention particulière pour les patients diabétiques ou ayant un déficit sensoriel).

En cas d'inconfort, de gêne importante, de douleur, de sensations anormales, liés au port du dispositif, retirer le dispositif et consulter un professionnel de santé.

Pour des raisons d'hygiène et de performance, ne pas réutiliser le dispositif pour un autre patient.

Effets secondaires indésirables

Ce dispositif peut entraîner des réactions cutanées (rougeurs, démangeaisons, irritations...).

Risque d'infections, d'apparition d'ulcères ou d'œdème.

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État Membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Mise en place

Il est recommandé de porter le dispositif à même la peau.

Pour enfiler correctement le dispositif, vérifier les 2 points suivants :

- la bordure colorée doit être positionnée vers le haut,
- le logo doit être lisible à l'endroit sur la partie arrière de la jambe.

Vérifier la bonne mise en place du talon dans le dispositif ainsi que l'absence de plis.

Entretien

Effectuer régulièrement un contrôle visuel de l'état de la mousse : la présence d'un affaissement visible de la mousse est un critère de vieillissement qui compromet les performances du dispositif.

Lavable en machine à 60 °C.

Nombre de lavages à 90 °C : 10 maximum.

Ne pas utiliser de détergents, adoucissants ou de produits agressifs (produits chlorés...).

Ne pas utiliser de sèche-linge. Ne pas repasser. Ne pas nettoyer à sec. Sécher loin d'une source directe de chaleur (radiateur, soleil...).

Stockage

Stocker à température ambiante, dans un endroit sec et aéré.

Élimination

Éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur.

Premier marquage CE : 2010.