

DESIGNATION

GEMINI® ALPHA Chaussure à Décharge de l'avant-pied avec talonnette (CHUT)

INDICATIONS :

GEMINI® Alpha est une chaussure thérapeutique adaptée à la chirurgie de l'avant-pied (Hallux Valgus, Hallux Rigidus...)



COMPOSITION DE LA BOITE :



*Paire de chaussures
à décharge de l'avant-pied*



*2 paires de semelles
(3 mm et 9 mm)*



*2 talonnettes
pied droit/pied gauche,
6 vis, 1 tournevis (D)*

DESCRIPTION :

Conforme à l'arrêté du 24 juillet 2018

GEMINI® est une chaussure thérapeutique à décharge de l'avant-pied. Elle permet de réduire la pression sur l'avant-pied lors de la reprise de la marche.

- Le contrefort talonnier et la voûte plantaire offrent un bon maintien du pied.
- Poids 360 g en taille 38 avec semelle de confort.
- Les finitions sont soignées pour réduire les différents points de pression.

GEMINI® est esthétique, facile et rapide à chausser :

- Son style est élégant et intemporel- Son chaussant a été élargi pour s'adapter au pansement **(A)**.
- Sa large ouverture permet de poser le pied à plat sans comprimer la zone opérée **(B)**



CONFORTABLE

Une semelle élargie pour plus de stabilité ; sa légèreté et son ergonomie pour plus de confort



THÉRAPEUTIQUE

La courbure de la semelle antidérapante facilite le déroulement du pas et participe à la décharge de l'avant-pied.

L'ajout de la talonnette à gauche ou à droite, permet d'accroître encore la décharge de l'avant-pied. Elle se fixe simplement à l'aide de trois vis.



Le principe de la chaussure GEMINI® consiste à associer deux systèmes d'ouverture de la chaussure :

- Une ouverture totale grâce aux deux fermetures à glissière (B)
- et un réglage de la largeur de la chaussure grâce aux lacets (C).

C'est un réel avantage pendant la première phase post-opératoire.



OUVERTURE MAXIMALE

Se chausser facilement, en posant le pied à plat, grâce aux deux fermetures à glissière qui ouvrent entièrement la chaussure.

AJUSTABLE

Réglage de la chaussure, selon l'évolution du pansement, grâce aux lacets

Description des tailles



Tailles (en mm)	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Chaussure																
Longueur	233	240	247	253	260	267	273	280	287	293	300	307	313	320	327	333
Largeur de l'avant pied	84,5	86,0	87,5	89,0	90,5	92,0	93,5	96,5	98	99,5	101	102,5	104	105,5	107	108,5
Largeur du talon	56,4	57,6	58,8	60,0	61,2	62,4	63,6	66,8	68	69,2	70,4	71,6	72,8	74	75,2	76,4
Semelle 3 mm																
Circonférence	232,5	237,0	241,5	246,5	251,0	255,5	260,0	267,0	271,5	276,0	280,5	285,0	289,5	294,0	298,5	302,5
Hauteur d'orteil	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Semelle 9 mm																
Circonférence	221,0	225,5	230,0	234,5	239,0	243,5	248,0	255,0	259,5	264,0	268,5	273,0	277,5	282,0	286,5	291,0
Hauteur d'orteil	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT :

Ajouter la talonnette à gauche ou à droite, en la fixant à l'aide de 3 vis.



Le port de chaussettes est fortement recommandé.

Placer la semelle fine ① dans la chaussure correspondant au pied pansé et la semelle épaisse ② dans l'autre chaussure.



Délayer la chaussure, et ouvrir entièrement les fermetures à glissière.



Poser le pied pansé bien à plat à l'intérieur de la chaussure.



Rabattre la languette.
Fermer les fermetures à glissière.



Lacer la chaussure et nouer délicatement.



Par la suite, utiliser uniquement les fermetures à glissière pour retirer les chaussures.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Deux ouvertures dissociées

- une ouverture totale grâce aux deux fermetures à glissière.
- un réglage de la largeur de la chaussure grâce aux lacets.

En cas de doute sur l'utilisation de ce dispositif, contacter votre praticien ou un professionnel de santé

RECOMMANDATIONS DE MISE AU REBUT :

L'élimination du dispositif ou de ses composants doit s'effectuer en accord avec la réglementation locale des déchets en vigueur.

CONTRE-INDICATIONS (avis médical obligatoire avant utilisation)

Pas de contre-indication spécifique connue, excepté en cas de sensibilité avérée aux matériaux de fabrication.

Vérifier régulièrement l'état d'usure de la semelle extérieure. Pour son bon fonctionnement, ne pas modifier la structure du produit. Ne pas utiliser en cas de détérioration

CLASSEMENT CE :

Classe I suivant le règlement 2017/745 relative aux dispositifs médicaux

Code LPP individuel : 7155496

Fabricant : Importateur/Distributeur France : Implants Service Orthopédie – 18 avenue du Polygone – 42300 ROANNE

