

**Brava**<sup>®</sup>

 **Coloplast**

Déo-lubrifiant

Soins des stomies



### Mode d'emploi

23325882 Version 1

Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S. Tous droits réservés. © 2021-02-04

### Destination

Le déo-lubrifiant Brava est destiné à désodoriser et à lubrifier le contenu d'une poche de stomie.

### Mises en garde

Conserver à l'abri de la lumière.

### Informations

Ingrédients : Eau, Bétaïne de cocamidopropyle, Gomme de guar d'hydroxypropyle, Parfum, EDTA tétrasodique, Urée d'imidiazolidinyle, Acide citrique.

Coloplast ne peut être tenu pour responsable des dommages pouvant résulter de l'emploi de ce produit dans des conditions non conformes aux instructions données dans la notice d'utilisation.

### Utilisation



Ajouter 5-10 ml ou le contenu de la dosette dans la poche et frotter doucement la poche pour répartir uniformément le déodorant lubrifiant Brava.

Adaptez la quantité en fonction de la taille de votre poche de stomie.



Si vous utilisez une poche vidable, vous pouvez également ajouter le déolubrifiant par le clamp de vidange.

Répétez l'opération après avoir vidé la poche.

### Élimination













Le produit doit être éliminé avec les déchets ménagers normaux ou conformément aux directives locales.

Ne pas jeter le produit dans les toilettes.

### Signalement des incidents

Si un incident grave s'est produit au cours de l'utilisation de ce dispositif ou suite à son utilisation, le signaler au fabricant et aux autorités nationales compétentes.

## Explication des symboles

	Dispositif médical
	Indique que le produit est conforme à la législation européenne en ce qui concerne les dispositifs médicaux
	Référence catalogue
	Date de péremption (AAAA-MM-JJ)
	Numéro de lot
	Date de fabrication (AAAA-MM-JJ)
	Fabricant
	Consulter la notice d'utilisation
	Présente un code-barres qui contient le numéro d'identification unique du dispositif
	(Global Trade Item Number) Code article international
	Conserver à l'abri de la lumière
	Emballage recyclable