

ANKLE+

Chevillère en tricot élastique avec sangle en forme de 8

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- 1) Enfiler la cheville comme une chaussette (ligne bleue en haut).
- 2) Pour fixer la partie auto-agrippante, partir du côté opposé au ligament blessé (c'est-à-dire vers l'extérieur du pied pour les lésions du ligament médial (interne) ou vers l'intérieur du pied pour les lésions du ligament latéral (externe)).
- 3) Passer la sangle sous le pied, puis l'enrouler sur le cou-de-pied.
- 4) Faire passer la sangle en diagonale sur le dessus du pied et revenir autour de la cheville.
- 5) Attacher la bande auto-agrippante à la sangle elle-même.

COMPOSITION

Polyamide, Polyester, Élasthanne, Acrylique

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Lavable en machine à cycle délicat (max 40°C) avec un détergent doux.
Les parties auto-agrippantes doivent être fermées pour le lavage.
Ne pas utiliser d'eau de Javel. Rincer abondamment. Sécher à l'air libre. Ne pas sécher en machine. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas repasser.

FABRIQUÉ SANS LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL**GARANTIE**

OJD, LLC répare ou remplace tout ou partie de l'unité et de ses accessoires en cas de vice de matériel ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat.
Dans la mesure où les termes de cette garantie sont incompatibles avec les réglementations locales, les décisions de ces réglementations l'emportent.

