

KNEE+

Genouillère en tricot élastique avec sangles croisées

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- Détacher et relâcher les sangles.
- Placer la genouillère sur le genou (ligne bleue en haut).
- Fixer les 4 sangles croisées en suivant les séquences de fixation indiquées sur les photos et décrites ci-dessous.
- Les parties auto-agrippantes sont marquées de symboles permettant de fixer les sangles dans l'ordre et la position corrects.

Ordre des sangles supérieures :

- 1) Tirer la sangle la plus longue en diagonale sur le devant de la cuisse et la fixer à l'aide de la partie auto-agrippante sur le point marqué 'I'.
- 2) Faire passer la sangle par l'arrière de la cuisse et la fixer à l'aide de la partie auto-agrippante au point marqué 'II'. La sangle doit maintenant être fixée en haut de la cuisse des deux côtés.
- 3) Tirer la sangle supérieure plus courte en diagonale sur le devant de la cuisse et l'attacher à l'orthèse au point marqué 'II'.

Ordre des sangles inférieures :

- 4) Croiser les deux sangles inférieures sur le devant du tibia.
- 5) Enrouler les sangles autour du mollet avant de les fixer l'une sur l'autre au point marqué 'III'.

COMPOSITION

Polyamide, Polyester, Élasthanne, Acrylique, Silicone.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Lavable en machine à cycle délicat (max 40°C) avec un détergent doux.

Les parties auto-agrippantes doivent être fermées pour le lavage.

Ne pas utiliser d'eau de Javel. Rincer abondamment. Sécher à l'air libre. Ne pas sécher en machine. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas repasser.

