

TALONIA VISCO Décharge talonnière




Les protège-talons sont destinés à prévenir les risques d'escarre et améliorer la circulation sanguine.

Réalisée en mousse viscoélastique moulée 86 kg/m^3 , cette talonnière possède une découpe pour éviter tout contact au niveau du talon. Sa housse en polyuréthane est totalement amovible.

- > Protection lavable
- > Adaptée à un grand nombre de morphologie



Mousse visco 86 kg/m^3

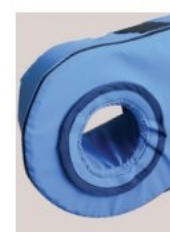

Découpe talonnière

DIMENSIONS

Code	Désignation	Dimensions	Poids
680010	TALONIA VISCO décharge talonnière	49 x 23 x 16,5 cm	1,14 kg

EAN, PRISE EN CHARGE


Code	Désignation	Code EAN
680010	TALONIA VISCO Décharge talonnière	3701127705942

Notice d'utilisation de la Décharge talonnière Visco

LPPR 12.692.248

1 / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Coussin de positionnement et décharge du talon.
Housse intégrale en polyamide et PU.
Marquage CE : Classe 1 annexe VII.
Dimensions : 50 x 22 cm.
Garantie 2 ans.

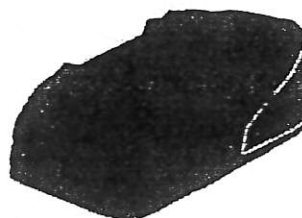

2 / MISE EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

En cas de contact liquide, nettoyer la housse et le coussin. Ne pas intercaler de corps étranger entre le patient et le coussin. Ne pas recouvrir le coussin d'une autre protection que la housse préconisée par le fabricant.

3 / STOCKAGE :

- A plat
- Ne pas exposer près d'une source de chaleur importante
- Stockage : dans un endroit sec et tempéré, à l'abri de la chaleur et de la lumière.
- Durée limite de stockage : 1 an.

4 / CONDITIONS D'UTILISATION :

Permet une aide au positionnement et la suppression des frottements et pressions sur la peau des tissus en contact des patients alités ou polyhandicapés.

5 / ENTRETIEN ET NETTOYAGE :

Ne pas repasser, ne pas utiliser de produit corrosif ni abrasif.
Nettoyage à la machine à 40°C.

6 / SECURITE :

Le coussin est conforme aux réglementations en vigueur.

Date et cachet du revendeur

HERDEGEN
2 rue Freyssinet
77500 Chelles
FRANCE