

Désoclean™

Lingettes ophtalmiques

BAUSCH + LOMB

20 LINGETTES STÉRILES À USAGE UNIQUE POUR LE TRAITEMENT PÉRI-OCULAIRE CHEZ L'ENFANT ET L'ADULTE.

INDICATIONS :

DESOCLEAN™ est indiqué pour le traitement topique des paupières et des cils, sécrétions résultant d'une allergie, d'une inflammation et/ou d'une infection, telle que les différents types de blépharites et de blépharoconjonctivites. Son utilisation est particulièrement indiquée pour le traitement pré- et/ou post-opératoire. DESOCLEAN™ est également recommandé pour le traitement quotidien de la zone péri-oculaire chez les personnes présentant une prédisposition à la survenue de différents types de blépharite et de blépharoconjonctivite. En raison de sa composition particulière, il convient également aux porteurs de lentilles de contact.

PROPRIÉTÉS :

Tous les composants de DESOCLEAN™ sont utiles pour obtenir un traitement adapté, tout en respectant pleinement la physiologie particulière de la zone péri-oculaire, particulièrement délicate et sensible. Le produit assure un traitement précis, en éliminant mécaniquement les sécrétions, les corps étrangers, la poussière, etc...

COMPOSITION :

Lingette douce, imbibée de la solution suivante :

Eau, Polysorbate 20, Hyaluronate de sodium, EDTA disodique, Citrate trisodique dihydraté, Poudre d'Aloe vera, Glycérol, Digluconate de chlorhexidine, Acide citrique monohydraté, Allantoïne, Hydroxyméthylglycinate de sodium.









MODE D'EMPLOI :

Après s'être soigneusement lavé les mains, ouvrir le sachet et sortir la lingette. Appliquer la lingette sur la zone de la paupière. Essuyer délicatement afin de bien nettoyer et d'éliminer les sécrétions oculaires et tout autre type de dépôt (impuretés, particules en suspension dans l'air, poussières, etc.). En cas de sécrétions particulièrement persistantes ou d'obstruction d'un canal lacrymal, il est conseillé de réchauffer le sachet fermé quelques minutes dans de l'eau tiède (environ 40 °C) puis d'utiliser la lingette comme compresse chaude en massant délicatement la zone. En cas d'inflammation, il est en revanche conseillé de refroidir le sachet au réfrigérateur pendant quelques heures, puis d'appliquer la lingette ouverte sur l'œil, en la maintenant en place pendant quelques minutes comme une compresse froide.

MISES EN GARDE :

La stérilité du produit n'est garantie que si le sachet est intact. La lingette est à usage unique. Sa réutilisation peut propager une infection. Conserver dans un endroit frais et sec. Tenir hors de portée des enfants. Pour usage externe. Interrompre le traitement en cas d'irritation ou d'hypersensibilité évidente au produit. En cas d'infection ne pas utiliser la même lingette pour les deux yeux. Usage unique. Lire attentivement le mode d'emploi.

Il est obligatoire de déclarer tout incident grave survenu en lien avec ce dispositif médical DESOCLEAN™ au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le patient est basé.

	Ne pas réutiliser	STERILE R	Stérilisé par irradiation
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé et consulter le mode d'emploi	CE 0425	Marquage CE
	Conserver à l'abri de la lumière du soleil		Fabricant
	Conserver au sec		Distributeur
	Consulter le mode d'emploi	LOT	Numéro de lot
MD	Dispositif médical		Date limite d'utilisation



Laboratoire Chauvin
416, rue Samuel Morse CS 99535
34961 Montpellier



Promeia Italia Srl
MIND Viale Decumano, 36
20157 Milano (MI), Italy
www.promeia.com



NOTICE

P1FR01

592E01-07.23

130000000728

INFORMATION MÉDICALE :

+33 (04) 67 12 30 30

Désoclean is a trademark of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.
 © 2023 Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates