



**DONJOY**<sup>®</sup>

# FRANÇAIS

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

## UTILISATION / INDICATIONS

- Idéal pour maintenir le rachis cervical en position neutre, pour le traitement de lésions ou d'entorses cervicales, pour les phases de réadaptation posttraumatique après le port d'un collier cervical rigide.

## CONTRE-INDICATIONS

- Aucune

## AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

En cas de douleur, de gonflement, de changements au niveau des sensations ou autres réactions inhabituelles lors de l'utilisation de ce produit, consultez immédiatement votre médecin.

## INSTRUCTIONS D'APPLICATION

- 1) Défaire la patte de fermeture auto-agrippante pour ouvrir le collier.
- 2) Placer le collier autour du cou, en plaçant la partie incurvée sous le menton.
- 3) Fermer le collier en utilisant la patte de fermeture auto-agrippante.
- 4) Ajuster le serrage du collier en fonction du besoin et du confort souhaités.

## ENTRETIEN

Laver à la main, à l'eau froide. Utiliser un savon doux. Laisser sécher à l'air libre. Ne pas utiliser d'eau de javel. Ne pas nettoyer à sec, ni sécher au sèche-linge. Ne pas repasser.

## COMPOSITION

100% coton



**SANS LATEX**

## RÉSERVÉ À UN USAGE SUR UN SEUL PATIENT

**GARANTIE** DJO, LLC réparera ou remplacera tout ou partie de l'unité et de ses accessoires en cas de vice de matériau ou de fabrication pendant une période de six mois à partir de la date d'achat.

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.