

ARM SLING**Écharpe de bras**

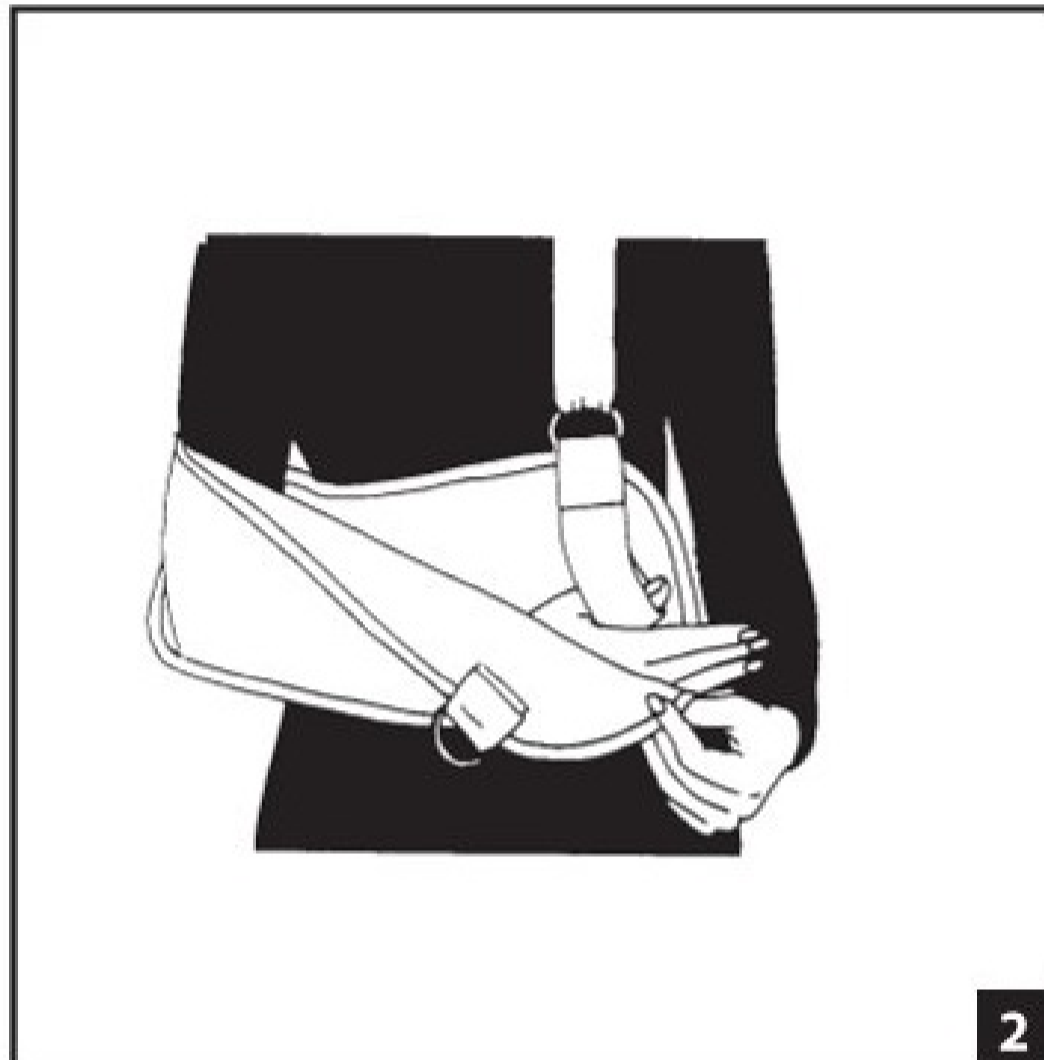
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany



DJO, LLC
5919 Sea Otter Place,
Suite 200
Carlsbad, CA 92010
U.S.A.

©2021 DJO, LLC

13-1389-0-00000 REV F - 2021-10-25

**1****2****FRANÇAIS**

LIRE ATTENTIVEMENT LA TOTALITÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF. UNE MISE EN PLACE CORRECTE EST INDISPENSABLE AU BON FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF.

PROFIL DE L'UTILISATEUR VISÉ : L'utilisateur visé doit être un professionnel de santé agréé, le patient ou l'aide-soignant du patient. L'utilisateur doit être capable de lire et de comprendre l'ensemble des consignes, des avertissements et des mises en garde qui figurent dans le mode d'emploi, et être en capacité physique de les respecter.

UTILISATION/INDICATIONS : Le harnais Procure Deluxe avec coussin est conçu pour soutenir et immobiliser les articulations du bras, de l'épaule et du coude.

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE :

Conçue en matériau souple semi-rigide pour restreindre le mouvement grâce à une construction élastique ou semi-rigide. Assure l'immobilisation ou le mouvement contrôlé du membre ou du segment corporel.

CONTRE-INDICATIONS : Aucune

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS :

- Nous recommandons que la première mise en place soit faite sous la supervision d'un professionnel de santé.
- Ce dispositif de soutien ne doit être utilisé qu'après consultation d'un professionnel de santé si vous souffrez de maladies cutanées, de blessures, de troubles lymphatiques, de gonflement des tissus mous d'origine indéterminée ou de troubles circulatoires ou sensoriels dans la zone affectée.
- Le support doit être bien serré sans toutefois entraver la circulation.
- En cas de douleur, d'enflure, d'altération de la sensation ou d'autres réactions anormales lors de l'utilisation de ce produit, cesser d'utiliser le dispositif et contacter immédiatement votre professionnel de santé.
- Ne pas utiliser sur une plaie ouverte.
- S'il est porté directement sur la peau, celle-ci ne doit présenter aucune blessure ni aucune trace d'humidité, d'huiles, de crèmes, de gels ou de résidus similaires.
- Ne pas utiliser le dispositif s'il est endommagé et/ou si l'emballage a été ouvert.

REMARQUE : contacter le fabricant et l'autorité compétente en cas d'incident grave découlant de l'utilisation de ce dispositif.

INFORMATIONS CONCERNANT L'APPLICATION :

REMARQUE : La longueur de l'enveloppe de l'écharpe de bras universelle peut être raccourcie si nécessaire en repliant l'extrémité ouverte sur elle-même et en attachant les fermetures à velcro. Appliquer comme indiqué ci-dessous.

1. Placer le coude dans la poche de l'écharpe. Le poignet et les trois quarts de la main doivent être supportés dans la poche.
2. Si la poche est équipée d'une boucle pour le pouce, placer le pouce dans la boucle pour faciliter le maintien de l'avant-bras.
3. Placer les attaches d'épaule sur l'épaule opposée, en les faisant passer par l'anneau en D, et attacher. La main doit être légèrement plus élevée que le coude.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :

Laver le revêtement à la main à l'eau chaude avec un savon doux et rincer abondamment. **SÉCHER À L'AIR.**

REMARQUE : Si le produit est mal rincé, le savon résiduel peut provoquer des irritations et endommager le produit.

GARANTIE : DJO, LLC réparera ou remplacera tout le produit ou ses pièces et accessoires pour tout défaut de fabrication ou de main-d'œuvre pour une durée de six mois suivant la date de la vente.

À USAGE SUR UN SEUL PATIENT UNIQUEMENT.

AVIS : BIEN QUE TOUTES LES TECHNIQUES DE POINTE AIENT ÉTÉ UTILISÉES AFIN D'OBTENIR LE NIVEAU MAXIMAL DE COMPATIBILITÉ DE FONCTION, DE RÉSISTANCE, DE DURABILITÉ ET DE CONFORT, IL N'EST PAS GARANTI QUE L'UTILISATION DE CE PRODUIT PRÉVIENNE TOUTE BLESSURE.