



DONJOY

Housse de Protection

Indications :

- **Housse de protection pour plâtres, pansements ou plaies.**
- Botte ou gant hydrofuge totalement imperméable à l'eau.
- Protège le membre même lors d'une immersion totale.
- Facilite la toilette (bain ou douche).

Caractéristiques :

- **Disponible en 3 tailles (HP1 à HP3) et en Taille Enfant pour les "HP1" et "HP2".**
- Réutilisable environ 50 fois.
- Non stérilisable.
- Lors de l'immersion totale, bien chasser l'air au préalable.
- N'adhère pas à l'épiderme.
- Lavable.
- Réutilisable.
- **Modèle bilatéral.**

Désignation	Prise de mesure	Code article	Code ACL
Membres inférieurs			
Taille Unique	-	HP2	3401073943961
Taille Enfant	-	HP2E	3401079539212
Membres supérieurs			
Taille Unique	-	HP1	3401073943732
Taille Enfant	-	HP1E	3401079539151
Coude Genou			
Taille Unique	-	HP3	3401078346712

Fabricant : IPA

Prescrire : Housse de Protection Donjoy



HOUSSE DE PROTECTION

MEMBRE SUPERIEUR / MEMBRE INFERIEUR

HP1 - HP2 - HP3

DONJOY

Lire attentivement la totalité des instructions suivantes avant d'utiliser le dispositif. Une mise en place correcte est indispensable au bon fonctionnement du dispositif.

TYPE DE PRODUIT

HP1 : Housse de Protection du membre supérieur

HP2 : Housse de Protection du membre inférieur

HP3 : Housse de Protection Genou + Coude
Pour un usage individuel

CARACTÉRISTIQUES

- Housse de protection pour plâtres, pansements ou plaies.
- Botte ou gant hydrofuge totalement imperméable à l'eau.
- N'adhère pas à l'épiderme.
- Lavable et réutilisable.
- Modèle bilatéral.
- Existe aussi en Taille Enfant pour les HP1 et HP2.

USAGE / INDICATIONS

- Protège le membre même lors d'une immersion totale. Facilite la toilette (bain ou douche).
- Réutilisable environ 50 fois.
- Lors de l'immersion totale, bien chasser l'air au préalable.

PRECAUTIONS / CONTRE-INDICATIONS

- Prendre garde aux risques de glissades lors de l'utilisation de la housse de protection, en particulier sur surface humide.
- Non stérilisable.

TAILLES ET PRISE DE MESURE

Taille unique / Taille pédiatrique

ENTRETIEN

- Laver à la main dans de l'eau froide avec un savon doux et rincer abondamment. Ne pas utiliser d'agent blanchissant.
- Sécher à l'air libre. Ne pas sécher au sèche-linge. Ne pas nettoyer à sec. Ne pas repasser.



GARANTIE

DJO réparera ou remplacera tout ou une partie du produit ou de ses accessoires pour tout vice de fabrication ou de main-d'œuvre pendant une durée de six mois suivant la date d'achat.

INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE

La housse de protection permet de protéger plâtres et bandages de manière imperméable. Pour prendre une douche ou un bain, il suffit d'enfiler la housse par-dessus le plâtre ou le bandage.

- 1 - Ouvrir délicatement la membrane - dans le sens horizontal - et introduire la jambe ou l'avant-bras, selon le modèle de housse utilisé.



- 2 - Enfiler la housse de protection de façon à couvrir complètement le plâtre ou le bandage.



Utilisée correctement, la housse de protection est garantie pour une cinquantaine d'utilisations.



Pour le bain
Plonger le membre doucement dans l'eau et chasser l'air en écartant légèrement la membrane d'étanchéité jusqu'à ce que la housse adhère au membre protégé.



Remarque

La housse de protection du membre inférieur est équipée de coussins anti-dérapants. Vérifier que ceux-ci sont correctement plaqués au sol, la housse étant particulièrement glissante sur une surface humide, ceci dû à sa composition.

IMPORTANT

Bien que tous nos efforts se soient portés sur l'utilisation de techniques de pointe afin d'obtenir un niveau optimal de fonctionnalité, de résistance, de durabilité et de confort, il n'est pas garanti que l'usage de ce produit préviene tout préjudice corporel.



DJO FRANCE S.A.S.
Centre Européen de Fret
64990 Mouguerre
T : 05 59 52 86 90
F : 05 59 52 86 91



13-6417_Rev A