

## DRAP DE TRANSFERT

### RÉFÉRENCES :

SIIM108 / SIIM130 / SIIM160 / SIIM82 /  
SIIM130DR / SIIM160DR / SIIM0077 /  
SIIM001201 / SIIM00130 / SIIM00170



Le drap de transfert MULTIGLIDE® est indispensable pour rehausser ou mobiliser confortablement un patient atone. Il est traité face externe pour adhérer au patient et face interne pour glisser.

Inséré sous le patient, l'effet de glisse allège la charge de travail des soignants et contribue à la prévention des escarres. MULTIGLIDE® s'utilise sur tous types de couchages.

Il se décline en deux versions :

- **Imperméable pour un usage multi patients**
- **Perméable pour un usage mono-patient**



## LES PRODUIT

La large surface de glisse des draps MULTIGLIDE® est **la plus adaptée à la mobilisation au lit.**

Il contribue à **la prévention des escarres** en évitant les cisaillements.

Le drap de transfert MULTIGLIDE® permet de **prévenir les lombalgies** en allégeant de 60% l'effort des soignants.

Une **qualité expertisée** depuis 25 ans.

© NFCA Pictures




VISIONNEZ NOS VIDÉOS SUR LA CHAÎNE ALTER ECO SANTÉ

YouTube



VOTRE CONSEILLER

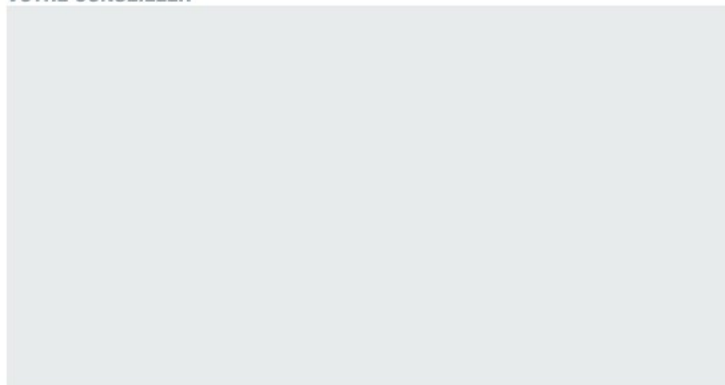

**ALTER ECO SANTE**

7 IMPASSE PRADIÉ — 31270 VILLENEUVE TOLOSANE — FRANCE

TÉL. 05 34 46 03 76 / FAX 05 34 46 13 65

CONTACT@ALTERECOSANTE.NET / WWW.ALTERECOSANTE.NET

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

## FICHE TECHNIQUE

| REF        | Désignation  | Dimensions Surface                  | Poids | N° Identification UDI |
|------------|--|-------------------------------------|-------|-----------------------|
| SIIM108    | Drap MULTIGLIDE® Collectivité. Multi Patients imperméable.                 | 108 x 80 cm<br>0,86 m <sup>2</sup>  | 180 g | 05708012000319        |
| SIIM130    | Drap MULTIGLIDE® Collectivité. Multi Patients imperméable.                 | 130 x 80 cm<br>1,04 m <sup>2</sup>  | 200 g | 05708012000302        |
| SIIM160    | Drap MULTIGLIDE® Collectivité. Multi Patients imperméable.                 | 160 x 80 cm<br>1,28 m <sup>2</sup>  | 200 g | 05708012000296        |
| SIIM82     | Drap MULTIGLIDE® Collectivité. Multi Patients imperméable.                 | 200 x 70 cm<br>1,4 m <sup>2</sup>   | 200 g | 05708012000289        |
| SIIM130DR  | Drap MULTIGLIDE® Collectivité. Multi Patients imperméable avec 2 dragones. | 130 x 80 cm<br>1,04 m <sup>2</sup>  | 200 g | 05708012000272        |
| SIIM160DR  | Drap MULTIGLIDE® Collectivité. Multi Patients imperméable avec 2 dragones. | 160 x 80 cm<br>1,28 m <sup>2</sup>  | 200 g | 05708012000265        |
| SIIM0077   | Drap MULTIGLIDE® Collectivité. Mono Patient.                               | 72 x 70 cm<br>0,55 m <sup>2</sup>   | 180 g | 05708012375080        |
| SIIM001201 | Drap MULTIGLIDE® Collectivité. Mono Patient.                               | 130 x 90 cm<br>1,17 m <sup>2</sup>  | 200 g | 05708012003174        |
| SIIM00130  | Drap MULTIGLIDE® Collectivité. Mono Patient.                               | 130 x 80 cm<br>1,4 m <sup>2</sup>   | 200 g | 05708012000241        |
| SIIM00170  | Drap MULTIGLIDE® Collectivité. Mono Patient bariatrique.                   | 140 x 120 cm<br>1,68 m <sup>2</sup> | 200 g | 05708012003181        |

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>PRODUIT :</b>                    | MULTIGLIDE®       |
| <b>DESCRIPTION COURTE :</b>         | DRAP DE TRANSFERT |
| <b>RÉFÉRENCES :</b>                 | VOIR TABLEAU REF  |
| <b>DATE DE MISE À JOUR :</b>        | 17/04/2018        |
| <b>CLASSE DE DISPOSITIF :</b>       | CLASSE 1          |
| <b>GARANTIE* :</b>                  | 2 ANS             |
| <b>N° D'IDENTIFICATION UDI :</b>    | VOIR TABLEAU REF  |
| <b>GÉNÉRATION DE PRODUIT :</b>      | 2                 |
| <b>POIDS :</b>                      | VOIR TABLEAU REF  |
| <b>CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE :</b> | 300 KG            |
| <b>FABRICANT :</b>                  | IMMEDIA           |
| <b>ORIGINE :</b>                    | DANEMARK          |

\* Dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'entretien du fournisseur

|   |   |
|---|---|
| <b>INDICATIONS D'UTILISATION :</b>      | <p>Manutention manuelle par une tierce personne pour les sujets présentant une incapacité de rehaussement ou de mobilisation en position allongée.</p> <p>S'utilise avec l'étiquette à l'extérieur.</p> <p>Doit être placé sous le patient : sous les fesses, les épaules et la tête.</p>   |
| <b>CONTRE-INDICATIONS ET SÉCURITÉ :</b> | <p><b>Ne pas utiliser en dehors des indications d'utilisation précédemment citées.</b></p> <p><b>Après utilisation, le drap MULTIGLIDE® ne doit pas rester ni sur le sol, ni dans le lit.</b></p> <p><b>Ne pas approcher d'une flamme ou d'une source de chaleur importante.</b></p> <p><b>Ne pas laisser un patient seul sur le drap, barrières de protection du lit baissées.</b></p>   |
| <b>HYGIÈNE ET ENTRETIEN :</b>           | <p>LES PRODUITS DE NOTRE GAMME SE CONFORMENT AUX PROTOCOLES DE DÉSINFECTION HOSPITALIÈRE. Protocole de « nettoyage/désinfection et de compatibilité tissu » mis au point par la Société ANIOS.</p> <p><b>Produits prohibés :</b> Solvants, bases, acides, eau de javel, adoucissant et produits abrasifs.</p> <p><b>Produit recommandé :</b> Détergent désinfectant surfaces hautes.</p> <p><b>Le procédé de lavage suivant doit être utilisé :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavage à 80° en machine.</li> <li>• Séchage à 60° maximum.</li> <li>• Lavage à la main, trempage et essuyage.</li> <li>• Pulvérisation d'une solution de détergent désinfectant (essuyage léger avec un papier non tissé, séchage à l'air).</li> </ul> |
| <b>STOCKAGE :</b>                       | <p>Stocker dans un endroit propre et ventilé, à l'abri de l'humidité et de fortes variations de température (+10°C / +30°C).</p>  |
| <b>COMPOSITION :</b>                    | <p>Nylon contre laqué à 160° avec enduction polyuréthane et laquage en fluo carbone.</p>  |
| <b>CONDITIONNEMENT :</b>                | <p>1 sachet contenant 1 drap de transfert MULTIGLIDE® et sa fiche technique.</p>  |
| <b>COULEUR :</b>                        | <p>Vert</p>   |