

INGREDIENTS:

GLYCERIN. AQUA. CARBOMER. SODIUM HYDROXIDE. SODIUM BENZOATE.
ALUMINIUM SUCROSE OCTASULFATE. SODIUM SACCHARIN. ANTHEMIS
NOBILIS FLOWER EXTRACT. CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE. CITRIC ACID.
POTASSIUM SORBATE.

Aphtes – Blessures buccales
APAISE & PROTÈGE

À LA CAMOMILLE – NE PIQUE PAS

Aphtes, blessures, morsures...

Il existe plusieurs origines aux lésions des muqueuses buccales :

- Le port d'appareils orthodontiques
- La consommation de certains aliments
- Le stress...

Ces situations peuvent entraîner un inconfort ou des gênes au quotidien.

Indications:

ELGYDIUM Repair dispositif médical est un gel buccal qui soulage la douleur et favorise la cicatrisation des lésions buccales (aphtes, blessures) chez l'enfant de plus de 3 ans et l'adulte. Ne pique pas.

Comment agit le gel buccal ELGYDIUM Repair ?

Le gel buccal ELGYDIUM Repair, forme une couche protectrice sur la surface de la lésion buccale, générant ainsi une barrière protectrice pour la lésion ciblée tout en créant un environnement hydratant qui contribue au processus de cicatrisation. Le gel buccal soulage et calme la douleur associée aux lésions buccales après 5 minutes d'application.

Contre-indications:








Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 3 ans. Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l'un des composants. En l'absence de données, ne pas utiliser plus de 10 jours et chez les femmes enceintes ou allaitantes.

Mode et précautions d'emploi:


Bien se laver les mains avant et après utilisation. Appliquer 3 fois par jour en fine couche sur les lésions avec un doigt propre. Si les lésions persistent au-delà de 10 jours consulter votre professionnel de santé.

Il est conseillé de ne pas manger ni boire pendant au moins 30 minutes après l'application. Tenir hors de portée des enfants. Bien refermer le tube après chaque utilisation. Ne pas appliquer en même temps qu'un autre traitement buccal sur le même site. En cas de réaction allergique ou d'effets indésirables, arrêter le traitement, rincer à l'eau claire et consulter votre professionnel de santé.

Si vous avez des raisons de croire qu'un incident grave est survenu en lien avec l'utilisation du dispositif, veuillez le reporter à l'autorité nationale et au fabricant.

Signification des symboles/Betekenis van de symbolen/ Bedeutung der Symbole	
 Périemtion après ouverture : 6 mois Houdbaarheid na eerste opening: 6 maanden Haltbarkeit nach der ersten Öffnung: 6 Monate	Dispositif Médical  Medisch Hulpmiddel Medizinprodukt
 Numéro de lot Lotnummer Chargennummer	Date limite d'utilisation  Vervaldatum Haltbarkeitsdatum
 Fabricant Fabrikant Hersteller	Identifiant Unique Dispositif  Unieke hulpmiddelidentificatie Unique Device Identifier
 Consulter la notice d'utilisation Raadpleeg de bijsluiter Lesen Sie die Packungsbeilage	



 **PIERRE FABRE MEDICAMENT**
Les Cauquillous 81500 Lavar - France

Made in France


Pierre Fabre

336830

Pierre Fabre
ORAL CARE