


GIBAUD

# ÉPAULIÈRE CHALEUR

## THERMAL SHOULDER SLEEVE

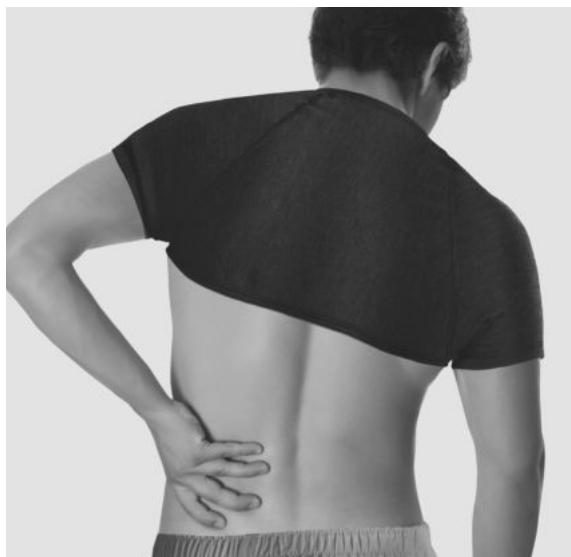

4298

**FR** | Notice d'utilisation

**EN** | Instructions for Use

**IT** | Istruzioni per l'uso

**DE** | Gebrauchsanweisung

Si vous avez le moindre doute concernant les applications et l'utilisation de ce dispositif médical, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin et/ou orthopédiste-orthésiste, pharmacien ou conseiller orthopédique.

### INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier des propriétés adiathermiques de la laine, notamment dans le cas suivant :

- Rhumatisme.

### PERFORMANCE

Isolation thermique et respirabilité.

### CONTRE-INDICATION

Aucune contre-indication n'est connue.

### AVERTISSEMENTS • PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas porter pendant des périodes prolongées sans suivi médical.

L'épaulière ne doit pas être placée au contact direct d'une peau lésée.

Cette épaulière est un dispositif à utiliser sur un seul patient. Ne pas réutiliser sur plusieurs patients.

Si le moindre problème survient pendant l'utilisation de cette épaulière, par exemple douleur ou apparition de signes locaux, retirer le dispositif et contacter votre professionnel de santé.

Si le moindre incident grave survient, en lien avec le dispositif, le professionnel de santé et/ou le patient doivent le signaler au fabricant et à l'autorité compétente dans le pays concerné.

### MISE EN PLACE

Un essai est obligatoire pour une adaptation correcte et une bonne compréhension de la mise en place. La première mise en place sera effectuée par un professionnel de santé et ultérieurement par l'utilisateur ou une personne de son entourage selon le même protocole.

Lors de la mise en place, enfiler un bras, passer l'épaulière dans le dos et enfiler l'autre bras.

### ENTRETIEN, CONSERVATION ET ELIMINATION


Conserver l'épaulière à l'abri d'une source de chaleur excessive.

Laver à la main à l'eau tiède savonneuse (maximum 30°C) ; rincer abondamment ; essorer doucement ; ne pas blanchir ; sécher à plat, loin d'une source de chaleur excessive (ex : radiateur), ne pas sécher en machine ; ne pas repasser ; ne pas nettoyer à sec. Jeter le dispositif et son emballage conformément à la réglementation locale ou nationale en matière d'environnement.



### PRISE DE MESURE ET TABLEAU DES TAILLES

Taille de l'épaulière à choisir en fonction de la distance entre les épaules (en cm).

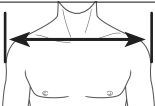	S	M	L
	35-45	45-55	55-65