

ORTHÈSE HALLUX VALGUS

EPITHELIUMFLEX® 02

FONCTIONNALITÉS :


L'orthèse souple de l'hallux valgus permet de réaxer le gros orteil, de limiter la pronation et ainsi d'optimiser la propulsion. Son tendon externe EPITHELIUMFLEX® permet aussi d'absorber les pressions et les frottements sur l'exostose ("oignon"). Enfin, son bracelet métatarsien de contention aide à limiter l'écrasement et l'élargissement de l'avant-pied.

CONSEILS D'UTILISATION :

- Avant tout, vérifier que le gros orteil peut encore bouger latéralement lorsqu'on le manipule. Si ce n'est pas le cas, ne pas utiliser ce dispositif.
- Ne pas utiliser ce produit durant la nuit.
- L'orthèse peut être portée indifféremment sur le pied droit ou le pied gauche.


MISE EN PLACE :

- Passer l'avant-pied dans le bracelet.
- Encapuchonner ensuite le gros orteil.
- Placer la pastille en Epithelium™ (a) en arrière de l'oignon (b). (Voir schéma 1).

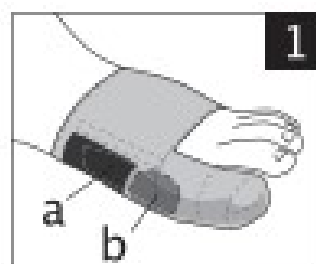

RÉGLAGE :

- Lors de la première utilisation, ne pas essayer de réaxer complètement le gros orteil.
- Lors des 10 premières utilisations, réaxer progressivement le gros orteil en tirant le dispositif vers l'arrière. (Voir schéma 2).

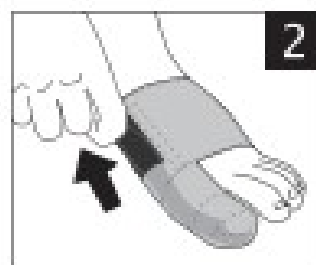

Le dispositif peut être porté quotidiennement pour obtenir une efficacité optimale.

ENTRETIEN :

- Laver en machine à 40°C ou à la main (sans frotter).
- Laisser sécher naturellement. Ne pas repasser.

CONTRE-INDICATIONS :

- Gros orteil non mobile.
- Le produit a fait l'objet de tous les tests réglementaires imposés par la norme ISO10 993-1 concernant les produits venant en contact avec la peau. Si néanmoins une réaction cutanée était observée, il conviendrait de cesser immédiatement l'utilisation et de prévenir la société MILLET Innovation.
- Ne pas utiliser sur une plaie non protégée.
- Cas de personnes souffrant d'artérite, de diabète, de polyneuropathie, de neuropathie des membres inférieurs ou d'ulcères variqueux : ne jamais utiliser le produit sur une plaie, surveiller le pied pendant l'utilisation et demander conseil à votre médecin ou à votre podologue.

COMPOSITION : 52 % silicone, 48 % tissu polyamide/élasthanne.


La responsabilité de la société MILLET Innovation ne peut être engagée en cas d'utilisation non conforme aux recommandations du fabricant.



Lavable en machine à 40°C.



Pas de repassage, ni de vapeur.

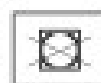

Pas de nettoyage à sec.



Pas de chlorage.



Pas de séchage en machine.

LOT : voir emballage