

PROTECTIONS ANTI-AMPOULES EPITHELIUMTACT 01

FONCTIONNALITÉS :

Les protections EPITHELIUMTACT01 sont constituées d'un gel de silicone auto-adhésif d'1mm d'épaisseur dont les propriétés viscoélastiques sont proches de celles de la peau. Appliquées sur les zones sensibles du pied avant la pratique sportive, elles vont répartir les pressions et absorber les frictions par dissipation de l'énergie dans le gel et ainsi prévenir le risque de formation d'ampoules. Le contact avec la peau est très agréable, la protection se décolle sans douleur même sur les zones pileuses.

CONSEILS D'UTILISATION :

Ces protections sont à utiliser en prévention. Elles sont aussi parfaitement adaptées lorsque l'ampoule est formée mais non percée.

Les protections doivent être utilisées sur une peau propre et sèche.

- Sortir une protection de la pochette métallisée.
- Retirer avec précaution le film protecteur qui recouvre la face collante.
- Appliquer cette face adhésive sur la peau en prenant soin de bien recouvrir la zone à protéger.
- Exercer une légère pression sur la protection pour parfaire l'adhésion.
- Recouvrir la protection de l'adhésif de maintien pour garantir une tenue irréprochable (centrer la protection pour laisser 2 cm d'adhésif sur tout le pourtour).
- Après utilisation, retirer l'adhésif de maintien de la peau et décoller délicatement la protection.
- Déposer la protection sur l'étui de rangement prévu à cet effet et la placer dans le sachet métallisé jusqu'à la prochaine utilisation.

ENTRETIEN :

Tout en conservant leurs propriétés adhésives, les protections sont lavables à l'eau et au savon 4 à 5 fois en moyenne. Ne pas frotter et laisser sécher à l'air libre.

CONTRE-INDICATIONS :

- Le produit a fait l'objet de tous les tests réglementaire imposés par la norme ISO10 993-1 concernant les produits venant en contact avec la peau. Si néanmoins une réaction cutanée était observée, il conviendrait de cesser immédiatement l'utilisation et de prévenir la société MILLET Innovation.
- Ne pas utiliser sur une plaie non protégée.
- Cas des personnes souffrant d'artérite, de diabète, de polynévrite, de neuropathie des membres inférieurs ou d'ulcères variqueux : ne jamais utiliser le produit directement sur une plaie, un mal perforant, surveiller le pied pendant l'utilisation et dans tous les cas demander conseil à votre médecin ou podologue.


COMPOSITION :

- PROTECTION: 84% silicone, 16% tissu polyamide/élasthanne.
- ADHÉSIF DE MAINTIEN: 100% Biocompatible.

La responsabilité de la société MILLET Innovation ne peut être engagée en cas d'utilisation non conforme aux recommandations du fabricant.




Lavable à la main.

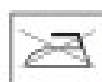

Pas de repassage, ni de vapeur.



Pas de nettoyage à sec.

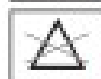

Pas de chlorage.



Pas de séchage en machine.

LOT : voir emballage