

PROTECTIONS ANTI-AMPOULES à l'Epithelium™ Actif

INDICATIONS

Pour protéger la peau, prévenir et soulager les ampoules, les irritations, les brûlures par frottements...

CONTRE-INDICATIONS

- Ne pas utiliser sur une lésion cutanée.
- En cas de réaction allergique ou de réaction irritative importante, arrêter le traitement.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ces protections sont à utiliser en prévention. Elles sont aussi parfaitement adaptées lorsque l'ampoule est formée mais non percée. Les protections doivent être utilisées sur une peau propre et sèche.

- Sortir une protection de la pochette métallisée.
- Retirer avec précaution le film protecteur qui recouvre la face collante.
- Appliquer cette face adhésive sur la peau en prenant soin de bien recouvrir la zone à protéger.
- Exercer une légère pression sur la protection pour parfaire l'adhésion.
- Après utilisation, la déposer sur l'étui de rangement prévu à cet effet et la placer dans le sachet métallisé jusqu'à la prochaine utilisation.

FONCTIONNALITÉS

- L'Epithelium™ actif est un gel auto-adhésif, solidaire de la peau, qui inhibe les frottements à la surface de celle-ci. Ainsi, il protège l'épiderme et soulage les ampoules lorsqu'elles sont déjà formées et non percées.
- Très agréables au contact, ces protections sont repositionnables et se décollent sans douleur même sur les zones pileuses. Elles peuvent être utilisées sur les pieds, dans toutes les chaussures (ville, sport...), mais aussi sur toutes les zones du corps soumises à des frottements (par exemple frottements dus à une couture, une irritation peau contre peau).

Ces protections sont particulièrement recommandées pour les diabétiques.

ENTRETIEN


- Laver après utilisation. Les protections sont lavables à l'eau et au savon. Ne pas frotter et laisser sécher à l'air libre.
- Jeter et remplacer le dispositif dès l'apparition de fissures dans le gel ou de dégradation du tissu.
- Laisser sécher naturellement. Ne pas repasser.

COMPOSITION : 89 % silicone, 11 % tissu polyamide/élasthanne.


En cas de douleurs ou de toute autre réaction inhabituelle, contacter votre médecin. Tout incident grave survenu en rapport avec le produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de santé.

La responsabilité de la société MILLET Innovation ne peut être engagée en cas d'utilisation non conforme aux recommandations du fabricant. Le français est la langue de référence. Marquage CE initial : 2006.


Ref.: 10946-1_06/2023

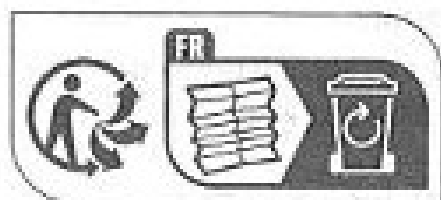

Lavable à la main.

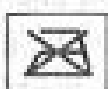

Pas de repassage, ni de vapeur.

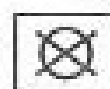

Pas de nettoyage à sec.



Pas de chlorage.



Pas de séchage en machine.

LOT

Voir emballage.



MILLET
INNOVATION



MILLET Innovation ZA Champgrand
26270 Loriol/Drôme - FRANCE

contact@epitact.com

www.epitact.com