

# PROTECTIONS ONGLES BLEUS

## EPITHELIUMTACT 02

### INDICATIONS :

Les protections ongles bleus EPITHELIUMTACT 02 sont constituées d'un gel de silicone ultra résistant d'1 mm d'épaisseur dont les propriétés viscoélastiques sont proches de celles de la peau. Les protections vont donc répartir les pressions et absorber les micro-chocs par dissipation de l'énergie dans le gel et ainsi prévenir tout risque de formation d'ongles bleus ou d'ampoules. Elles soulagent aussi la douleur permettant ainsi de continuer la pratique sportive tout en restant performant.

### CONTRE-INDICATIONS :

- Ne pas utiliser sur une plaie non protégée.
- Cas des personnes souffrant d'artérite, de diabète, de polynévrite, de neuropathie des membres inférieurs ou d'ulcères variqueux : ne jamais utiliser le produit directement sur une plaie, un mal perforant, surveiller le pied pendant l'utilisation et dans tous les cas demander conseil à votre médecin ou podologue.

### CONSEILS D'UTILISATION :

Ces protections sont à utiliser **en prévention**. Elles sont aussi parfaitement adaptées lorsque l'ongle bleu est formé.

Les protections doivent être utilisées sur une peau propre et sèche.

- Pour une mise en place facile, positionner la protection à l'envers, à l'extrémité de l'orteil, puis la dérouler progressivement.
- Ne pas raccourcir la protection, cela nuit à sa solidité.
- Enlever la protection chaque soir pour éviter les risques de macération.
- Placer la protection dans le sachet métallisé prévu à cet effet jusqu'à la prochaine utilisation.

### ENTRETIEN :

Les protections sont lavables à l'eau et au savon. Ne pas frotter et laisser sécher à l'air libre.


**COMPOSITION** : 82 % silicone, 18 % tissu polyamide/élasthanne.

Les matériaux ont fait l'objet d'une évaluation de la biocompatibilité selon la norme ISO 10 993-1 concernant les produits venant en contact avec la peau. Si un incident se produisait, il conviendrait de cesser immédiatement l'utilisation et de prévenir la société MILLET Innovation.

La responsabilité de la société MILLET Innovation ne peut être engagée en cas d'utilisation non conforme aux recommandations du fabricant. Le français est la langue de référence. Marquage CE initial : 2014.




Lavable à la main.

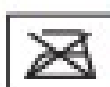

Pas de repassage, ni de vapeur.



Pas de nettoyage à sec.

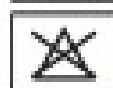

Pas de chlorage.



Pas de séchage en machine.

LOT

Voir emballage.