

PROTECTIONS PLANTAIRES

EPITHELIUMTACT 05


FONCTIONNALITÉS :

Les protections plantaires EPITHELIUMTACT 05 intègrent un gel de silicone de seulement 1.7 mm d'épaisseur qui a été spécialement développé pour répartir efficacement les pressions et absorber les frictions sans créer d'instabilité sous l'avant-pied. Elles soulagent ainsi les douleurs et préviennent les risques d'échauffement, de brûlure, de formation d'ampoules ou de callosités.

CONSEILS D'UTILISATION :

Ces protections sont à utiliser à même la peau.

- Enfiler la protection plantaire et placer la bretelle de maintien entre le gros orteil et le deuxième orteil (1).
- Les picots autobloquants en silicone (face intérieure de la bretelle) doivent se retrouver en contact avec la peau et le maillage en silicone (face extérieure de la bretelle) en contact avec la chaussette.
- Ajuster la position de la protection plantaire à la base des orteils (2) sans trop étirer la bretelle.
- Pour un maintien optimal, ne pas les porter pieds nus mais avec des chaussettes par-dessus. Ne pas appliquer de cosmétiques hydratants avant utilisation.

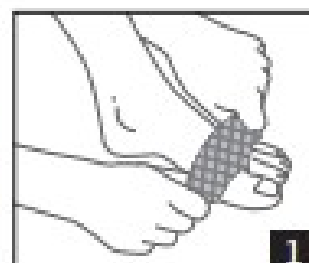

ENTRETIEN :

- Laver en machine à 40° C ou à la main (sans frotter), laisser sécher naturellement. Ne pas repasser.

IMPORTANT ! Pour garantir une bonne tenue, il est nécessaire de laver les protections après chaque utilisation.

CONTRE-INDICATIONS :

- Le produit a fait l'objet de tous les tests réglementaires imposés par la norme ISO 10993-1 concernant les produits venant en contact avec la peau. Si néanmoins une réaction cutanée était observée, il conviendrait de cesser immédiatement l'utilisation et de prévenir la société MILLET Innovation.
- Ne pas utiliser sur une plaie non protégée.
- Cas des personnes souffrant d'artérite, de diabète, de polynévrite, de neuropathie des membres inférieurs, ne pas utiliser le produit.

COMPOSITION : 74 % silicone, 26 % tissu polyamide/élasthanne.

La responsabilité de la société MILLET Innovation ne peut être engagée en cas d'utilisation non conforme aux recommandations du fabricant.



Lavable en machine à 40°C.



Pas de repassage, ni de vapeur.



Pas de nettoyage à sec.



Pas de chlorage.



Pas de séchage en machine.

LOT : voir emballage