

NOTICE D'UTILISATION : BARRE DE REDRESSEMENT POUR LIT

REF 211042

Merci de lire entièrement ces instructions avant d'assembler la barre de redressement et de la fixer au lit.




Description :

Dimensions hors tout : P 82 x l. 47cm. Barre de redressement offrant stabilité et confiance aux personnes ayant des difficultés à entrer ou à sortir du lit. Le cadre est fixé au lit au moyen de sangles d'attaches fournies, garantissant la fixation du dispositif. Structure solide en acier. Poignées antidérapantes en mousse. Prise en main confortable. Aide pour se relever, diminue le risque de chutes dans la nuit. Hauteur ajustable. Facilité de pose.

Contenu du carton :

- A** 2 tubes
- B** 2 tubes coudés
- C** 1 adaptateur en « H »
- D** 1 barrière
- E** 1 barre d'écartement
- F** 2 boulons + 2 rondelles + 1 clé Allen

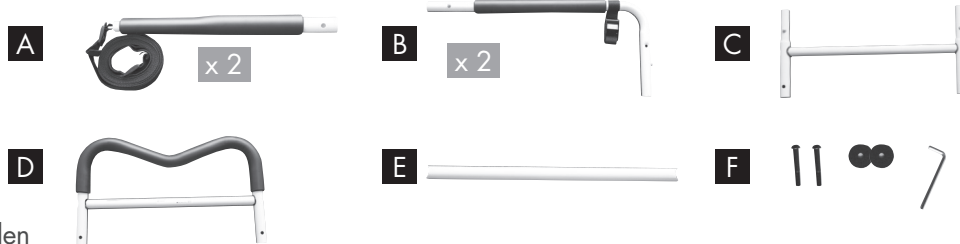


Instructions d'assemblage :




1 Assembler les pièces A et B comme indiqué sur la photo (x 2). Vérifier que les clips soient bien en place.



2 Assembler les pièces C et D comme indiqué sur la photo. Vérifier que les clips soient bien en place.

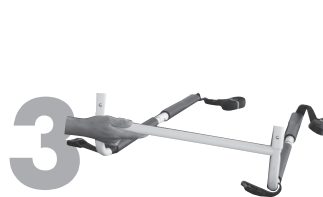

3 Fixer la barre d'écartement (E) comme sur la photo avec les boulons et les rondelles (F).

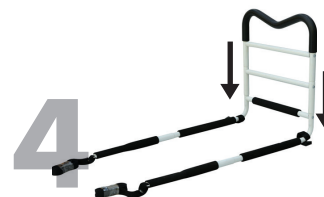

4 Assembler les 2 barres (A+B) avec la partie barrière. Vérifier que les clips soient bien en place.

Fixation de la barre de redressement au lit :

Une fois le matelas retiré du lit, placer la barre de redressement sur le sommier. Positionner la barre là où nécessaire. La barre de redressement est fournie avec un jeu complet de sangles d'attaches pour fixer le dispositif. Ces sangles doivent être passées autour de la largeur du lit. Serrer les sangles et ajuster la position de la barre de redressement si nécessaire, puis replacer le matelas.

Conditions de garantie :

La structure mécanique de ce produit est garantie 2 ans, dans le cadre d'une utilisation normale. Cette garantie exclut toutes les avaries dues à un manque d'entretien, à une mauvaise utilisation ou à un non respect des recommandations émises. La garantie ne s'applique pas à un matériel réparé ou modifié sans l'accord des **Laboratoires Euromedis**. La garantie ne couvre pas l'usure normale des matériaux et des pièces. La garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages ou intérêts directs ou indirects.



Rev 01 - 03.2022



Laboratoires Euromedis
ZA de la Tuilerie
60290 Neuilly Sous Clermont - France
www.laboratoires-euromedis.fr
Contact : sav.mad@euromedis.fr



Foshan Shunkangda Medical Tech co., Ltd
Pingnan Industrial Area, Guicheng
Nanhai District, 528251 Foshan City,
Guangdong P.R. China



Sungo Europe B.V.
Olympisch Stadion 24,
1076DE Amsterdam, Netherlands