

# MÉDI Tulle®

10 x 10 cm

## Compresse de Paraffine

REF 135290

Nous vous recommandons de lire les instructions d'utilisation avec attention avant d'utiliser une compresse Méditulle®

### COMPOSITION

- Support en gaze tissée
- Paraffine (matière hydrophobe)

### CHAMP D'APPLICATION

Les compresses Méditulle® sont utilisées pour les brûlures et la protection des plaies. Elles permettent le libre passage de l'exsudat. Elles sont : douces, non collantes et ne s'effiloche pas

### UTILISATIONS PRÉVUES

- Protection de la plaie contre l'infection
- Utilisation lors des opérations
- Utilisation pendant le traitement des plaies dues aux brûlures

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Utiliser rapidement après l'ouverture de l'emballage
- Jeter après usage • Stocker à l'horizontal

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Après un nettoyage de la blessure ou une désinfection de la plaie, les compresses Méditulle® devront, dans des conditions aseptiques, être disposées sur la blessure à 1 cm de la plaie, en chevauchant celle-ci. Selon le degré de l'exsudat de la plaie, un pansement très ou modérément absorbant est disposé sur la compresse de paraffine. Le temps de présence du pansement sur la plaie dépend de l'indication du médecin et de la situation. La paraffine est généralement absorbée dans les 1 à 3 jours. L'application d'un pansement occlusif doit être évité dans le cas d'une infection et pour éviter de masquer une éventuelle détérioration de la plaie.

*En cas de doute, de douleurs ou d'odeur émanant de la brûlure, veuillez consulter un médecin. La réfection du pansement doit être réalisée par un professionnel de santé suivant la prescription médicale du médecin.*

EC REP

Shanghai International Holding Corp.GmbH (Europe)  
Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany



Zhende Medical Co., Ltd.  
Gaobu Town 312035  
Shaoxing, Zhejiang  
People's Republic of China



Laboratoires Euromédis  
Z.A. de la Tuilerie  
60290 Neuilly sous Clermont - France

# CE 0123



(01)06926515453992  
(17)270319  
(10)22AG030



STERILE R

