

## NOTICE D'UTILISATION : ROLLATOR ALUMINIUM 4 ROUES

REF 216104

Le rollator 4 roues (réf. 216104) est livré avec un panier métallique mobile, deux poignées, un plateau de confort, une assise et deux freins avec poignées ergonomiques. Il s'adapte à la taille de l'utilisateur grâce à ses 2 poignées réglables en hauteur sur 6 positions. Il est facilement pliable et permet d'obtenir un encombrement minimum. Lire attentivement les instructions et les mises en garde avant toute utilisation. Conserver cette notice.

### Caractéristiques techniques :

- Dimension hors tout : P.76 x l.59 x H.86/96 cm
- Dimension entre les deux poignées : 47 cm
- Dimension plié : 30 cm
- Réglage hauteur : 86-96 cm
- Largeur d'assise : 36 cm
- Profondeur d'assise : 33 cm
- Couleur : rouge époxy
- Matière : aluminium
- Poids : 9 kg
- Poids maximum supporté : 130 kg
- Code LPP : **6256108**

### Instruction d'assemblage :

- Le rollator est livré plié.
- Déplier complètement et bloquer avec la sécurité rouge.
- Glisser les deux poignées avec freins dans les tubulures adaptées.
- Ajuster la hauteur des poignées avec les deux écrous étoile et fixer en vissant. Attention : les 2 poignées doivent être positionnées au même niveau.
- Glisser le panier métallique sous le siège. Poser le plateau de confort sur l'assise.
- Retirer les protections en plastique sur les roues.

### Recommandations :


- Ce rollator ne peut être utilisé par des patients dont le poids excède 130 kg.
- L'utilisation de ce rollator sur un sol en pente ou irrégulier est à proscrire sous peine
- La première mise en service doit se faire avec une personne habilitée qui procédera aux réglages pour adapter le produit à la morphologie de l'utilisateur.
- Avant chaque utilisation, vérifier que le rollator est complètement déplié et verrouillé avec la butée centrale, et que les deux poignées sont correctement fixées et solidaires de la base.
- Positionner l'appareil devant soi et tenir les poignées tout en maintenant les freins. Libérer les freins lorsque le corps est en équilibre.
- Pour une station debout prolongée, immobiliser le rollator en poussant le frein vers le bas en position verrouillée.

### Entretien régulier :

- Essuyer le rollator avec un chiffon doux.
- Éliminer systématiquement les salissures en utilisant une solution savonneuse suivie d'un séchage.
- Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ou à base d'eau de Javel qui peuvent endommager ou décolorer le produit.
- Vérifier régulièrement le serrage des poignées et l'efficacité du freinage.
- Seul un technicien habilité peut procéder au remplacement de pièces fournies.

### Conditions de garantie :

La structure mécanique de ce produit est garantie 2 ans, dans le cadre d'une utilisation normale. Cette garantie exclut toutes les avaries dues à un manque d'entretien, à une mauvaise utilisation ou à un non respect des recommandations émises. La garantie ne s'applique pas à un matériel réparé ou modifié sans l'accord des **LABORATOIRES EUROMÉDIS**. La garantie ne couvre pas l'usure normale des matériaux et des pièces. Notre garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages ou intérêts directs ou indirects.

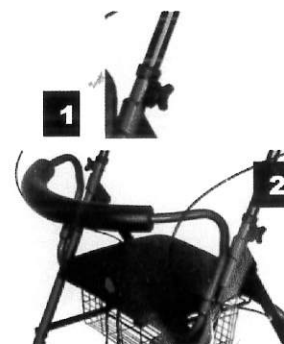

- Fragile
- Conserver à l'abri de l'humidité
- Conserver à l'abri de la lumière du soleil
- Manipuler avec précaution
- Lire la notice avant toute utilisation

- Dispositif médical
- Ne pas utiliser si le carton est endommagé
- Sens de l'emballage
- Marquage CE
- Importateur

- Fabricant
- Mandataire
- Référence
- Respecter les consignes de tri

Laboratoires Euromedis  
ZA de la Tuilerie  
60290 Neuilly Sous Clermont  
France  
www.laboratoires-euromedis.fr  
Contact : sav.mad@euromedis.fr

HEBEI Healthplus  
Medical Device Co., Ltd  
No. 1, Chuangye Street,  
Southwest Industrial District,  
Matou ecological Industry Park  
Handan City, Hebei Province,  
China

Y. Sung Handelsvertretung  
Toulouser Allee 9,  
40211 Duesseldorf, Germany

