

# EUROSET POST-OP

## SET DE PANSEMENT POST-OPÉRATOIRE - 3 SOINS

Set pour le nettoyage, la désinfection et le recouvrement des plaies inférieures à 5 cm suturées non infectées, sans ablations de fils.

### Rappels des règles d'asepsie

- Établir un «plan de travail» afin qu'il y ait un minimum de risques de contaminations extérieures.
- Regrouper sur le plan de travail les solutions et le set de soins à utiliser.
- Vérifier l'intégrité du protecteur individuel de stérilité.
- Préparer le sac à déchets.
- Lavage à l'eau ou désinfection des mains avec une solution hydroalcoolique (non fournie dans le set) avant toute manipulation.










### Précautions d'emploi et contre-indications

- Vérifier l'intégrité du blister avant usage, ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

### Dispositif médical à usage unique.

Le retraitement des dispositifs en vue de leur réutilisation peut nuire gravement à leur intégrité et à leurs performances

### Mode d'emploi

-  1. Se laver les mains selon les recommandations en vigueur.
-  2. Prélever un blister de la boîte ainsi qu'un sac collecteur de déchets. Réunir également la solution de nettoyage de la plaie prescrite. (non fournis dans le set).
-  3. Faire une friction des mains avec une solution hydroalcoolique (non fournie dans le set).
-  4. Ouvrir le blister, retirer le champ. Le déplier et l'installer sur la table.
-  5. Retirer du blister les compresses avec les pinces anatomiques, les disposer sur le champ de soin et ranger les pinces sur les bords du blister avec les pointes vers l'intérieur.
-  6. Retirer le pansement de la plaie et procéder au nettoyage de la plaie à l'aide des pinces avec les compresses imprégnées de la solution prescrite.
-  7. Recouvrir la plaie avec le pansement adhésif stérile. Si 2 pansements sont nécessaires, les appliquer par chevauchement.
-  8. Recouvrir le pansement adhésif par 1 ou 2 pansements adhésifs imperméables stériles pour rendre le pansement étanche et permettre une douche. Prendre le pansement imperméable, enlever les 2 feuilles protectrices de l'adhésif et l'appliquer, puis enlever le film dorsal transparent.
-  9. Rassembler les déchets (hors coupant, piquant et tranchant) dans le sac collecteur.

#### Egalement disponibles :

- Euroset STANDARD REF 173000-1
- Euroset POST-OP - petites plaies REF 174973-1
- Euroset POST-OP - moyennes plaies REF 174974-1
- Euroset POST-OP - grandes plaies REF 174975-1

														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

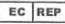
1. Importateur  
2. Fabricant  
3. Mandataire  
4. Référence


5. Dispositif médical  
6. Ne pas réutiliser  
7. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé  
8. Attention particulière

9. Stérilisé avec de l'oxyde d'éthylène  
10. Système de barrière stérile unique  
11. Conserver à l'abri de l'humidité  
12. Conserver à l'abri de la lumière du soleil

13. Lire la notice avant toute utilisation  
14. Respecter les consignes de tri  
15. Marquage CE et numéro de l'organisme notifié du fabricant

 SHAOXING YIBON MEDICAL CO.,LTD.  
No.347 Yuewang Road Paojiang Industrial  
Zone Shaoxing 312000 Zhejiang China

 Obelis s.a  
Bd. Général Wahis 53,  
1030 Brussels, Belgium

 Laboratoires Euromédis :  
Z.A. de la Tuilerie  
60290 Neuilly sous Clermont  
France

 LABORATOIRES  
**Euromedis**