


# Exufiber®

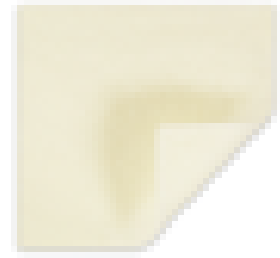

## Pansement gélifiant à base de fibres (compresse et mèche).

### DESCRIPTION

Exufiber® est un pansement stérile, non tissé composé de fibres d'alcool polyvinylique (PVA) ultra-absorbantes issue de la technologie Hydrolock®. Les pansements Exufiber® sont disponibles en format compresse et mèche.

### COMPOSITION



① Fibres de PVA (polyvinyl alcohol)

#### Autres informations :

- Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
- Absence de polychlorure de vinyle
- Absence de phtalate (DEHP)
- Absence de produit d'origine animale ou biologique

### INDICATIONS / DOMAINES D'UTILISATION

Le pansement Exufiber® est prévu pour être utilisé sur un large éventail de plaies exsudatives :

- Ulcères du pied et de la jambe
- Escarres
- Brûlures au deuxième degré
- Plaies chirurgicales
- Sites donneurs

### MODE D'ACTION

Au contact de l'exsudat de la plaie, Exufiber® se gélifie pour faciliter la cicatrisation en milieu humide et le retrait lors du changement de pansement. Exufiber® absorbe et retient l'exsudat de la plaie.

### MODE D'EMPLOI

#### Plaies peu profondes

Nettoyer la plaie avec une solution saline ou de l'eau conformément au protocole de soins en vigueur.

1. Sécher soigneusement la peau périlésionnelle.
2. Choisir la taille de pansement appropriée afin de pouvoir recouvrir entièrement la plaie. Pour de meilleurs résultats, Exufiber® doit déborder sur la peau périlésionnelle d'au moins 1 à 2 cm. Le pansement va gonfler lorsqu'il absorbera les exsudats et commencera à se gélifier, provoquant la contraction du pourtour du pansement.
3. Appliquer un pansement Exufiber® sec sur la plaie.
4. Fixer à l'aide d'un pansement secondaire approprié. Le choix du pansement dépend du niveau d'exsudats.
5. Exufiber® peut être utilisé sous compression.

#### Plaies profondes (cavités, décollements, fistules)

Nettoyer la plaie avec une solution saline ou de l'eau conformément au protocole de soins en vigueur.

1. Sécher soigneusement la peau périlésionnelle.
2. Appliquer la compresse ou la mèche de manière lâche dans la plaie pour laisser suffisamment d'espace en vue du gonflement du pansement. En cas d'utilisation du format mèche, découper la longueur appropriée en la laissant légèrement dépasser de la plaie (2 à 3 cm) pour faciliter le retrait.
3. Recouvrir d'un pansement secondaire approprié. Le choix du pansement dépend du niveau d'exsudats.
4. Fixer (ou recouvrir) à l'aide d'un pansement adhésif ou d'un bandage si nécessaire.

#### Sites donneurs

Prélever les tissus et garantir l'hémostase.

1. Choisir la taille de pansement appropriée afin de pouvoir recouvrir entièrement la plaie. Le pansement Exufiber® doit déborder sur la peau périlésionnelle d'au moins 5 cm. Le pansement va gonfler lorsqu'il absorbera les exsudats et commencera à se gélifier, provoquant la contraction du pourtour du pansement.
2. Appliquer un pansement Exufiber® sec sur la plaie.
3. Recouvrir d'un pansement secondaire approprié. Le choix du pansement dépend du niveau d'exsudats.
4. Fixer (ou recouvrir) à l'aide d'un pansement adhésif ou d'un bandage si nécessaire.

## RENOUVELLEMENT ET RETRAIT DU PANSEMENT :

Changer le pansement Exufiber® lorsqu'il est complètement saturé, aux premiers signes de fuites ou conformément aux pratiques cliniques. Exufiber® peut rester en place jusqu'à 7 jours (14 jours sur les sites donneurs), en fonction de l'état de la plaie et de la pratique clinique.

1. Retirer le pansement secondaire.
2. Retirer le pansement Exufiber® en l'irriguant délicatement, si nécessaire. Toute partie d'Exufiber® non gélifiée s'humidifiera au contact du fluide.
3. Si le pansement se dessèche et devient difficile à retirer, il faut l'humidifier à l'aide d'une solution saline ou avec de l'eau, conformément à la pratique clinique, et le laisser s'imbiber pour pouvoir le retirer facilement. La transformation du pansement Exufiber® en gel peut prendre quelques minutes. Retirer le pansement en l'irriguant délicatement.
4. L'élimination doit être effectuée conformément aux normes environnementales en vigueur.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas utiliser chez les patients présentant une hypersensibilité connue au pansement ou à l'un de ses composants.
- Si une infection se développe pendant l'utilisation du pansement, un traitement médical doit être instauré conformément aux protocoles cliniques locaux. L'infection n'est pas une contre-indication à l'utilisation du pansement Exufiber®.
- Exufiber® est contre-indiqué dans le traitement des plaies sèches, des brûlures du troisième degré.
- Exufiber® est un pansement à usage unique et ne doit pas être réutilisé. Cela risquerait d'entraîner la détérioration du produit ou une contamination croisée pourrait survenir.
- Stérile. Ne pas utiliser si l'emballage intérieur est ouvert ou endommagé. Ne pas restériliser.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

En cas d'incident grave dans le cadre de l'utilisation d'Exufiber®, le signaler à Molnlycke Health Care.

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES (TESTS EN LABORATOIRE)

Propriétés	Méthodes	Valeurs / résultats
Capacité d'absorption sans charge	Norme EN 13726.1 (3.2)	19.92 g/100cm <sup>2</sup>
Capacité d'absorption	Norme EN 13726.1(3.3)	0.21 g/cm <sup>2</sup>
Capacité de rétention	Norme EN 13726.1 (3.3)	18.95 g
Résistance à la traction	T-1117	3,0 N/20mm

## BIOCOMPATIBILITÉ

Tests	Méthodes
Cytotoxicité	ISO 10993-5
Réactivité intra-cutanée	ISO 10993-10
Sensibilisation	ISO 10993-10

## PROPRIÉTÉS

- Doux
- Conformable
- Non sensibilisant
- Découpable
- Capacité élevée d'absorption
- Capacité élevée de rétention
- Peut être ré-humidifié s'il est sec
- Maintien un milieu humide optimal
- Minimise les risques de macération
- Intégrité maintenue même au retrait
- Gel non adhérent à la plaie minimisant la douleur au retrait
- Forme compresse ou mèche pour tous types de plaies (superficielles ou cavitaires)

## CONDITIONNEMENT, STOCKAGE ET PÉREMPTION

### Conditionnement :

#### TRIPLE EMBALLAGE

Protection de la poussière, de l'humidité et des dommages lors du transport et de la manutention.

- Carton de transport – à ouvrir au niveau du magasin
- Boîte intérieure – à ouvrir au niveau du service
- Unité d'emploi – sachet pelable papier/plastique à ouvrir au moment de l'utilisation

### Conditions de stockage :

Conditions normales de température et d'humidité.

**Durée de validité :** 3 ans.

## MARQUAGE CE

Classe IIb.

Certificat numéro 01965, délivré par B.S.I. (British Standards Institute), organisme notifié CE2797.

Date de première mise sur le marché dans l'UE : 2014.

# Exufiber®

## PRÉSENTATION

Unité d'emploi = 1 pansement = 1 pièce (pcs).

Référence labo	Code ACL 13	Code LPPR	Compresse / mèche	Dimensions (cm x cm)	UCD* (pcs)	Carton (pcs)
709 912			Compresse	5 x 10	16	64
709 913			Compresse	10 x 10	16	64
709 914			Compresse	12 x 13	16	64
709 915			Compresse	10 x 20	16	64
709 916			Compresse	20 x 20	10	40
709 917			Compresse	20 x 30	10	40
709 918			Mèche	2.5 x 45	16	64
709 919			Mèche	5 x 40	16	64

\* UCD (Unité Commune de Dispensation) = 1 boîte

## CODE CLADIMED :

- plaques : F51BE01
- mèches : F51BE02

## PRODUCTION ET STÉRILISATION

### Fabricant (au sens de la directive 93 /42/CEE) :

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080,  
S-40252 Göteborg - Suède

### Fabricant certifié EN ISO 13485 :

Certificat numéro MD83345 délivré par B.S.I.

### Lieu de fabrication et stérilisation :

Fabriqué et stérilisé au Royaume-Uni et en Irlande du Nord  
pour le laboratoire Mölnlycke Health Care AB

### Stérilisation à l'oxyde d'éthylène (EtO).

Certificat CE numéro 01965 délivré par B.S.I.

## DISTRIBUTEUR FRANCE

Laboratoire Pharmaceutique  
Mölnlycke Health Care SAS  
CS 70205 - 13 allée du Château Blanc  
59445 Wasquehal Cedex

### Service clients :

Tél : 0800 915 188 - Fax : 0800 915 073

### Renseignements produits :

Tél : 03 20 12 25 55 - Fax : 03 20 12 25 46

### Matéiovigilance :

Mail : [reclamation.qualite@molnlycke.com](mailto:reclamation.qualite@molnlycke.com)  
Tél : 03 20 12 25 59 - Fax : 03 20 12 25 56

[www.molnlycke.fr](http://www.molnlycke.fr)

Mölnlycke Health Care et Exufiber sont des marques et des logos déposés au niveau mondial par la société Mölnlycke Health Care AB ou l'une de ses filiales.

© Copyright (2020) Mölnlycke Health Care.