

Fixodent

PRO PLUS

4 ÉTAPES SIMPLES



**NETTOYEZ
& SÉCHEZ**

1

Nettoyez et séchez votre prothèse dentaire avant d'appliquer la crème adhésive.



APPLIQUEZ

2

Appliquez la crème adhésive en lignes fines et continues comme indiqué, voire moins. Vous devrez probablement effectuer quelques essais avant de trouver la quantité.



Haut



Bas



Prothèse
partielle



**INSÉREZ &
MAINTENEZ**

3

Insérez la prothèse dentaire et maintenez-la en place quelques secondes. Lors de la mise en bouche, si le produit déborde cela signifie que vous en avez trop mis.



**RETIREZ &
RINCEZ**

4

Pour retirer votre prothèse dentaire, rincez votre bouche à l'eau tiède, faites bouger la prothèse jusqu'à ce qu'elle se détache.

FR BE LU CRÈME ADHÉSIVE pour prothèses totales et partielles.

IMPORTANT:

- ✗ • NE PAS utiliser plus de crème adhésive que ce qui est indiqué.
- ✗ • NE PAS utiliser de produit plus d'une fois par jour. Utilisé de façon normale, ce tube doit durer 4 - 5 semaines pour 40g et 6 - 7 semaines pour 57g.
- ✗ • NE PAS utiliser de produit en excès si votre prothèse est mal ajustée.
- ✗ • NE PAS utiliser plus de produit que ce qui est indiqué. Contient du zinc. Consultez un médecin si vous utilisez déjà d'autres produits contenant du zinc.

Vous sentez une gêne? Consultez régulièrement votre dentiste pour contrôler l'ajustement de votre prothèse. Une prothèse qui s'ajuste difficilement peut altérer votre santé.

AVERTISSEMENT: Tenir hors de portée des enfants. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à l'un des ingrédients. Dans l'éventualité peu probable d'un problème suspecté grave avec ce produit, consultez votre dentiste ou votre médecin et signalez-le au fabricant et à l'autorité sanitaire nationale (FR: ANSM; BE: afmps; LU: Ministère de la Santé).

Tenir le bout et le bouchon au sec, afin d'empêcher l'obstruction. Si l'embout s'obstrue, l'ouvrir avec une aiguille.

BARRIÈRE ANTI-PARTICULES

INGREDIENTS: Calcium/Zinc PVM/MA Copolymer (33%), Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Cellulose Gum (20%), Silica, CI 15985, CI 45410.

BARRIÈRE ANTI-PARTICULES FRAÎCHEUR

INGREDIENTS: Calcium/Zinc PVM/MA Copolymer (33%), Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Cellulose Gum (20%), Silica, CI 15985, Menthyl Lactate, Aroma, CI 45410, Sodium Saccharin, Limonene, Cinnamal, Eugenol.

Dispositif Médical Fabriqué en Allemagne pour / Medisch Hulpmiddel/Gemaakt in Duitsland voor /
Medizinprodukt hergestellt in Deutschland für P&G Tech. Centres Ltd, KT13 0XP, UK
FR Tel.: 0800 529 798 (service et appel gratuits) NL Tel.: 0800-4455388
BE Tel.: 0800-14592 LU Tel.: 800 21172

CE 0197



P&G
www.pg.com



ufsbd
UNION FRANÇAISE POUR
LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE



Issue: 2017-11
20189465