

Flamigel®

Indications

Flamigel® est un gel hydroactif colloïdal destiné au traitement des petites plaies, qui favorise la cicatrisation rapide de la peau en couvrant la plaie et en constituant un milieu humide propice à la cicatrisation. **Flamigel®** est utilisé après un traitement au laser thérapeutique et sert à traiter les brûlures superficielles (également celles induites par la radiothérapie) et les petites plaies (par exemple écorchures, coupures). **Flamigel®** peut également être utilisé sur les plaies ouvertes superficielles.

Propriétés

La formule hydroactive colloïdale de **Flamigel®** contribue à apaiser rapidement la douleur causée par les petites plaies grâce à son effet rafraîchissant. **Flamigel®** contribue à créer des conditions de cicatrisation optimales afin d'accélérer le renouvellement des cellules. Ainsi, la plaie cicatrise plus rapidement et le risque de formation de cicatrices est réduit. **Flamigel®** forme une couche protectrice sur la plaie et la protège contre toute contamination externe.

Flamigel® peut être utilisé sur les plaies sèches ou humides :

- Dans le cas d'une plaie sèche, **Flamigel®** hydrate la plaie (effet « hydrogel »). Celle-ci absorbe l'eau contenue dans **Flamigel®**, ce qui favorise la dissolution des tissus nécrosés/lésionnés.
- Dans le cas d'une plaie suintante, l'hydrocolloïde contenu dans **Flamigel®** est activé. Le gel absorbe l'excès d'exsudat et rétablit et maintient l'équilibre hydrique dans la plaie (effet « hydrocolloïde »).

Mode d'emploi

Lavez-vous les mains avant et après le traitement de la plaie. Nettoyez et séchez délicatement la plaie avant d'appliquer le gel.

Retrait du gel :

- Lavez-vous les mains avant et après avoir retiré **Flamigel®**.
- **Flamigel®** peut être retiré simplement et sans douleur à l'aide d'une gaze humide.

Précautions

- Pour usage externe.
- Les effets indésirables tels que les irritations ou les réactions allergiques sont rares.
- N'utilisez pas **Flamigel®** en cas de réaction allergique connue aux parabènes ou à l'un des composants.
- N'utilisez pas **Flamigel®** sur les paupières ou dans les yeux. Si **Flamigel®** entre en contact avec les yeux, rincez-les à l'eau courante et consultez un médecin.
- Pour les plaies très suintantes ou infectées, consultez un médecin avant d'utiliser **Flamigel®** car d'autres traitements complémentaires pourraient être requis.
- Si la plaie enfle, rougit ou devient douloureuse, ou s'il n'y a pas de début de cicatrisation après quelques jours, consultez un médecin.

Arrêtez immédiatement d'utiliser **Flamigel®** si vous remarquez une irritation ou si vous semblez allergique.

En cas d'incident grave lié à ce dispositif ou d'aggravation de vos symptômes, veuillez contacter votre médecin ou pharmacien. Cet incident doit être signalé à Flen Health et aux autorités compétentes de votre pays (le distributeur, voir ci-après, peut vous renseigner à ce sujet). En signalant un incident, vous pouvez aider à fournir de plus amples informations sur la sécurité et l'efficacité de ce dispositif médical.

Conditions de conservation

- Conservez à température ambiante (< 25°C), dans un endroit sec et dans l'emballage d'origine.
- Refermez le tube après utilisation.
- Après ouverture, s'il est rebouché correctement, le tube de **Flamigel®** peut être conservé et utilisé pendant un an.


Pour les brûlures superficielles et les petites plaies (par exemple écorchures, coupures) : Appliquez soigneusement **Flamigel®** sur la plaie (sans frotter) une ou deux fois par jour (en cas de coups de soleil, appliquez deux à six fois par jour). Si nécessaire, recouvrez la plaie d'un sparadrap ou d'un pansement, à changer tous les jours.

Pour les plaies ouvertes superficielles : Appliquez une couche épaisse (5 mm) de **Flamigel®** sur la plaie en évitant les bords de la plaie. Recouvrez **Flamigel®** d'un pansement non adhésif stérile et le maintenir avec de la gaze ou un bandage. Laissez **Flamigel®** aussi longtemps que la structure du gel restera intacte. Lorsque de nouvelles cellules cutanées commencent à se former et que la plaie se referme petit à petit, appliquez une fine couche de **Flamigel®** pour éviter la macération. Si nécessaire, protégez les bords de la plaie.


Plaies ouvertes : changez le pansement tous les jours.




Nettoyer

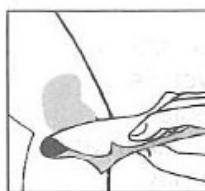

Sécher

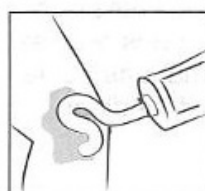

Appliquer

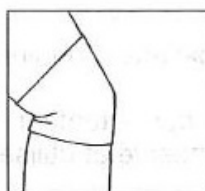

Recouvrir

- N'utilisez pas **Flamigel®** après la date d'expiration indiquée sur l'emballage. La date d'expiration (USE BY: année/mois) fait référence au dernier jour du mois et de l'année indiqué.

Ingrédients

Hydrocolloïde, arginine, eau purifiée, macrogol, acide gras à chaîne ramifiée (BCFA), parahydroxybenzoate de méthyle (E218), parahydroxybenzoate de propyle (E216), EDTA-DiSodium.

Flen Health NV/SA
Blauwesteenstraat 87, 2550 Kontich
Belgique

Viatris Médical
1 bis place de la Défense - Tour Trinity
F 92400 Courbevoie

Date d'apposition du marquage CE : avril 1998.
Date de révision de la notice : février 2023.

0344 Dispositif médical

Peut être utilisé pendant 12 mois après ouverture

gel