



[Fiche technique]

Garrot tourniquet tactique SOF TACTICAL

Réf. 303333 - 303444

Système de serrage et de blocage pour stopper l'hémorragie.

Garrot fabriqué à partir de matériaux de qualité très résistants.

Vis de réglage de sécurité en acier empêchant tout desserrage accidentel de la pression.

Système de blocage double pour une garantie du maintien continu du garrot, même lors de mouvement de la victime.

Spécialement développé pour obtenir une efficacité à l'épreuve de conditions météorologiques difficiles et de la saleté.

Très pratique, peut se poser à une seule main sur soi-même ou sur un patient.

Peut être apposé sur un bandage ou un pansement nécessitant une pression minimum pour arrêter une hémorragie.

Doté d'une étiquette sur la bande permettant de noter l'heure de pose.

Informations complémentaires

Vis de sécurité et boucle revêtues d'un lubrifiant antirouille.

Replié, garrot tourniquet très compact pour être emporté facilement lors d'interventions.

Caractéristiques techniques

Dimensions	Emballé 15.2 x 5 x 5 cm
Matière	Molette de sûreté en acier
Poids	198 g
Classification	Dispositif médical de Classe 1

Références

- Réf. 303444** Garrot tourniquet tactique SOF TACTICAL - Orange
- Réf. 303333** Garrot tourniquet tactique SOF TACTICAL - Noir

MANUEL D'UTILISATION

Garrot tourniquet Tactique Sof Tactical Réf. 303333 - 303444

Conçu pour arrêter un saignement important (hémorragie).

Utilisation du garrot :

- Tendre la sangle.
- Tourner la poignée de torsion jusqu'à ce que l'hémorragie soit contrôlée.
- Verrouiller la poignée à l'aide de l'anneau. Il n'est pas nécessaire de verrouiller les deux extrémités de la poignée.
- Serrer la vis de sûreté.
- Rechercher immédiatement une aide médicale.

Stockage :

- Stocker le garrot dans sa poche avec la sangle de 1 pouce passée dans la boucle rapide et la vis de sûreté légèrement desserrée.
- La boucle est traitée anti rouille mais il est recommandé de huiler occasionnellement la vis de sûreté.