

GC Dry Mouth Gel

POUR APPORTER DU CONFORT EN CAS DE SECHERESSE BUCCALE

GC Dry Mouth Gel est conçu pour apporter du confort aux personnes souffrant de xérostomie. Il est recommandé pour les personnes qui peuvent éprouver des difficultés à manger, à parler ou qui souffrent de l'inconfort dû à la sécheresse de la bouche. GC Dry Mouth Gel est sans sucre et sans alcool.

INDICATIONS

1. Pour apporter aide et confort aux bouches sèches.
2. Pour apporter une couche protectrice aux dents et aux tissus buccaux.
3. Pour aider à contrôler l'halitose.

CONTRE INDICATIONS

1. GC Dry Mouth Gel contient du p-hydroxybenzoate d'éthyle. Ne pas utiliser chez les personnes allergiques aux hydroxybenzoates.
2. Dans de rares cas, ce produit peut entraîner des sensibilités. Si tel est le cas, cessez toute utilisation du produit et consultez un médecin.

MODE D'EMPLOI

1. Utiliser GC Dry Mouth Gel aussi souvent que nécessaire lorsque la bouche paraît sèche. Et cela à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit.
2. Extraire du tube une quantité suffisante de gel directement sur le doigt ou sur un coton tige. Appliquer le gel sur la langue, la muqueuse buccale et/ou les dents.

PARFUMS

Salade de fruits (F), Framboise (R-raspberry), Orange (O), Citron (L-lemon), Menthe (M)

F, R, O, L et M entre parenthèse correspondent aux parfums des tubes.

Ces abréviations sont marquées sur les tubes après les numéros de lot pour indiquer le parfum.

Exemple, 060815F Salade de Fruits

CONSERVATION

Conserver dans endroit frais et sombre, peu humide et à l'abri des rayons direct du soleil (8-25°C)(46,4-77,0°F).

(Péremption : 3 ans à partir de la date de fabrication)

CONDITIONNEMENT

Tube de 40g (35mL).

Pack de 10 tubes (2 parfums de chaque)

ATTENTION

1. Eviter tout contact avec les yeux. En cas de contact, rincer immédiatement avec de l'eau et demander un avis médical.
2. Toujours replacer le capuchon après utilisation et retirer les résidus de pâte ou d'humidité autour du tube ou dans le capuchon.
3. En cas de projection sur les vêtements, laver à l'eau.
4. Toute personne qui suit un traitement médical doit consulter un médecin avant d'utiliser ce produit.
5. Dry Mouth Gel peut être utilisé en combinaison avec GC Tooth Mousse / GC MI Paste ou GC Tooth Mousse Plus / GC MI Paste Plus mais ne doit pas être utilisé avec d'autres produits.