

GC MI Paste Plus

EMULSION TOPIQUE CONTENANT DU CALCIUM, PHOSPHATE ET FLUORURE

Utilisation sous la tutelle d'un professionnel dentaire et selon les recommandations d'utilisation.

DESCRIPTION

GC MI Paste Plus est un crème à base d'eau contenant du RECALDENT™* et du fluorure (CPP-ACPF: Phosphopeptide de Caséine-Phosphate de calcium et Fluorure amorphe). Le niveau de fluorure est de 0,2% w/w (900ppm), ce que l'on trouve en général dans un dentifrice pour adulte. Lorsque CPP-ACPF est appliqué en bouche, il se colle aux biofilms, plaque, bactérie, hydroxyapatite et tissus mous localisant calcium bio-disponible, phosphate et fluorure.

IMPORTANT

La salive va améliorer l'efficacité du CPP-ACPF et le goût stimuler le flux salivaire. Plus le CPP-ACPF et la salive sont maintenus en bouche, plus le résultat sera efficace.

Une pâte topique contenant calcium, phosphate et fluorure bio disponibles :

1. Procure une meilleure protection des dents.
2. Aide à neutraliser les attaques acides des bactéries de la plaque dentaire.
3. Aide à neutraliser les attaques acides d'autres origines internes ou externes.

CONTRE-INDICATIONS

Les phosphopeptides de caséine sont dérivés de la caséine de lait de vache. Ne pas utiliser chez des patients allergiques ou présentant une éventuelle allergie à la caséine du lait de vache et /ou aux conservateurs benzoate.

MODE D'EMPLOI INDICATIONS

- a. A la suite d'un traitement de blanchiment au cabinet.
- b. Après un détartrage à la main ou aux ultrasons et après surfaçage radiculaire.
- c. Après nettoyage dentaire professionnel.
- d. Prévention et contrôle de l'hypersensibilité.
- e. Comme alternative à l'application de fluorure pour les enfants de plus de 6 ans.
- f. Au cours d'un traitement orthodontique.
- g. Pour les patients à haut risque carieux.
- h. Pour soulager les patients souffrant d'érosion, xérostomie ou syndrome de Sjögrens.
- i. Pour patients présentant des exigences particulières.

Application au Cabinet :

I. Application avec un porte empreinte

1. Avant utilisation, rincer abondamment à l'eau courante le porte-empreinte individuel.
2. Appliquer une couche généreuse de GC MI Paste Plus dans le porte empreinte et appliquer sur les dents supérieures et inférieures.
3. Laisser en bouche au minimum 3 minutes.
4. Retirer le porte-empreinte.
5. Demander au patient d'étaler les restes de pâtes avec sa langue. Lui demander de laisser agir aussi longtemps que possible (de nouveau 1- 2 minutes) en évitant de cracher ou d'avaler.
6. Demander au patient de cracher soigneusement et d'éviter de se rincer la bouche. Les restes de GC MI Paste Plus sur la surface des dents se dissiperont progressivement. Demander au patient de ne pas manger ni boire dans les 30 minutes qui suivent l'application.
7. Les résidus de GC MI Paste Plus dans le porte-empreinte doivent être rincés ou brossés sous eau courante aussitôt après utilisation.

II. Application sans porte-empreinte

1. Si nécessaire, retirer les excès de salive de la surface des dents avec une boulette de coton. Toutefois, il n'est PAS nécessaire de sécher les dents avec de l'air comprimé.
2. Appliquer une quantité suffisante de GC MI Paste Plus sur les surfaces des dents avec un tampon, un doigt ganté ou avec une brosse interproximale dans les zones difficile d'accès.
3. Laisser GC MI Paste Plus en place au minimum 3 minutes.
4. Demander au patient d'étaler les restes de pâtes avec sa langue. Lui demander de laisser agir aussi longtemps que possible (de nouveau 1- 2 minutes) en évitant de cracher ou d'avaler. Plus le GC MI Paste Plus et la salive seront maintenus en bouche, plus les résultats seront efficaces.
5. Demander au patient de cracher soigneusement et d'éviter de se rincer la bouche. Les restes de GC MI Paste Plus sur la surface des dents se dissiperont progressivement. Demander au patient de ne pas manger ni boire dans les 30 minutes qui suivent l'application.

Application à domicile:

III. Application quotidienne après le brossage des dents comme recommandée par votre dentiste

1. Appliquer une quantité suffisante de GC MI Paste Plus sur les dents supérieures et inférieures. Une quantité minimum de la taille d'un petit pois doit être appliquée sur chaque arcade. Etaler avec un doigt propre et sec ou un bout de coton. Pour les zones difficiles (entre les dents) utiliser une brosse de nettoyage interproximale enduite de GC MI Paste Plus.
2. Laisser GC MI Paste Plus sur les dents pendant au moins 3 minutes.
3. Puis utiliser votre langue pour étaler le reste de GC MI Paste Plus dans la bouche. Maintenir en bouche le plus longtemps possible (minimum 1-2 minutes) en évitant de cracher ou d'avaler. Plus le GC MI Paste Plus et la salive seront maintenus en bouche, plus les résultats seront efficaces.
4. Cracher soigneusement et si possible, éviter de rincer. Les restes de GC MI Paste Plus sur la surface des dents se dissiperont progressivement. Ne pas manger ni boire dans les 30 minutes qui suivent l'application.

IV. Application nocturne après brossage des dents telle que recommandée par le praticien

Note:

L'utilisation nocturne est particulièrement recommandée pour les patients adultes à haut risque carieux. Traitement non recommandé pour les enfants de moins de 12 ans.

1. Appliquer une quantité suffisante de GC MI Paste Plus sur les dents supérieures et inférieures. Une quantité minimum de la taille d'un petit pois par arcade est conseillé. Le matériau doit être appliqué sur les surfaces des dents avec un doigt propre ou un coton tige. Pour les zones difficiles (entre les dents) utiliser une brosse de nettoyage interproximale enduite de GC MI Paste Plus.
2. Laisser GC MI Paste Plus sur les dents pendant au moins 3 minutes.
3. Puis utiliser votre langue pour étaler le reste de GC MI Paste Plus dans la bouche. Maintenir en bouche le plus longtemps possible (minimum 1-2 minutes) en évitant de cracher ou d'avaler. Plus le GC MI Paste Plus et la salive seront maintenus en bouche, plus les résultats seront efficaces.
4. Cracher soigneusement et si possible, éviter de rincer. Les restes de GC MI Paste Plus à la surface se dissiperont progressivement au cours de la nuit. Ne pas manger ni boire dans les 30 minutes qui suivent l'application.

PARFUMS

Fraise (S), Melon (M), Vanille (V), Menthe (I), Tutti-Frutti (T)

CONSERVATION

Conserver dans une endroit frais et sec et à l'abri des rayons de soleil

(8-25°C)(46,4-77,0°F).

(Péremption : 2 ans à partir de la date de fabrication)

CONDITIONNEMENT

Tube de 40g (35mL)

1. Coffret assortiment
10x40g (2 de chaque parfum: Fraise, Melon, Vanille, Menthe, Tutti-Frutti)
2. Coffret arôme unique
10 tubes de 40g
Vanille, Fraise**, Melon**, Tutti-Frutti**, Menthe**

**Disponible en Europe seulement

3. Recharge
1 tube de 40g de chaque parfum

NOTE

GC MI Paste Plus est une formule unique de CPP-ACP développée à l'école des Sciences dentaires de l'Université de Melbourne, Victoria, Australia.

*RECALDENT est une marque de fabrique utilisée sous licence. La technologie CPP-ACP relève de brevets d'invention enregistrés ou en cours d'homologation en Australie, NZ, Europe, Canada, et USA.

ATTENTION

1. Toujours replacer le capuchon après utilisation et retirer les résidus de pâte et d'humidité autour du flacon et du capuchon.
2. L'utilisation de GC MI Paste Plus n'est pas indiquée pour les patients de moins de 6 ans.
3. L'application nocturne à domicile n'est pas recommandée pour les enfants de moins de 12 ans.
4. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l'eau et consulter un médecin.
5. En cas de projection sur les vêtements, nettoyer à l'eau.
6. Si le moindre symptôme d'angio-oedème est observé, il s'agit probablement d'une sensibilité ou allergie au conservateur benzoate ou de tout autre composant du produit tel que les arômes artificiels. Dès lors, cesser toute utilisation de ce produit et consulter un médecin.

Dernière mise à jour : 07/2008




MANUFACTURED BY
GC CORPORATION

76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

DISTRIBUTED BY
GC CORPORATION

76-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

 EU: GC EUROPE N.V.

Research-Park, Interleuvenlaan 13, B-3001 Leuven, Belgium

TEL: +32. 16. 39. 80. 50.

GC AMERICA INC.

3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.

TEL: +1-708-597-0900

GC ASIA DENTAL PTE. LTD.

19 Loyang Way, #06-27 Singapore 508724

TEL: +65 6546 7588

PRINTED IN JAPAN