

Si vous avez le moindre doute concernant les applications et l'utilisation de ce dispositif médical, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin et/ou orthopédiste-orthésiste, pharmacien ou conseiller orthopédique.

INDICATION

Hernie inguinale réductible uni- ou bilatérale, port pré et / ou post-opératoire.

PERFORMANCE

Le dispositif exerce une pression localisée. L'utilisation du dispositif réduit les symptômes de la hernie.

CONTRE-INDICATION

Hernie incarcerated (non réductible).

AVERTISSEMENTS • PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Le dispositif contient du latex de caoutchouc naturel qui peut causer des réactions allergiques.

Lors du réglage de la sangle, ajuster pour obtenir un serrage ferme mais confortable.

Ne pas porter pendant des périodes prolongées sans suivi médical.

L'orthèse ne doit pas être placée au contact direct d'une peau lésée.

Cette orthèse est un dispositif à utiliser sur un seul patient. Ne pas réutiliser sur plusieurs patients.

Si le moindre problème survient pendant l'utilisation de cette orthèse, par exemple douleur ou apparition de signes locaux, retirer le dispositif et contacter votre professionnel de santé.

Si le moindre incident grave survient, en lien avec le dispositif, le professionnel de santé et/ou le patient doivent le signaler au fabricant et à l'autorité compétente dans le pays concerné.

CARACTERISTIQUES DU DISPOSITIF

Pelotes anatomiques (10,5 x 6 cm).
Sous-cuisses amovibles pour utilisation unilatérale.
Boucles en plastique.

MISE EN PLACE

Un essai est obligatoire pour une adaptation correcte et une bonne compréhension de la mise en place. La première mise en place sera effectuée par un professionnel de santé et ultérieurement par l'utilisateur ou une personne de son entourage selon le même protocole.

Positionner la pelote et les bandages sur les orifices herniaires (hernies réduites) en position allongée. Fermer la partie ceinture et la partie sous-cuisse, ajuster le réglage de la sangle de manière à obtenir un serrage ferme mais confortable. Vérifier l'efficacité du dispositif en position debout, la hernie doit être maintenue par la pelote.

Si la hernie est unilatérale, ne conserver la pelote que du côté de la hernie. Dans ce cas, il est conseillé de garder les deux sous-cuisses.

ENTRETIEN, CONSERVATION ET ELIMINATION

Conserver le dispositif à l'abri d'une source de chaleur excessive.


Laver à la main à l'eau tiède savonneuse (maximum 40°C) ; rincer abondamment ; essorer doucement ; ne pas blanchir ; sécher à plat, loin d'une source de chaleur excessive (ex : radiateur), ne pas sécher en machine ; ne pas repasser ; ne pas nettoyer à sec.

Jeter le dispositif et son emballage conformément à la réglementation locale ou nationale en matière d'environnement.



PRISE DE MESURE ET TABLEAU DES TAILLES

Taille du bandage à choisir en fonction de la circonférence de la taille, mesurée 2 cm au-dessus des crêtes iliaques (en cm).

	1	2	3
	76 - 89	89 - 104	104 - 117