

GIBAUD

CEINTURE CHALEUR THERMAL BELT



4290, 4291, 4292, 4293, 4294, 4295, 4296, 4297

FR | Notice d'utilisation

EN | Instructions for Use

IT | Istruzioni per l'uso

DE | Gebrauchsanweisung

Si vous avez le moindre doute concernant les applications et l'utilisation de ce dispositif médical, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin et/ou orthopédiste-orthésiste, pharmacien ou conseiller orthopédique.

INDICATIONS

Pour les affections pouvant bénéficier des propriétés adithermiques de la laine, notamment dans le cas suivant :

- Lombalgie.

PERFORMANCE

La ceinture thermique soulage les douleurs lombaires.
Isolation thermique et respirabilité.

CONTRE-INDICATION

Aucune contre-indication n'est connue.

AVERTISSEMENTS • PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Le dispositif contient du latex de caoutchouc naturel qui peut causer des réactions allergiques.

Ne pas porter pendant des périodes prolongées sans suivi médical.

La ceinture ne doit pas être placée au contact direct d'une peau lésée.

Cette ceinture est un dispositif à utiliser sur un seul patient. Ne pas réutiliser sur plusieurs patients.

Si le moindre problème survient pendant l'utilisation de cette ceinture, par exemple douleur ou apparition de signes locaux, retirer le dispositif et contacter votre professionnel de santé.

Si le moindre incident grave survient, en lien avec le dispositif, le professionnel de santé et/ou le patient doivent le signaler au fabricant et à l'autorité compétente dans le pays concerné.

MISE EN PLACE

Un essai est obligatoire pour une adaptation correcte et une bonne compréhension de la mise en place. La première mise en place sera effectuée par un professionnel de santé et ultérieurement par l'utilisateur ou une personne de son entourage selon le même protocole.

Lors de la mise en place, enfiler la ceinture par les jambes, la remonter jusqu'à ce que le bas de la ceinture soit positionné au niveau du sillon interfessier, couvrant la zone douloureuse.

ENTRETIEN, CONSERVATION ET ELIMINATION

Conserver la ceinture à l'abri d'une source de chaleur excessive.

Laver à la main à l'eau tiède savonneuse (maximum 30°C) ; rincer abondamment ; essorer doucement ; ne pas blanchir ; sécher à plat, loin d'une source de chaleur excessive (ex. : radiateur), ne pas sécher en machine ; ne pas repasser ; ne pas nettoyer à sec. Jeter le dispositif et son emballage conformément à la réglementation locale ou nationale en matière d'environnement.

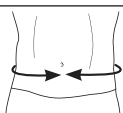


PRISE DE MESURE ET TABLEAU DES TAILLES

La ceinture est disponible en trois hauteurs :

- 20 cm (4290/4291),
- 25 cm (4292/4293/4294/4295/4296),
- 30 cm (4297).

Taille de la ceinture à choisir en fonction de la circonférence de la taille, mesurée 2 cm au-dessus des crêtes iliaques (en cm).

Hauteur (cm)		Circonférence de la taille (cm)				
		S	M	L	XL	XXL
20		61-75	75-90	90-105	105-120	
25		61-75	75-90	90-105	105-120	
30			75-90	90-105	105-120	120-135