

GIBAUD

EQUALIZER®



6717

FR | Notice d'utilisation

EN | Instructions for Use

IT | Istruzioni per l'uso

DE | Gebrauchsanweisung

Si vous avez le moindre doute concernant les applications et l'utilisation de ce dispositif médical, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin et/ou orthopédiste-orthésiste, pharmacien ou conseiller orthopédique.

INDICATIONS

Affections du pied et de la cheville pouvant bénéficier d'une restriction de mouvement, notamment dans les cas suivants :

- Entorses de cheville de grade 2 et 3.
- Fractures stables.
- Lésions des tissus mous.
- Utilisation post-opératoire, traumatologique ou en réadaptation.

PERFORMANCE

La botte de marche offre une immobilisation et/ou une restriction de mouvement de la cheville.

La botte de marche a une semelle incurvée qui permet un déroulé du pied naturel et stable.

Le dispositif a une semelle amortissante.

CONTRE-INDICATION

Aucune contre-indication n'est connue.

AVERTISSEMENTS • PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne retirez pas l'orthèse sans avis médical.

Ce produit a été conçu et testé sur la base d'une utilisation sur un seul patient et n'est pas recommandé pour une utilisation sur plusieurs patients. La botte de marche ne doit pas être placée au contact direct d'une peau lésée.

Si des irritations cutanées se développent, consultez immédiatement un professionnel de santé.

Assurez-vous que le patient effectue des contrôles de sa circulation sanguine. Si une perte de circulation

sanguine est ressentie ou si la botte de marche est trop serrée, relâchez les sangles de fermeture et ajustez-les à un niveau confortable. Si l'inconfort persiste, le patient doit contacter immédiatement son professionnel de santé.

Lorsque la botte de marche est prescrite à des patients atteints de diabète, de déficience vasculaire ou de neuropathie une prudence et une attention supplémentaires sont nécessaires.

Ne retirez pas les coussinets intérieurs en mousse qui adhèrent au plastique de la botte de marche.

En cas de problème avec l'utilisation de ce produit, contactez immédiatement votre professionnel de santé.

L'utilisateur et / ou le patient doivent signaler tout incident grave survenu en rapport avec le dispositif au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et / ou le patient est établi.

CARACTERISTIQUES DU DISPOSITIF

Capitonnage en mousse épaisse de la semelle intérieure, des malléoles et du talon.

Semelle incurvée et large pour favoriser un déroulé du pied naturel et stable.

Semelle amortissante.

MISE EN PLACE

Un essai est obligatoire pour une adaptation correcte et une bonne compréhension de la mise en place.

La première mise en place sera effectuée par un professionnel de santé et ultérieurement par l'utilisateur ou une personne de son entourage selon le même protocole.

1. Retirez le textile en ouvrant les sangles munies de crochets auto-agrippant et retirer la doublure amovible. N'enlevez pas les languettes de traction tout de suite.

PRISE DE MESURE ET TABLEAU DES TAILLES

Taille à choisir en fonction de sa pointure.



Taille	0	1	2	3	4
Pointures (eu)	34 - 36	36 - 39	39 - 44	44 - 46	46 - 49

2. Placez la jambe et le pied dans le capitonnage. Refermez confortablement le textile sur la jambe.
 3. Insérez le pied dans l'orthèse en l'étendant verticalement. N'enlevez pas les languettes de traction tout de suite.
 4. Assurez-vous que les supports sont centrés sur l'os de la cheville (malléoles). La jambe doit conserver un angle de 90° avec le pied.
 5. Enlevez les languettes de traction situées entre les supports et le capitonnage. Ceci permet de fixer le textile dans la bonne position.
 6. Afin de tenir compte du frottement ou de l'espacement, des coussinets en mousse supplémentaires peuvent être placés dans le tissu, entre le tissu et le plastique ou sous les sangles pour plus de confort.
 7. Fixez les sangles munies de crochets auto-agrippant, en commençant par les orteils puis en remontant. Pour une adaptation parfaite, fixez les sangles dans l'ordre.
- Des réglages de sangle peuvent être nécessaires au fur et à mesure de l'évolution des œdèmes du pied, de la cheville et de la jambe.
8. Si cela est prescrit par le professionnel de santé, retirez la jambe du produit

en libérant les sangles de fermeture munies de crochets auto-agrippant et en ouvrant le capitonnage. Tirez le pied et la jambe vers l'avant et l'extérieur, en laissant la partie textile dans l'orthèse. Si le textile s'enlève, suivez les étapes 1-7 pour le remettre en place.

ENTRETIEN, CONSERVATION ET ELIMINATION

Conserver l'orthèse à l'abri d'une source de chaleur excessive.

Laver à la main à l'eau tiède savonneuse (maximum 40 °C) ; rincer abondamment ; essorer doucement ; ne pas blanchir ; sécher à plat, ne pas sécher en machine ; ne pas repasser ; ne pas nettoyer à sec.

Jeter le dispositif et son emballage conformément à la réglementation locale ou nationale en matière d'environnement.

