

# GIBAUD

## LOMBOGIB® MATERNITY



6652/6653

**FR** | Notice d'utilisation

**EN** | Instructions for Use

**IT** | Istruzioni per l'uso

**DE** | Gebrauchsanweisung

**SV** | Bruksanvisning

**NO** | Bruksanvisning

**DA** | Brugsanvisning

**FI** | Käyttöohjeet

**Si vous avez le moindre doute concernant les applications et l'utilisation de ce dispositif médical, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin et/ou orthopédiste-orthésiste, pharmacien ou conseiller orthopédique.**

## INDICATIONS

Pour les affections des lombaires pouvant bénéficier d'un soutien sacroiliaque et suprapubique, notamment dans les cas suivants :

- Douleurs lombaires liées à la grossesse.

## PERFORMANCE

Le dispositif offre un soutien. Le dispositif réduit les douleurs lombaires.

## CONTRE-INDICATION

Aucune contre-indication n'est connue.

## AVERTISSEMENTS • PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Le dispositif contient du latex de caoutchouc naturel qui peut causer des réactions allergiques.

La ceinture ne doit jamais comprimer l'abdomen.

Ne pas porter pendant des périodes prolongées sans suivi médical.

L'orthèse ne doit pas être placée au contact direct d'une peau lésée.

Cette orthèse est un dispositif à utiliser sur un seul patient. Ne pas réutiliser sur plusieurs patients.

Si le moindre problème survient pendant l'utilisation de cette orthèse, retirer le dispositif et contacter votre médecin.

Si le moindre incident grave survient, en lien avec le dispositif, le professionnel de santé et/ou le patient doit le signaler au fabricant et à l'autorité compétente dans le pays concerné.

## CARACTÉRISTIQUES DU DISPOSITIF

Lombogib® Maternity est une ceinture de soutien lombaire élastique et comportant quatre baleines dorsales disposées en forme de V.

Le dispositif se compose de deux parties indépendantes, reliées par un système auto-agrippant.

Un coussin dorsal souple peut être ajouté/ retiré.

La hauteur de la ceinture dans le dos est de 26 cm.

## MISE EN PLACE

Un essai est obligatoire pour une adaptation correcte et une bonne compréhension de la mise en place.

La première mise en place sera effectuée par un professionnel de santé et ultérieurement par l'utilisateur ou une personne de son entourage selon le même protocole.

Lors de l'essai, l'applicateur devra conformer le baleinage en V de l'orthèse pour l'adapter à votre morphologie.

1 - Mesurer le tour de taille au niveau de l'ombilic afin de choisir le soutien abdominal adapté :

- < 100 cm : petit soutien abdominal ;
- > 100 cm : grand soutien abdominal.

2 - Accrocher une extrémité du soutien abdominal à la partie postérieure en faisant attention que tout le système auto-agrippant soit couvert.

3 - Positionner la partie postérieure de la ceinture de façon à avoir les baleines de part et d'autre de la colonne vertébrale.

4 - Positionner le soutien abdominal sous l'abdomen, de façon que la partie morpho-adaptable en V soit centrée sous l'ombilic.

5 - Fermer la ceinture en accrochant la deuxième extrémité du soutien abdominal à la partie postérieure.

6 - Ajuster le soutien abdominal de façon symétrique, pour obtenir un serrage sans compression.

7 - Régler les sangles de rappel pour obtenir un soutien optimisé sans comprimer.

Possibilité de régler en hauteur le coussin lombaire en fonction de la cambrure en le positionnant de façon symétrique à la colonne vertébrale.

## ENTRETIEN, CONSERVATION ET ELIMINATION


Laver à la main à l'eau tiède savonneuse (maximum 40 °C) ; rincer abondamment ; essorer doucement ; ne pas blanchir ; sécher à plat, ne pas sécher en machine ; ne pas repasser ; ne pas nettoyer à sec.

Jeter le dispositif et son emballage conformément à la réglementation locale ou nationale en matière d'environnement.



## PRISE DE MESURE ET TABLEAU DES TAILLES

Produit en taille unique. Pour une circonférence de la taille, mesurée 2 cm au-dessus des crêtes iliaques, de 80-135 cm.

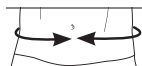

Taille 1

80-135 cm