

6. Disposal

Dispose of this product in accordance with your regional waste disposal regulations.

7. Technical specifications

This product has a 2-year warranty, from the date of purchase, against any manufacturing defect.

This product is biocompatible.

This product is CE certified.

Lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation. Suivre les indications et les conserver précieusement !

1. Consignes de sécurité

- ♥ Toujours consulter votre revendeur spécialisé pour régler le dispositif médical et pour apprendre à l'utiliser de manière appropriée.
- ♥ Ne pas stocker dehors, ne pas laisser au soleil (Attention à ne pas laisser à l'intérieur d'une voiture en plein soleil !!).
- ♥ Stocker dans une pièce sèche, éviter les pièces humides.
- ♥ Stocker les coussins loin d'objets pointus ou tranchants afin d'éviter perforation et déchirure.
- ♥ Vérifier l'absence de perforations et de fuites dans l'enveloppe du coussin avant utilisation.
- ♥ Vérifier la stabilité du coussin et son positionnement correct.
- ♥ Ne pas utiliser lors de températures extrêmes (supérieures à environ 38°C ou 100°F ou inférieures à 0°C ou 32°F).
- ♥ Ne pas modifier ou réparer cet article.
- ♥ En cas de non utilisation prolongée, faites vérifier votre dispositif médical par votre revendeur spécialisé.
- ♥ Respecter la limite de poids indiquée pour chaque article.
- ♥ Respecter les consignes d'utilisation: ne pas s'agenouiller ou se mettre debout sur le coussin.
- ♥ Si vous constatez l'apparition de rougeur sur votre peau, cessez immédiatement l'utilisation du produit et consultez votre médecin.
- ♥ Ce dispositif médical vous a été prescrit par votre médecin, respectez ses consignes : durée et fréquence d'utilisation.
- ♥ En cas d'inconfort, adressez-vous immédiatement à votre médecin.

2. Indication

Il est plus facile de prévenir les escarres que de les traiter. L'apparition d'escarres est consécutive à une hypoxie tissulaire (carence d'apport d'oxygène) provoquée par une pression excessive et prolongée. L'apparition d'escarre peut être évitée en changeant fréquemment le patient de position afin d'éviter une pression excessive sur les zones sensibles, notamment les zones où les os sont proéminents (sacrum, talon).

Il importe aussi de respecter d'autres principes : maintenir l'hygiène de la peau et éviter la macération, observer quotidiennement l'état cutané, suivre une alimentation adaptée. Demander conseil à votre médecin.

Utiliser des supports de prévention adaptés tels que les coussins de positionnement permet de réduire la pression sur les zones sensibles et de positionner correctement le patient dans son fauteuil ou sur son lit par exemple.


3. Descriptif du produit et utilisation

Les coussins sont composés d'une enveloppe contenant des micro billes de polystyrène (PSE) dont le diamètre maximum est de 1mm ou de microfibres siliconées.

Demandez conseil à du personnel spécialisée pour savoir comment utiliser le coussin. Vous pouvez combiner plusieurs coussins afin d'obtenir la position souhaitée.

4. Entretien

Le produit doit être nettoyé régulièrement avec un chiffon propre et sec et un nettoyant ménager non abrasif.

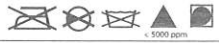

5. Matériaux

La housse est composée de Polyuréthane recouvert de polyester (51% PU et 49% PES) d'un poids total de 140g/m².

6. Traitement des déchets

Mettre au rebut ce produit en conformité avec la réglementation en vigueur.

7. Caractéristiques techniques

Le produit est garanti 2 ans, à partir de la date d'achat, contre tout vice de fabrication.

Ce produit est biocompatible.

Répond à la norme : CE

Bitte lesen Sie aufmerksam die Bedienungsanleitung vor Benutzung. Sichern Sie sich, dass Sie diese Anweisungen befolgen und behalten Sie die in einer sicheren Stelle.

1. Sicherheitsanweisungen

- ♥ Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler oder Krankenpersonal, in die Benutzung und Pflege einweisen.
- ♥ Nicht draußen lagern und nicht in der Sonne lassen (Vorsicht : nicht im Auto lassen bei hohen Temperaturen!!).
- ♥ In einem trockenen Raum liegend lagern, feuchte Räume vermeiden.
- ♥ Halten Sie das Kissen fern von scharfen Gegenständen, Ecken und Kanten, um Durchstöße und Risse zu verhindern.
- ♥ Achten Sie auf Risse in der Hülle vor dem Gebrauch.
- ♥ Vor der Verwendung prüfen Sie, dass das Kissen richtig auf der Sitzfläche positioniert ist.
- ♥ Nicht bei extremen Temperaturen benutzen (> 38°C / 100°F oder < 0°C / 32°F).
- ♥ Es dürfen keine Veränderungen auf dem Produkt vorgenommen werden.
- ♥ Wenn Sie Ihr Kissen lang nicht verwendet haben, lassen Sie es erst von Fachpersonal geprüft werden.
- ♥ Respektieren Sie das Maximalgewicht.
- ♥ Verwenden Sie nur als Kissen und in einem richtigen Weg: nicht auf dem Produkt knien oder treten.
- ♥ Wenn Hautrötungen und Hautbrennen direkt nach der Benutzung auftreten, müssen Sie die Benutzung des Kissens sofort stoppen, und Ihren Arzt oder Therapeuten aufsuchen.
- ♥ Beachten Sie die Hinweise des Fachpersonals, das Ihnen dieses Medizinprodukt vorgeschrieben hat. Beachten Sie die Dauer und Häufigkeit der Verwendung.
- ♥ Wenn Sie sich unwohl fühlen, einen Arzt aufsuchen.

2. Indikationen

Vorbeugen ist leichter als Heilen. Dekubitus bezeichnet eine örtliche begrenzte Nekrose der Haut und manchmal auch des darunter liegenden Gewebes infolge einer Druckbelastung und daraus folgende Unterversorgung der Zellen mit Sauerstoff