



FR

HYGIÈNE DU NEZ - 100 % EAU DE MER - SPRAY NASAL NOURRISSON/ENFANT - Dispositif médical

Quand utiliser HUMER Hygiène du Nez Nourrisson/Enfant ?

HUMER Hygiène du Nez Nourrisson/Enfant est indiqué pour l'hygiène des fosses nasales, en traitement d'appoint ou prévention des pathologies de la sphère ORL, ou pour humidifier la muqueuse nasale en atmosphère sèche chez le nourrisson à partir de 1 mois et l'enfant.

Composition : 100% eau de mer non diluée. Eau de mer naturellement riche en sels minéraux et oligo-éléments.

HUMER Hygiène du Nez Nourrisson/Enfant est une solution isotonique, stérile et sans conservateur.

Mode d'action / Propriétés :

Une solution isotonique est une solution dont la pression osmotique est identique à celle des fluides corporels. L'eau de mer propulsée dans les fosses nasales entre en contact avec la muqueuse nasale, puis est absorbée naturellement par la muqueuse. En humidifiant les mucosités sèches et en fluidifiant les sécrétions nasales, HUMER Hygiène du Nez Nourrisson/Enfant permet un drainage en douceur et facilite le mouchage. Grâce à son diffuseur spécialement conçu, HUMER Hygiène du Nez Nourrisson/Enfant assure confort et utilisation en toute sécurité.

Posologie : 1 pulvérisation dans chaque narine 2 à 3 fois par jour avant le repas (voir mode d'emploi). **Ne pas utiliser le produit plus de 5 jours consécutifs.**

Mode d'emploi :

Le flacon s'utilise dans toutes les positions. Il est recommandé d'effectuer une première pulvérisation d'amorçage avant d'utiliser le produit dans le nez.

NOURRISSON



1. Placer le nourrisson en position allongée, la tête inclinée sur le côté. Introduire délicatement le diffuseur dans la narine supérieure. Effectuer une pulvérisation de 2 à 3 secondes.
2. Renouveler l'opération pour l'autre narine en inclinant la tête de l'autre côté.
3. Redresser la tête du nourrisson pour laisser s'écouler les mucosités. Essuyer le nez à l'aide d'un mouchoir.

Ne jamais effectuer un lavage de nez quand la tête du nourrisson est en arrière afin d'éviter que le liquide ne descende dans la gorge. Ne pas laisser le diffuseur à la portée des enfants.

En France : une question ? contact@humer.fr
En Belgique : une question ? info@urgo.be

 Laboratoires URGO HEALTHCARE
42 rue de Longvic - 21300 Chenôve - France

ENFANT



Quand l'enfant peut se tenir assis et/ou debout, choisir la position la plus confortable.

1. Pencher la tête sur le côté, introduire délicatement le diffuseur dans la narine la plus haute et effectuer une pulvérisation de 2 à 3 secondes.
2. Renouveler l'opération pour l'autre narine en penchant la tête de l'autre côté.
3. Moucher pour évacuer les mucosités.

4. Rincer l'extrémité du diffuseur à l'eau chaude après chaque utilisation.
5. Après usage, remettre le bouchon sur le flacon et ranger dans l'emballage.

Précautions d'emploi :

Usage nasal uniquement. Lire attentivement la notice avant utilisation et respecter le mode d'emploi et la posologie. Doit être appliqué par un adulte pour les moins de 16 ans.

Conservation : Tenir hors de portée et de la vue des enfants.

Attention. Récipient sous pression, peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas perferer ni brûler même après usage. Gaz propulseur inerte non inflammable sans contact avec la solution : azote.

Contre-indications :

Ne pas utiliser chez un nourrisson de moins de 1 mois. **Pour minimiser tout risque d'infection : le même flacon ne doit pas être utilisé par plusieurs personnes.** Ne pas utiliser après la date de péremption ou si le flacon est endommagé.

Effets secondaires :

En l'absence d'amélioration des symptômes dans les 5 jours (persistance du mouchage épais et coloré) ou en cas d'aggravation de la pathologie (apparition de douleur, de fièvre, irritation, brûlure nasale, nausée), consultez votre médecin ou pharmacien.

Tout incident grave lié à ce produit doit être déclaré aux Laboratoires URGO HEALTHCARE et à l'Agence Nationale des Produits de Santé (ANSM - France) ou l'Agence Fédérale des Médicaments et Produits de Santé (AFMPS - Belgique).

150 ml       2460  753245

Date d'apposition du marquage CE : 2022
Dernière révision de la notice : V4 09-2022

STERILE R

Distributeur :

Belgium/Luxembourg: URGO SA/NV - Chaussée de Ruisbroek 76 - 1180 Brussels