

HUMER NEZ BOUCHÉ - 100 % PURE EAU DE MER - SPRAY NASAL

Dispositif médical

Quand utiliser HUMER Nez Bouché ?

HUMER Nez Bouché décongestionne le nez et s'utilise de façon ponctuelle notamment en cas de rhume, sinusite et rhinite allergique, dès 3 mois.

Composition :

100% eau de mer non diluée. Eau de mer naturellement riche en sels minéraux et oligo-éléments. HUMER Nez Bouché est une solution hypertonique, stérile et sans conservateur.

2,5 fois plus concentrée en sels marins*

*En comparaison avec HUMER Hygiène du Nez -

100% eau de mer - spray nasal.

Concentration	
Sodium	> 6400 mg/L
Magnésium	> 1300 mg/L
Potassium	> 220 mg/L
Calcium	> 70 mg/L
Silicium	> 50 mg/L

Propriétés :

Grâce à son hypertonie, HUMER Nez Bouché décongestionne la muqueuse nasale, facilite l'évacuation du mucus épais, aide à évacuer les agents infectieux et allergènes participant ainsi à la protection contre les infections.

Grâce à son diffuseur spécialement conçu, HUMER Nez Bouché assure confort et utilisation en toute sécurité.

Posologie :

• 1 à 2 pulvérisations dans chaque narine 2 à 3 fois par jour avant le repas pour les

nourrissons à partir de 3 mois et les enfants (voir mode d'emploi).

• 1 à 3 pulvérisations dans chaque narine 2 à 3 fois par jour avant le repas pour les

adultes et les enfants à partir de 16 ans (voir mode d'emploi).

Ne pas utiliser le produit plus de 5 jours consécutifs.

Mode d'emploi :

Le flacon s'utilise dans toutes les positions. Il est recommandé d'effectuer une première pulvérisation d'amorçage avant d'utiliser le produit dans le nez.

NOURRISSON



1. Placer le nourrisson en position allongée, la tête inclinée sur le côté. Introduire délicatement l'embout dans la narine supérieure. Effectuer une pulvérisation de 2 à 3 secondes.

2. Renouveler l'opération pour l'autre narine en inclinant la tête de l'autre côté.

3. Redresser la tête de l'enfant pour laisser s'écouler les mucosités. Essuyer le nez à l'aide d'un mouchoir. Ne jamais effectuer un lavage de nez quand la tête de l'enfant est en arrière afin d'éviter que le liquide ne descende dans la gorge. Ne pas laisser l'embout nasal à la portée des enfants.

4. Nettoyer l'embout à l'eau chaude après chaque utilisation.

5. Après usage, ranger le flacon avec son bouchon dans son emballage.

En France : une question ? contact@humer.fr

En Belgique : une question ? info@urgo.be

 Laboratoires URGO HEALTHCARE
42 rue de Longvic - 21300 Chenôve - France

ENFANT/ ADULTE



Quand l'enfant peut se tenir assis et/ou debout, choisir la position la plus confortable

1. Pencher la tête sur le côté, introduire délicatement l'embout dans la narine la plus haute et effectuer 1 pulvérisation de 2 à 3 secondes.

2. Renouveler l'opération pour l'autre narine en penchant la tête de l'autre côté.

3. Moucher pour évacuer les mucosités.

4. Nettoyer l'embout à l'eau chaude après chaque utilisation.

5. Après usage, remettre le bouchon sur le flacon et ranger dans l'emballage.

Précautions d'emploi :

Usage nasal uniquement. Lire attentivement la notice avant utilisation et respecter le mode d'emploi et la posologie. Doit être appliqué par un adulte pour les moins de 16 ans.

Conservation :

Attention. Récipient sous pression, peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas perforez ni brûler même après usage. Gaz propulseur inerte non inflammable sans contact avec la solution : azote. Tenir hors de portée et de la vue des enfants.

Contre-indications :

Ne pas utiliser chez un nourrisson de moins de 3 mois. **Pour minimiser tout risque**

d'infection : le même flacon ne doit pas être utilisé par plusieurs personnes.

Ne pas utiliser après la date de péremption ou si le flacon est endommagé.

Effets secondaires :

En cas de muqueuse fortement irritée, des sensations de picotement peuvent survenir au cours de l'utilisation. En l'absence d'amélioration des symptômes dans les 5 jours (persistance du mouchage épais et coloré) ou en cas d'aggravation de la pathologie (apparition de douleur, de fièvre, maux de tête, nausées, sécheresse, vertiges, épistaxis ...), consultez votre médecin ou pharmacien.

Tout incident grave lié à ce produit doit être déclaré aux Laboratoires URGO HEALTHCARE et à l'Agence Nationale des Produits de Santé (ANSM - France) ou l'Agence Fédérale des Médicaments et Produits de Santé (AFMPS - Belgique).

50 ml        2460  753247

Date d'apposition du marquage CE : 2022
Dernière révision de la notice : V4 09-2022

STERILE R

Distributeur :

Belgium/Luxembourg: URGO SA/NV - Chaussée de Ruisbroek 76 - 1180 Brussels