

ONETOUCH® Delica® Plus

Stylo autopiqueur
Lanzettengerät
Prikpen



Lifescan



AW 07195503B

Le stylo autopiqueur OneTouch® Delica® Plus est principalement utilisé pour le micro-prélèvement de sang pour l'autosurveillance de la glycémie avec les lancettes OneTouch® Delica® et OneTouch® Delica® Plus.

Le stylo autopiqueur OneTouch® Delica® Plus est conçu pour être utilisé par les personnes diabétiques.

Le stylo autopiqueur OneTouch® Delica® Plus facilite et sécurise le prélèvement capillaire d'une goutte de sang sur le bout du doigt.

Avant de l'utiliser, lisez le mode d'emploi.

Le système autopiqueur OneTouch® Delica® Plus n'est pas conçu pour un prélèvement sur d'autres sites de test (AST) et ne doit pas être utilisé pour le prélèvement d'un échantillon sanguin sur l'avant-bras ou la paume de la main.


Le stylo autopiqueur propose 13 réglages de profondeur. Le réglage sélectionné doit permettre l'obtention d'une goutte de sang bien ronde, d'une taille adéquate pour que le lecteur de glycémie puisse fournir un résultat glycémique. (Voir le manuel d'utilisation fourni avec le système pour plus d'informations sur la taille de l'échantillon sanguin requis.)

REMARQUE : Le stylo autopiqueur OneTouch® Delica® Plus utilise les lancettes OneTouch® Delica® ou OneTouch® Delica® Plus. Utilisez une nouvelle lancette stérile pour chaque test. La réutilisation des lancettes peut émousser ou tordre la pointe de la lancette, ce qui est susceptible d'endommager et de marquer la peau et ainsi générer des douleurs.

⚠ MISE EN GARDE :

Conservez le stylo autopiqueur hors de portée des jeunes enfants. Le stylo autopiqueur, l'embout, les lancettes et les disques de protection présentent un risque d'étouffement.

- 1 Bouton déclencheur
- 2 Commande d'armement
- 3 Indicateur de profondeur
- 4 Molette de profondeur
- 5 Embout du stylo autopiqueur
- 6 Disque de protection

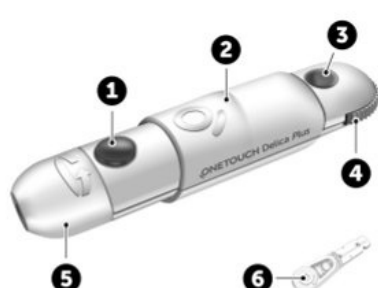

⚠ MISE EN GARDE :

Pour réduire les risques d'infection :

- Avant de procéder au prélèvement, nettoyez le site avec du savon et de l'eau.
- Ne partagez jamais une lancette ou un stylo autopiqueur avec qui que ce soit. Conçu pour être utilisé par un seul patient.
- Utilisez toujours une nouvelle lancette stérile : les lancettes sont à usage unique. **Ne les réutilisez pas.**
- Maintenez votre stylo autopiqueur en parfait état de propreté.
- **N'utilisez pas** les lancettes si la date de péremption imprimée sur l'emballage est dépassée.

Préparation du stylo autopiqueur

1. Retirez l'embout du stylo autopiqueur

Retirez l'embout du stylo autopiqueur en le dévissant et en le tirant d'un coup sec.



2. Insérez une lancette stérile dans le stylo autopiqueur

Alignez la lancette selon l'illustration ci-contre, pour qu'elle entre dans le porte-lancette. Enfoncez-la dans le stylo autopiqueur jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et soit bien en place.





Tournez le disque protecteur sur un tour complet jusqu'à ce qu'il se détache de la lancette. **Mettez-le de côté pour le retrait et l'élimination de la lancette.** Voir *Retrait de la lancette usagée*.



3. Remettez l'embout du stylo autopiqueur en place

Remettez l'embout sur le stylo autopiqueur et vissez-le ou enfoncez-le d'un coup sec en place.

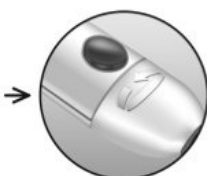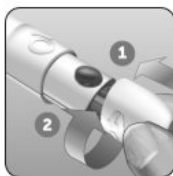


Vérifiez le bon alignement de l'embout, comme illustré sur l'image.



4. Ajustez le réglage de la profondeur

Le stylo autopiqueur propose 13 réglages de profondeur (chaque point situé sur la molette de profondeur, numéroté de 1 à 7, correspond à un réglage de profondeur). Tournez la molette pour régler la profondeur. Les chiffres les plus petits correspondent à des piqûres superficielles, les plus grands à des piqûres plus profondes.

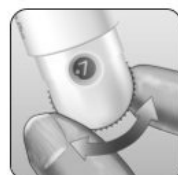

REMARQUE : Essayez d'abord un réglage pour une piqûre superficielle et augmentez la profondeur jusqu'à ce que vous puissiez obtenir un échantillon sanguin de taille adéquate (voir le mode d'emploi du lecteur de glycémie).

5. Armez le stylo autopiqueur

Ramenez la commande d'armement jusqu'au déclic. Si aucun déclic ne se fait entendre, il est possible que le stylo autopiqueur ait été armé au moment de l'insertion de la lancette.



Prélèvement d'un échantillon sanguin sur le bout du doigt

Changez de site de prélèvement pour chaque test. Des piqûres répétées au même endroit peuvent occasionner des douleurs et des callosités.

Avant d'effectuer un test, lavez-vous les mains et nettoyez le site de prélèvement avec de l'eau chaude et du savon. Rincez-les et séchez-les complètement. Toute contamination de la peau peut affecter les résultats.

1. Piquez votre doigt

Maintenez fermement le stylo autopiqueur contre le côté de votre doigt. Appuyez sur le bouton déclencheur. Retirez le stylo autopiqueur du doigt.



2. Obtenez une goutte de sang bien ronde

Appuyez sur le bout du doigt et/ou massez-le doucement jusqu'à la formation d'une goutte de sang bien ronde.



REMARQUE : Si le sang s'étale ou coule, **n'utilisez pas** cet échantillon. Essayez le site de prélèvement et appuyez doucement sur votre doigt jusqu'à l'obtention d'une autre goutte de sang ou piquez à un autre endroit.



Application de l'échantillon sanguin


Appliquez l'échantillon sanguin selon les instructions du manuel d'utilisation du lecteur de glycémie ou du système autopiqueur.

Retrait de la lancette usagée

REMARQUE : Ce stylo autopiqueur comporte une fonction d'éjection ; vous n'avez donc pas besoin de tirer sur la lancette usagée.


1. Retirez l'embout du stylo autopiqueur

Retirez l'embout du stylo autopiqueur en le dévissant et en le tirant d'un coup sec.

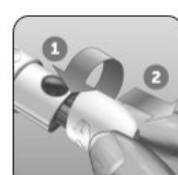

2. Recouvrez l'extrémité exposée de la lancette

Avant d'enlever la lancette, placez le disque de protection de la lancette sur une surface dure, puis enfoncez l'extrémité de la lancette dans la face creuse du disque.

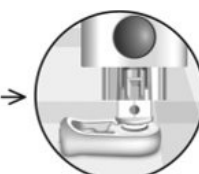


3. Éjectez la lancette

En maintenant fermement le stylo autopiqueur vers le bas, faites glisser la commande d'armement vers l'avant jusqu'à ce que la lancette sorte du stylo autopiqueur. Si la lancette n'est pas correctement éjectée, armez le stylo une nouvelle fois, puis glissez la commande d'armement vers l'avant jusqu'à ce que la lancette sorte.



4. Remettez l'embout du stylo autopiqueur en place

Remettez l'embout sur le stylo autopiqueur et tournez-le ou enfoncez-le d'un coup sec en place.

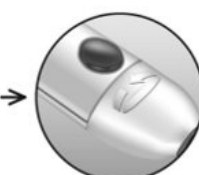

Vérifiez le bon alignement de l'embout, comme illustré sur l'image.



Prenez quelques précautions pour éliminer la lancette usagée après chaque utilisation, afin d'éviter de vous blesser accidentellement avec l'aiguille. Les lancettes usagées peuvent être considérées comme des déchets biologiques dangereux dans votre pays. Veillez à suivre les recommandations de votre professionnel de santé ou les réglementations locales en vigueur pour les éliminer comme il convient.

Rangement du stylo autopiqueur

Le stylo autopiqueur ne fait l'objet d'aucune condition de rangement spécifique. Rangez-le dans l'étui de transport fourni avec le système.

Nettoyage du stylo autopiqueur et de l'embout

Référez-vous au guide ou au manuel d'utilisation fourni avec le lecteur de glycémie pour obtenir des informations sur le nettoyage et la désinfection. S'il n'y a aucune instruction concernant ce stylo autopiqueur et embout dans le guide ou manuel d'utilisation, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

Pour nettoyer ces éléments, essuyez-les à l'aide d'un chiffon doux humidifié avec de l'eau et un détergent doux. **N'immergez pas** le stylo autopiqueur dans un liquide.

Pour désinfecter ces éléments, préparez une solution composée d'un volume d'eau de Javel dilué dans neuf volumes d'eau. Essuyez le stylo autopiqueur avec un chiffon doux humidifié avec cette solution. Immergez **uniquement l'embout** dans cette solution pendant 30 minutes. Après la désinfection, rincez brièvement à l'eau et laissez sécher à l'air libre.*

*Suivez les instructions du fabricant en ce qui concerne la manipulation et le stockage de l'eau de Javel.

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS VOUS :

Notre but est de fournir à nos clients des produits de soins de qualité et un service clients dévoué. Si vous n'êtes pas pleinement satisfait par ce produit, le produit cesse de fonctionner, une panne se produit, ou si vous avez des questions concernant l'utilisation d'un produit OneTouch®, contactez le service client. Contactez le Service Clients - Service et appel gratuits France : Du lundi au samedi, de 8h à 20h au 0 800 459 459 - www.gammeOneTouch.fr. Belgique / Luxembourg : Du lundi au vendredi de 9h à 17h, BE: 0800-14660 www.OneTouch.be / LU: 800-25749 - www.OneTouch.lu. S'il est impossible de joindre le service clients, demandez conseil à un professionnel de santé.

Si un incident grave se produit durant l'utilisation du stylo autopiqueur OneTouch® Delica® Plus, contactez immédiatement le service client. Contactez le Service Clients - Service et appel gratuits France : Du lundi au samedi, de 8h à 20h au 0 800 459 459 - www.gammeOneTouch.fr. Belgique / Luxembourg : Du lundi au vendredi de 9h à 17h, BE: 0800-14660 www.OneTouch.be / LU: 800-25749 - www.OneTouch.lu. Contactez également votre autorité compétente locale. Vous trouverez les informations de contact pour votre pays à l'adresse suivante : <https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts>

Un incident grave est un incident qui a ou aurait pu conduire aux résultats suivants :

- Le décès d'un patient, d'un utilisateur ou d'une autre personne ;
- La détérioration grave temporaire ou permanente de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'une autre personne ; ou
- Une menace grave pour la santé publique.

Description des symboles

Pour obtenir une description complète de tous les symboles utilisés, veuillez vous référer au guide d'utilisation fourni avec votre système.



Avertissements et mises en garde : Référez-vous au manuel d'utilisation et aux notices accompagnant votre système pour des informations relatives à la sécurité.



Consulter le mode d'emploi



Fabricant



Représentant autorisé dans l'Union européenne



Ne pas réutiliser



Stérilisé par irradiation



Ne pas jeter avec les déchets ordinaires



Date de péremption



Dispositif médical



Numéro de lot