

# BOITE ASEPTONET

100 LINGETTES DÉSINFECTANTES POUR SURFACES,  
PETIT MATÉRIEL, DISPOSITIFS MÉDICAUX.

Dispositif médical classe IIa.



## DESTINATIONS

Nettoyage et désinfection:

- des dispositifs médicaux non-invasifs et non-immmergeables (petit matériel en milieu médical et dentaire).
- Surfaces dures non poreuses en milieu médical et dentaire.

## FORMULE

Tolérance testée sous contrôle dermatologique.  
Parfum : menthol.

Actifs: Ethanol (CAS 64-17-5) (<3%),  
Dimethylbenzylammonium chloride (CAS 7173-51-5),  
Propan-2-ol (CAS 67-63-0) (<1%).

## MODE D'EMPLOI

Produit prêt à l'emploi à usage unique.  
Le rinçage est inutile, sauf si le dispositif médical est susceptible d'être en contact avec les muqueuses.  
Soulever le couvercle et retirer l'opercule d'étanchéité.  
Insérer la lingette centrale à l'intérieur du capot.  
Bien refermer le couvercle après utilisation.  
Laisser agir entre 1 et 15 minutes selon l'efficacité antimicrobienne recherchée.

## PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES A 20°C

BACTÉRICIDE	EN1276*, EN13727**, EN13697*, EN14561**	5 min
LEVURICIDE	EN1650*, EN13624**, EN13697**, EN14562**	5 min
FONGICIDE	EN14562** sur Aspergillus Fugimatus.	5 min
TUBERCULOCIDE	EN14348**, EN14563** sur Mycobacterium Terrae.	15 min
ACTIF SUR VIRUS	EN14476 sur HBV, HCV, Adenovirus, Coronavirus, Norovirus, RSV, H1N1, HSV-1, Polyomavirus**.	1 min
	EN14476** sur Rotavirus.	15 min

\*3g/L albumine bovine + 3mL/L érythrocytes de mouton, \*\* 3g/L albumine bovine

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Produits destinés aux professionnels.  
Éviter le rejet dans l'environnement.  
Aucun pictogramme de danger.  
En cas d'incident, contact le CAP le plus proche (01.45.42.59.59). Consulter la fiche de données de sécurité au préalable.

## CONDITIONNEMENTS

REF : ASEPO001

Boîte de 100 lingettes 130 x 200mm.  
Carton de 12 boîtes.  
Palette de 90 cartons.

REF : REFILL

Recharge de 100 lingettes 130 x 200 mm.  
Carton de 12 recharges.  
Palette de 133 cartons.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Durée d'utilisation après ouverture : 3 mois.

Langues : français, anglais, espagnol, portugais, italien.  
Consignes de tri : Emballage complet à mettre dans la poubelle de tri (boîte, capot, étiquette).

EAN13 : 3468080785588 (boîte) / 3468080785281 (recharge)  
Produits fabriqués en France.