



# Lomatuell® Pro

Interface gélifiante

## fr Mode d'emploi

### Description du produit et caractéristiques de performance

Lomatuell® Pro est un pansement non adhésif, souple avec une structure maillée ouverte offrant une bonne évacuation de l'exsudat dans le pansement secondaire (pansement réticulé). Le produit est composé d'une trame en tulle synthétique, imprégnée d'une matrice en polymère contenant un corps gras et des particules hydrocolloïdes. Au contact de fluides, les particules hydrocolloïdes forment un gel qui, avec la vaseline, constitue une couche amphiphile (hydrophile-lipophile). L'adhérence à la plaie est évitée en grande partie, la cicatrisation est favorisée et le changement de pansement atraumatique est rendu possible. Lomatuell® Pro peut être combiné avec le traitement par pression négative sous forme de pansement réticulé\* (plaies superficielles) et être utilisé dans toutes les phases d'exsudation. Le produit peut être utilisé des deux côtés. Il est en outre possible de le découper pour l'ajuster à diverses tailles de plaies et de zones corporelles.

\*sur base d'études in vitro

### Composition du produit

Vaseline, huile blanche médicale, polyester (polyéthylène téréphtalate), carboxyméthyle cellulose sodique, caoutchouc de synthèse, antioxydants pentaérythritol tétrakis (3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate)

### Utilisation prévue

Lomatuell® Pro est une trame en tulle imprégnée à larges mailles qui protège les plaies superficielles des adhérences et favorise l'évacuation de l'exsudat.

### Indications

Lomatuell® Pro convient pour les indications suivantes :

#### Plaies chroniques :

- ulcère variqueux,
- ulcères du pied diabétique,
- escarres.

#### Plaies aiguës :

- lacérations, coupures et écorchures,
- brûlures au second degré.

#### Plaies post-chirurgicales :

- plaies chirurgicales en cours de cicatrisation secondaire,
- sites donneurs de greffe.

### Contre-indications

Allergie et/ou hypersensibilité connue à l'un des composants du produit.

### Effets indésirables

Des irritations cutanées et/ou des allergies peuvent survenir dans de très rares cas.

### Mise en garde et mesures de précaution

Lomatuell® Pro est stérile tant que l'emballage n'est pas ouvert ou endommagé. Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou s'il a été ouvert par inadvertance.

Le produit est destiné à un usage unique et ne doit pas être restérilisé.

### Conseils d'utilisation

L'application doit être réalisée par du personnel médical spécialisé.

#### 1. Préparation :

Avant d'appliquer Lomatuell® Pro, nettoyer soigneusement la plaie en la rinçant (par ex. avec une solution physiologique saline ou une solution de Ringer).

#### 2. Application

Contrôlez avant l'ouverture que la barrière stérile ne présente pas de dommages évidents.

- Ouvrir l'emballage stérile à l'endroit indiqué et retirer le produit dans des conditions stériles
- Retirer le film protecteur appliqué des deux côtés
- Appliquer Lomatuell® Pro en débordant d'environ 1 cm sur les bords de la plaie. Pour adapter les dimensions du pansement à la plaie, le produit peut être découpé selon les besoins à l'aide de ciseaux stériles.
- Pour les plaies fortement exsudatives, un pansement hautement absorbant est posé en tant que pansement secondaire (p. ex. Vliwazell® Compresse absorbante). Pour les plaies modérément à faiblement exsudatives, la pose d'une compresse en non-tissé ou de gaze est suffisante (p. ex. Gazin® Compresse de gaze ou Vliwasoft® Compresse en non-tissé). Pour favoriser un milieu de plaie chaud et humide et protéger la plaie des germes et des bactéries de l'extérieur, le pansement peut être fixé avec un film PU (p. ex. Suprasorb® F Pansement film). En cas de risque d'infection accru ou de plaies infectées, la fixation doit être réalisée avec des matériaux de fixation perméables à l'air (p. ex. Curafix® H Pansement adhésif de fixation large). Les mesures connues destinées au traitement des infections doivent être prises en cas de plaies infectées.

#### 3. Changement de pansement :

L'intervalle de changement de pansement recommandé est en règle générale de 2 à 4 jours. En fonction du type de plaie et du processus de cicatrisation, le pansement peut être laissé plus ou moins longtemps sur la plaie (max. 7 jours), après consultation du professionnel de la santé en charge des soins.

#### 4. Conditions de conservation et de transport :

Stocker Lomatuell® Pro à plat.

#### 5. Élimination :

En Europe, un code de déchet du Chapitre 18 01 de la Directive du catalogue européen des déchets (catalogue européen des déchets – CED, AVV en Allemagne) peut être affecté aux déchets de produits et un code de déchet du Chapitre 15 01 de cette même directive peut être affecté aux déchets d'emballage. Les emballages recyclables doivent être déposés dans les systèmes de recyclage nationaux correspondants.


### Remarques générales

En cas d'incident grave, veuillez contacter le fabricant et l'autorité sanitaire compétente.

STERILE R




Do not use if package is damaged

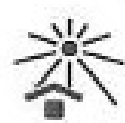

0123

MD

legend lagern, store horizontally

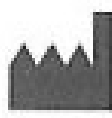

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG  
Westerwaldstraße 4 · 56579 Rengsdorf, Germany  
www.Lohmann-Rauscher.com · Made in Germany

4051431/2024-02